

# **EUMEDICA**<sup>®</sup>

*360° Ortho Solution*

## **Migliora il tuo benessere**

IL TUO PARTNER IDEALE  
PER OFFRIRE AI TUOI CLIENTI  
SICUREZZA E PROTEZIONE  
IN QUALSIASI SITUAZIONE  
DI VITA QUOTIDIANA,  
LAVORO E SPORT.

11/2021



**Vademecum**



## EUMEDICA Srl

Azienda con sistema di gestione della qualità  
certificata da TÜV NORD CERT GmbH conforme alla norma

### ISO 9001: 2015

“Certificato N° 44 100 097257”

I PRODOTTI EUMEDICA SONO DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I  
ad eccezione dei salva-plantari Adegua.

La linea creme Alevia ed Euscar pomata sono prodotti cosmetici.

## EUMEDICA VADEMECUM

Guida alle prescrizioni  
a cura del  
Servizio Marketing EUMEDICA

Edizione novembre 2021

Il **Vademecum** è stato approntato dal Servizio Marketing EUMEDICA  
per una facile e pronta individuazione del prodotto più idoneo  
a risolvere le diverse problematiche medico - chirurgiche.

Il **Vademecum** si rivolge al chirurgo e al tecnico ortopedico, al reumatologo,  
al medico sportivo, al podologo, al fisiatra, al tecnico della riabilitazione.

Alla ricerca della massima chiarezza e facilità di consultazione, nella stesura di questo prontuario  
abbiamo quasi sempre adottato il criterio della suddivisione topografica in distretti corporei.

Solo alcuni presidi sono stati invece raggruppati per classe di prodotto o indicazione.

“**Eumedica ha una missione:** migliorare la vita dei pazienti attraverso il recupero funzionale  
della menomazione, curando con il movimento secondo il metodo del bendaggio funzionale.”

Eumedica sostiene: **I BAMBINI DELLE FATE**  
per l'Inclusione Sociale

Pag.

<b>Intro Eumedica</b>		4
<b>Zero Impact</b>		8
<b>Tabelle tecniche generali</b>		10
<b>Il collo</b>		20
<b>La spalla</b>		23
<b>Il gomito</b>		29
<b>Il polso e la mano</b>		30
<b>La colonna</b>		35
<b>Il ginocchio</b>		41
<b>La caviglia</b>		47
<b>Il piede</b>		56
<b>Cicatrici ipertrofiche</b>		90
<b>La mano</b>		92
<b>Antidecubito</b>		94
<b>Riabilitazione</b>		96
<b>Diabetologia</b>		103
<b>Eumedica Shoes</b>		104
<b>Materiali per protesi</b>		107
<b>Bendaggio e taping</b>		109
<b>Creme protezione mani e piedi</b>		111
<b>Protezione della persona</b>		115
<b>Zero Impact Active</b>		119
<b>Push Sport</b>		127
<b>Eumedica Active</b>		133
<b>Tabelle misure</b>		135
<b>Materiali POP</b>		145

## Muoversi bene per vivere meglio

### Chi siamo:

Siamo un'azienda solida e dinamica che dal 1992 si dedica con passione alla ricerca di soluzioni medicali per lo **sport**, il **lavoro** e la **vita quotidiana**. Una **linea completa** di prodotti studiati per **proteggere** la zona di applicazione e risolvere disturbi legati all'apparato muscolo-scheletrico. **Praticità, comodità e massima durata** sono gli obiettivi che ricerchiamo in ogni soluzione.

### Cosa facciamo?

Curiamo attraverso il movimento, limitando le azioni scorrette delle articolazioni e consentendo la naturale attività. Rispondiamo alle richieste di pazienti e professionisti **per aiutarli ad affrontare in sicurezza e protezione ogni situazione della propria vita**.

### Scegliere Eumedica significa:

- Affidarsi a **soluzioni** create in collaborazione con centri ospedalieri, cliniche, strutture private e i migliori tecnici ortopedici.
- Poter contare su **idee di nuova concezione**.
- Disporre di **prodotti costantemente aggiornati**, funzionali ed efficaci.

SEDE EUMEDICA s.r.l. - Via della Meccanica, 8/10 | 35127 Padova

### Perché affidarsi a noi?

Curiamo la **gestione dell'aspetto commerciale** garantendo massima precisione, puntualità e la professionalità di un **Servizio Clienti** molto preparato che vi seguirà con attenzione e cortesia. Offriamo una **solida partnership tecnica** grazie a un team sempre presente composto da persone attente, precise, che sanno ascoltare le vostre esigenze e affiancarvi con competenza.

### Ci mettiamo in gioco

La **libertà di movimento inizia dal comfort**, che ci deve accompagnare in ogni passo della nostra giornata. Infortuni, dolori o fastidi, anche i più piccoli, possono condizionare il lavoro, l'attività sportiva o la vita di tutti i giorni. Ecco perché Eumedica **si mette in gioco** nella ricerca di soluzioni performanti per la cura della **salute fisica**, dedicando attenzione alla **qualità del movimento** in tutte le sue forme.

Tante idee, anche per lo stesso problema, capaci di soddisfare le esigenze più varie, con l'obiettivo di curare il **benessere** del corpo di tutti. **Muoversi bene significa vivere meglio** ed Eumedica lo sostiene con impegno.



## Scegliere Eumedica significa:

- Affidarsi a soluzioni create in collaborazione con centri ospedalieri, cliniche, strutture private e i migliori tecnici ortopedici
- Poter contare su idee di nuova concezione
- Disporre di prodotti costantemente aggiornati, funzionali ed efficaci

## LEGENDA PER ORIENTARSI MEGLIO

DIVISIONE PER AREE CORPOREE

- Il collo
- La spalla
- Il gomito
- Il polso e la mano
- La colonna
- Il ginocchio
- La caviglia
- Il piede

DIVISIONE PRODOTTI SPECIFICI

- Cicatrici ipertrofiche
- Protezione della persona
- Antidecubito
- Riabilitazione
- Diabetologia
- Eumedica Shoes
- Materiali per protesi
- Bendaggio e taping

BRAND LINEA SPORT



## Le NOSTRE LINEE prodotto



**ZERO IMPACT**,  
la gamma di tutori e plantari studiata per sostenere la funzionalità delle articolazioni nella quotidianità, durante l'attività sportiva e nella riabilitazione.



**LINEA PIEDE**,  
prodotti specifici in morbido Ole-ogel protettivo, pensati per prevenire o alleviare i disturbi più comuni legati ai piedi.



**EUSCAR**,  
la pomata ad azione emolliente e il patch in silicone ideati per il trattamento di cicatrici cutanee di ogni tipo. Prodotti specifici per la mano in morbido Oleo-gel, pensati per il trattamento delle cicatrici.



**ALEVIA**,  
creme protettive e lenitive per mani e piedi, a base di sostanze naturali funzionali ed estratti vegetali.



**UNIKA**,  
la linea dedicata al comfort degli sportivi e delle persone fisicamente attive.

Inoltre, Eumedica è distributore esclusivo italiano di **PUSH BRACES** e **PUSH SPORTS**, la gamma di tutori ortopedici e di tutori sportivi ultrasottili, che sostengono le articolazioni e garantiscono libertà di movimento.

**EUMEDICA**<sup>®</sup> DISTRIBUTORE UFFICIALE DI:





**PIÙ  
MOVIMENTO  
ALLA TUA VITA**

# UNA LINEA COMPLETA DI TUTORI PER DONARE SOLLIEVO ALLE ARTICOLAZIONI E RITROVARE IL PIACERE DI UNA VITA ATTIVA.



MEDX +

## USO RIABILITATIVO

I tutori ideati  
nelle riabilitazioni  
post-operatorie.



## USO QUOTIDIANO

I tutori e plantari adatti  
all'attività quotidiana.



## USO SPORTIVO

I tutori pensati  
per praticare sport.

**SCOPRI I PRODOTTI** nelle pagine successive

**LINEA SPORT** pagina 119

Tutti i dispositivi ZERO IMPACT offrono stabilità, sostengono il movimento nelle normali attività quotidiane e sportive, e favoriscono un rapido recupero nel decorso post-operatorio, assorbendo l'impatto causato da sovraccarichi. Ogni supporto è il risultato delle caratteristiche tecnico-strutturali dei materiali, che donano un effetto ammortizzante e aiutano a recuperare la funzionalità articolare.

# TABELLA TECNICA

## IL POLSO



	<b>Polsiera PUSH CARE</b>	<b>Polsiera PUSH MED</b>	<b>Tutore pollice PUSH ORTHO CMC</b>	<b>Ferula per polso PUSH MED SPLINT</b>	<b>Ultra fit lacci ZERO IMPACT</b>	<b>Ultra fit plus ZERO IMPACT</b>	<b>Tutore pollice PUSH SPORTS</b>	<b>Polsino PUSH SPORTS</b>	<b>Polsiera PUSH SPORTS</b>
<b>PAGINA</b>	30	30	31	31	32	32	128	129	129
<b>Prevenzione</b>	•			•			•	•	•
<b>Strappi / Tendiniti</b>	•	•		•	•	•	•	•	•
<b>Tunnel carpale</b>	•			•					
<b>Trattamento secondario post frattura</b>		•			•	•			
<b>Tutore per la rizoartrosi del pollice</b>			•						
<b>Artrosi / Artrite</b>	•	•	•	•	•	•			
<b>Distorsioni</b>		•		•	•	•			
<b>Tendinite De Quervain</b>						•			
<b>Iperestensione MCP-1 Pollice sciatore</b>							•		

# TABELLA TECNICA

## LA COLONNA



Tutore lombare  
PUSH CARE

Tutore lombare  
PUSH MED

Tutore lombare  
ZERO IMPACT

Tutore lombare  
Ortho Nero  
ZERO IMPACT

Tutore lombare  
Ortho Sport  
ZERO IMPACT ACTIVE

Corsetto lombare  
Tigges K/N uomo  
ZERO IMPACT

Corsetto lombare  
Tigges K/N donna  
ZERO IMPACT

Corsetto lombare  
Tigges unisex  
ZERO IMPACT



	37	37	36	36	123	39	39	40
<b>PAGINA</b>								
Prevenzione	•		•	•				•
Lombalgia	•		•	•	•	•	•	•
Lombosciatalgia	•				•	•	•	•
Spondilolisi		•						
Spondilolistesi		•						
Artrosi		•			•	•	•	
Discopatia		•	•		•	•	•	
Trattamento postoperatorio		•						
Fratture su base osteoporotica		•						

# TABELLA TECNICA

## IL GINOCCHIO



MEDX +

ACTIVE

Ginocchiera PUSH CARE    Ginocchiera PUSH MED    Supporto rotuleo PUSH MED    Ginocchiera EUSPLINT    Ginocchiera POSTOPERATORIA    Ginocchiera SPORTIVA KFS ZERO IMPACT ACTIVE    Tutore ROTULEO ZERO IMPACT ACTIVE    Ginocchiera BAMBU ZERO IMPACT ACTIVE    Ginocchiera rinforzata BAMBU ZERO IMPACT ACTIVE    Cinturino rotuleo PUSH SPORTS    Ginocchiera PUSH SPORTS    Ginocchiera EU - CONT ZERO IMPACT    Ginocchiera rinforzata EU - CONT ZERO IMPACT    Ginocchiera SYLICON EU - CONT ZERO IMPACT



PAGINA	42	43	43	44	45	120	121	125	125	132	132	46	46	46
Distorsioni da lievi a moderate	•							•	•		•	•	•	•
Meniscopatie	•								•					•
Artrosi e artrite	•	•						•	•			•	•	•
Post artroscopia	•								•					•
Instabilità articolare	•	•				•								
Trattamento secondario post chirurgia dei legamenti		•												
Gonalgia da alterato tracking rotuleo						•								
Sublussazione della rotula							•							
Sindrome femoro rotulea	•		•				•	•	•	•	•	•		•
Lesioni/riparazioni di tutti i legamenti del ginocchio			•	•	•									
Riparazioni osteocondrali, suture meniscali, fratture del piatto tibiale, fratture condiliche, osteotomie tibiali prossimali				•	•									
Ricostruzioni del tendine rotuleo e del tendine quadricipitale				•	•									
Strappi muscolari e distorsioni del ginocchio				•	•									
Artrosi mono-compartmentale del ginocchio di grado da lieve a moderato						•								
Ginocchio del saltatore			•							•				
Morbo di Osgood-Schlatter														
Runner's Knee							•							

# TABELLA TECNICA LA CAVIGLIA



Cavigliera PUSH CARE	Cavigliera PUSH MED	Tutore PUSH MED AEQUI FLEX	Tutore PUSH ORTHO AEQUI	Cavigliera ZERO IMPACT MARATHON MEMORY	Cavigliera ZERO IMPACT MARATHON AIR	Cavigliera ZERO IMPACT MARATHON AIR LITE	Cavigliera ASO ANKLE STABILIZER	Cavigliera PUSH ORTHO Aequi Junior	Cavigliera EU - CONT ZERO IMPACT	Tutore Caviglia ZERO IMPACT ACTIVE	Cavigliera BAMBÙ ZERO IMPACT ACTIVE	Cavigliera a "8" PUSH SPORTS	Cavigliera KICX PUSH SPORTS
-------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	-----------------------------------



PAGINA	48	49	48	49	51	51	51	52	53	47	122	126	130	131
Compressione	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
Sostegno meccanico	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
Lieve instabilità	●									●	●	●	●	●
Lieve distorsione	●									●	●	●	●	●
Moderata instabilità								●	●					●
Grave instabilità			●	●				●	●					
Terapia conservativa dopo lesione ai legamenti		●	●	●	●	●	●	●	●					
Terapia post-traumatica i legamenti con edema			●			●	●							
Osteoartrite con instabilità		●	●	●	●			●	●					
Prevenzione lesioni ai legamenti		●	●	●	●			●	●					

# TABELLA TECNICA I PLANTARI

**+EUMEDICA®**



	Supporto GEL-AIR MINI	Plantare GEL-AIR	Plantare EU-SHOCK ABSORBER 4/4	Plantare MICROBIAL PROTECTION EU-SHOCK ABSORBER 4/4	Plantare ZERO IMPACT COCCO-TECH RED	Plantare ZERO IMPACT COCCO-TECH BLACK	Plantare ZERO IMPACT MEMORY 4G	Talloniera EU-SHOCK RED	Talloniera EU-SHOCK BLUE	Talloniera EU-SHOCK standard	Talloniera EU-SHOCK con inserto rimovibile	Supporto metatarsale DUO EU-INSOLE	Supporto metatarsale EU-INSOLE
<b>PAGINA</b>	80	81	83	83	87	87	88	84	84	85	85	82	83
Metatarsalgia	•	•	•	•								•	•
Plantalgia		•	•	•	•	•	•						
Talalgia			•	•	•	•	•	•		•	•		
Spina calcaneare					•				•	•	•		
Piede diabetico					•	•							
Micosi (piede d'atleta)					•	•							
Tendinite						•				•			
Pronazione			•	•		•	•						
Piede piatto							•						
Fascite plantare			•	•		•				•	•		
Alluce valgo												•	



## IL COLLO



### IL COLLO NEL CORPO UMANO È UNA PARTE DOTATA DI GRANDE MOBILITÀ.

Lo scheletro nel collo è rappresentato dal settore cervicale della colonna, composto da 7 vertebre e dall'osso ioide, in posizione anteriore.

Nel collo hanno sede organi vitali che possono essere danneggiati gravemente da traumi di vario genere, tra questi uno molto frequente è il cosiddetto "colpo di frusta" conseguenza di un tamponamento in automobile.

Il collo, inoltre, può essere dolorante a causa di cattiva postura, specie di notte, o di artrosi cervicale.

È quindi importante disporre, in caso di bisogno, di sostegni conformati anatomicamente, funzionali, leggeri e traspiranti il cui uso sia confortevole ed efficace.



#### Collare Cervicale PUSH Care

Conformazione anatomica con bordi arrotondati. Sostegno funzionale del rachide cervicale. Tessuto in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Adatto all'utilizzo sia durante il giorno che la notte.

**Indicazioni:** cervicalgia lieve o moderata su base infiammatoria e post-traumatica, forme minori di artrosi cervicale.

Misure 1, 2  
Codice PC1601CO (h 8 cm)  
PC1602CO (h 10 cm)

Tab. misure pag. 137



#### Collare Cervicale PUSH Med

Conformato anatomicamente, con bordi arrotondati. Rinforzo con elevato grado di sostegno, in spugna sintetica semirigida. Tessuto in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Il rinforzo è amovibile durante le ore notturne oppure nelle fasi avanzate del trattamento. L'incavo in corrispondenza del pomo d'Adamo migliora molto il comfort.

**Indicazioni:** colpo di frusta cervicale, stadi avanzati dell'artrosi cervicale, cervico-brachialgia, discopatia, ernia del disco cervicale, trattamento postoperatorio.

Misure 1, 2  
Codice PM2601CO (h 8 cm)  
PM2602CO (h 10 cm)

Tab. misure pag. 137



## IL COLLO



### Collare EUSOFT

Collare ortopedico in poliuretano morbido chiusura regolabile in velcro.

**Indicazioni:** cervicalgie artrosiche e infiammatorie, distorsioni cervicali lievi.

Misure **S, M, L** Tab. misure pag. 137  
Codice **EU 008E** (h 8 cm)  
**EU 010E** (h 10 cm)

### Collare EUSOFT Rinforzato

Collare morbido in poliuretano rivestito in cotone con sostegno interno, chiusura regolabile in velcro.

**Indicazioni:** distorsioni cervicali, cervicobrachialgie, artrosi cervicali.

Misure **S, M, L** Tab. misure pag. 137  
Codice **EU 8 E** (h 8 cm)  
**EU 10 E** (h 10 cm)



### Collare EULIGHT

Collare ortopedico in polietilene tipo "Shanz". Rigido ma leggero. Traspirante, regolabile in altezza, chiusura in velcro.

**Indicazioni:** distorsione cervicale, "colpo di frusta", artrosi cervicale.

Misure **S, M, L** Tab. misure pag. 137  
Codice **EU 007**



## SCAPOLA, OMERI E CLAVICOLA SONO LE TRE OSSA CHE FORMANO LA SPALLA.

Esse sono collegate insieme da un sistema di tendini e muscoli. Le patologie più comuni di questa articolazione, causate generalmente dall'età o dall'esecuzione di alcuni movimenti violenti e ripetuti sono: contusioni, distorsioni, fratture. Un valido aiuto nella cura dei vari traumi è costituito dai bendaggi e tutori qui presentati.



### Reggibraccio

Reggibraccio in tessuto - Fibbia regolabile. Mantiene comodamente l'arto superiore sospeso al collo.

**Indicazioni:** traumi e algie dell'arto superiore, postumi di emiplegia, riabilitazione.

Misure **Unica**  
Codice **EU 001**



### Reggibraccio aereo

Reggibraccio in tessuto traforato: massima leggerezza e traspirazione. Regolabile.

**Indicazioni:** traumi e algie dell'arto superiore, postumi di emiplegia, riabilitazione.

Misure **Unica**  
Codice **EU 012**

## LA SPALLA

### Bendaggio tipo VELPEAU

Immobilizza il braccio in abduzione contro il torace. Sostituisce la fasciatura alla Désault. Non ostacola l'igiene personale del paziente.

**Indicazioni:** lussazione scapolo-omerale, fratture del collo dell'omero, trattamento postoperatorio (osteosintesi, acromioplastica).

Misure **Unica**  
 Codice **EU 003** reggibraccio sintetico nero  
**EU 003B** reggibraccio sintetico nero per bambino (dai 6 ai 10 anni)



### Bendaggio S. O. Band

Bendaggio preconfezionato e pronto all'uso per l'immobilizzazione della spalla e dell'arto superiore. Semplice e pratico S.O BAND è ideale sia nel pronto soccorso (fratture e lussazioni) che nel postoperatorio (fratture, lussazioni e lesioni della cuffia dei rotatori). Può essere indicato in alternativa a bendaggi di tipo Désault, Gilchrist e Velpeau.

Non provoca compressioni garantendo un fissaggio stabile senza limitare il comfort.

**Indicazioni:** contusioni - distorsioni - fratture e lussazioni della scapolo-omerale - lesioni della cuffia dei rotatori - fratture del collo dell'omero - immobilizzazione postoperatoria (osteosintesi, capsulorrafia, riparazione della cuffia).

Misure **S, M, L, XL**  
 Codice **EU 015**



## LA SPALLA

### Bendaggio per frattura di clavicola

Il bendaggio "a otto" mantiene retroposte le spalle, determinando la riduzione della frattura della clavicola. Costituito in schiuma poliuretanic ricoperta di maglia di cotone.

**Indicazioni:** frattura della clavicola.

Misure **XS (L 92 cm)**  
**S (L 100 cm)**  
**M (L 110 cm)**  
**L (L 120cm)**  
**XL (L 130 cm)**

Codice **EU 004**



Per determinare la misura del tutore, passare il metro sul paziente come se si stesse indossando il tutore stesso.



## LA SPALLA



### A-C Band - Bendaggio per l'articolazione acromion-claveare

Tutore specifico per il trattamento conservativo dei traumi che provocano la separazione dell'articolazione acromion-claveare. Permette di ridurre e mantenere ridotta l'articolazione, ripristinando il contatto fisiologico tra l'acromion e la clavicola.

**Indicazioni:** distorsioni, lussazioni e sublussazioni dell'articolazione acromion-claveare.

Misure **S, M, L** Tab. misure pag. 137  
Versioni **Destra e Sinistra**  
Codice **EU 045**

### EUFIX-SO - Stabilizzatore di spalla

Progettato per offrire sostegno e protezione alla spalla di chi pratica sport, in particolare quelli di contatto. Utilissimo nella prevenzione dell'instabilità gleno-omeroale e delle patologie della cuffia dei rotatori. Il suo meccanismo d'azione risiede nel controllo e nella limitazione selettiva del movimento che sarebbe rischioso o doloroso per l'atleta. Stabilizza, limita e assiste il movimento della spalla in accordo con le necessità specifiche di ogni singolo atleta. Con la limitazione controllata del movimento, è garantita la naturale funzione articolare e muscolare.

**Indicazioni:** sindromi dolorose della cuffia dei rotatori ("impingement" sottoacromiale, tendinite del capo lungo del bicipite, borsite, lesione parziale della cuffia), instabilità dell'articolazione scapolo-omeroale (sublussazione/lussazione recidivante, lesione del cercine glenoideo), esiti di lesioni traumatiche della spalla.

Misure **S, M, L, XL** Tab. misure pag. 137  
Versioni **Destra e Sinistra**  
Codice **EU 044**



## LA SPALLA



### EUREVERSE Tutore per abduzione della spalla

Tutore per abduzione della spalla con cuscino di sostegno in poliuretano rivestito in morbido tessuto, stecca rigida di sostegno polso e mano. Possibilità di scelta del grado di abduzione: a 15° oppure a 45°/65°. Igienico e comodo. Favorisce il trattamento riabilitativo. Evita la messa in tensione delle strutture riparate chirurgicamente.

**Indicazioni:** rottura della cuffia dei rotatori, artroprotesi di spalla, frattura della testa e del collo dell'omero, frattura del trochite omeroale.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU 032 abduzione 15°**

### Tutore per abduzione della spalla a 45°/65°

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU 031 abduzione 45°/65°**

Tutore per abduzione della spalla a 45°



Tutore per abduzione della spalla a 65°



## LA SPALLA



RIABILITAZIONE

### Tutore di spalla per emiplegici

Sostiene l'arto superiore colpito da emiplegia e si oppone alla discesa della testa omerale, mantenendo i capi articolari della spalla congruenti. Leggero, ben tollerato, economico. Si applica e si rimuove facilmente per consentire le cure riabilitative.

**Indicazioni:** emiplegia e suoi esiti, "spalla paralitica".

Misure **XS, S/M, L/XL**  
Codice **EU 013**

Tab. misure pag. 137



## IL GOMITO È L'ARTICOLAZIONE CHE UNISCE IL BRACCIO CON L'AVAMBRACCIO ATTRAVERSO DUE MOVIMENTI: FLESSIONE ED ESTENSIONE.

Il gomito è particolarmente esposto alle patologie traumatiche, degenerative e infiammatorie.

### Gomitiera PUSH MED

Guaina compressiva. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Stecche di rinforzo flessibili per dirigere la flessione-estensione del gomito. Limitazione dell'estensione mediante due cinghie regolabili. Zone di comfort attorno alle aree più esposte. Aderenza perfetta, inserti in silicone anti-scivolamento. Applicabile facilmente con una mano sola.

**Indicazioni:** impingement da iperestensione del gomito, postumi di fratture o lussazioni, artrosi.

Misure **1, 2, 3, 4, 5**  
Codice **PM2702GO**

Tab. misure pag. 139



### Tutore per spalla PUSH MED

Immobilizzazione efficace di braccio e avambraccio, lasciando liberi la spalla e il collo. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. La cinghia toracica blocca il braccio in adduzione, una seconda cinghia blocca il polso e impedisce le rotazioni, una terza cinghia più piccola sostiene la mano all'altezza dei metacarpi.

**Indicazioni:** lussazioni e sublussazioni della spalla, frattura del collo dell'omero, lesioni dell'articolazione acromion-claveare, trattamento postoperatorio.

Misure **1, 2, 3**  
Codice **PM2503TS**

Tab. misure pag. 137



### Tutore per epicondiliti EPI PUSH MED

Allevia il dolore al gomito mediante una pressione localizzata sugli estensori (gomito del tennista) o sui flessori del polso (gomito del golfista). Cuscinetto viscoelastico anti-scivolamento, anatomico. Copertura rigida per distribuire le forze esercitate dalla cinghia anelastica. Perfettamente tollerato, non ostacola le comuni attività quotidiane. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.

**Indicazioni:** epicondiliti (gomito del tennista), epitrocleite (gomito del golfista)

Misure **Unica**  
Codice **PM2701GO**



Vedi anche Tutore epicondiliti Push Sports P4701SA - Pag. 130



## IL POLSO È LA REGIONE STRETTA E FLESSIBILE CHE DIVIDE LA MANO DALL'AVAMBRACCIO.

È formato da una fila di piccole ossa chiamate carpo e da una sorta di cerniera malleabile. Pollice dello sciatore, rizartriosi, morbo di Quervain, sindrome del tunnel carpale sono le malattie più comuni che colpiscono il polso. Ognuna di queste si può risolvere con l'aiuto del tutore adatto allo scopo.



### Polsiera PUSH Care

Compressione regolabile attorno al polso. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Migliora la sensazione di stabilità senza intralciare le attività quotidiane.

**Indicazioni:** lievi distorsioni e instabilità del polso, strappi e tendiniti di grado lieve, forme iniziali di artrosi e artrite.

Misure 1, 2, 3, 4 Tab. misure pag. 139  
Codice PC11012P DX  
PC11011P SX

Vedi anche Polsiera Push Sports P41012P DX / P41011P SX - Pag. 129



### Polsiera PUSH Med

Doppio supporto del polso (dorsale e palmare) con stecche di forma anatomica modellabili. Compressione regolabile. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Ampio range di applicazioni: dalla fase acuta a quella riabilitativa. Si indossa facilmente con una mano sola. Non intralcia la funzione delle dita.

**Indicazioni:** distorsioni del polso da moderate a gravi, strappi e tendiniti, trattamento secondario di fratture del polso, artrosi.

Misure 1, 2, 3, 4 Tab. misure pag. 139  
Codice PM21012P DX  
PM21011P SX



Misure 0, 1, 2, 3  
Codice P031012CMC - DX  
P031011CMC - SX

Tab. misure pag. 139



## IL POLSO E LA MANO

### PUSH ORTHO CMC Tutore dinamico per la rizoartrosi

Il supporto CMC dà sostegno al pollice quando è presente un'inflammatione o lesione dell'articolazione trapezio-metacarpale, specificamente progettato per il trattamento dell'artrosi trapezio-metacarpale, o rizoartrosi. Il tutore **PUSH Ortho CMC** mantiene il 1° metacarpo in posizione funzionale, con il pollice in opposizione. Esso stabilizza l'articolazione trapezio-metacarpale, lasciando completamente liberi sia il polso che l'articolazione metacarpo-falangea del pollice. Il nuovo prodotto si fonda sul principio della stabilizzazione attraverso la creazione di un **ambiente pseudo-idraulico**, mutuato dai principi del trattamento funzionale delle fratture di Sarmiento. In questo modo si ottiene, in conseguenza della stabilizzazione articolare, anche un efficace controllo del dolore. Il secondo principio fondante consiste nel **mantenimento della funzione**. Il pollice viene posto in posizione funzionale, le articolazioni vicine vengono lasciate libere e il dolore viene controllato: tutto ciò concorre ad aumentare l'utilizzo della mano nelle funzioni della vita quotidiana e a rallentare la progressione della malattia.

**Indicazioni:** trattamento conservativo di tutti gli stadi della malattia (Stadi I, II, III e IV), trattamento postoperatorio dopo artroplastica della trapezio-metacarpica, contrastare l'instabilità cronica della trapezio-metacarpica.

Vedi anche Tutore Pollice Push Sports P41032TP DX / P41031TP SX - Pag. 128

### Ferula per polso PUSH Med Splint

Elevato grado di sostegno e protezione del polso. Stecche conformate anatomicamente. Compressione regolabile. Zone di comfort imbottite. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Si indossa facilmente con una mano sola. È utilizzabile sia di giorno che di notte.

**Indicazioni:** sindrome del tunnel carpale, strappi e tendiniti degli estensori resistenti alle terapie, disturbi dell'artrosi e dell'artrite reumatoide da moderati a gravi.

Misure 1, 2, 3, 4 Tab. misure pag. 139  
Codice PM21022PS DX  
PM21021PS SX

Vedi anche Polsino Push Sports P41022PSD DX / P41021PSS SX - Pag. 129

## IL POLSO E LA MANO

### ULTRA FIT LACCI Polsiera funzionale

Tutore funzionale per il polso: traspirante e confortevole. Sistema di chiusura facilitato, a lacci con unico tirante: si chiude con una sola mano. Profilo speciale al palmo della mano: nessuna limitazione ai movimenti delle dita. Stecche modellabili: una dorsale e una palmare. Lunghezza polsiera cm 25.

**Indicazioni:** Artrosi, artrite reumatoide, tenosinoviti, distorsioni, trattamento secondario delle fratture del polso.

**Scelta della misura:** misurare la circonferenza del polso, nel punto dove esso è più largo.

Misure **S, M, L, XL** Tab. misure pag. 139  
Codice **EU0702 Destra**  
**EU0701 Sinistra**

Lunghezza polsiera: cm 25

Misure **S, M, L, XL** Tab. misure pag. 139  
Codice **EU0802 Destra**  
**EU0801 Sinistra**

Lunghezza polsiera: cm 19

### ULTRA FIT PLUS

Struttura di schiuma. Chiusure in velcro. Stecca palmare modellabile e removibile. Stecca modellabile per il pollice. Colore Nero. Sostegno combinato del polso e del pollice, efficace e confortevole. Mobilità completa delle altre dita. Allacciatura del pollice regolabile. Lunghezza della polsiera cm 25.

**Indicazioni:** strappi e distorsioni del pollice e del polso, tendinite di De Quervain, artrosi e artrite del polso e del pollice, rizartriosi, dopo rimozione di ingessature, postumi di frattura dello scafoide carpale e del pollice.

Misure **S, M, L, XL** Tab. misure pag. 139  
Codice **EU0602 DX**  
**EU0601 SX**

## LE SOLUZIONI IDEALI PER LA CURA DELLA MANO CON UNA LINEA COMPLETA DI PRODOTTI SPECIFICI.

Le mani sono, insieme alla vista, strumento principale di contatto con il mondo esterno e sono il nostro lasciapassare per la vita di tutti i giorni: grazie alle mani possiamo lavorare, giocare, creare, scrivere.

Per questo è importante prendersene cura con dispositivi appositamente creati, flessibili, duttili, efficaci, sia quando sono del tutto efficienti e in salute che quando sono affaticate ad esempio da particolari stress lavorativi. Ma anche in caso di infortunio o di intervento. La cura della mano parte dalle attenzioni per la cute, con creme idratanti e nutritive, e passa per il trattamento delle cicatrici dopo interventi chirurgici dovuti alle patologie più comuni, e contempla anche la fase riabilitativa dell'immediato periodo post-operatorio.



**OLEO  
GEL**

### L'OLEO-GEL e i suoi benefici

Grazie alle sue proprietà chimico-fisiche, il nostro gel è la sostanza ideale per ricoprire e proteggere la cute di ogni parte del corpo. È in grado di adattarsi perfettamente alle forme e alle sporgenze. È un ottimo ammortizzatore delle pressioni e dissipatore degli attriti. Il microclima che si crea tra l'oleogel e la cute aiuta la stessa a mantenersi più morbida ed elastica, alleviando così il dolore dove screpolature e lesioni fossero già presenti.




interno in  
**OLEO  
GEL**

### CARPAL GEL SLEEVE Cuscinetto in Oleo-gel

Misure **S/M DX/SX, L DX/SX**  
Codice **S1012 SM - Donna**  
**S1012 L - Uomo**

Dettagli a pagina 92

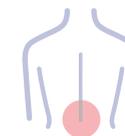

interno in  
**OLEO  
GEL**



## HAND DIGITUBE Tubolare con gel ritagliabile

Misure **S, L**  
Codice **EU047F**

Dettagli a pagina 92

interno in  
**OLEO  
GEL**



## HAND DIGITAL CAP Guaina digitale

Misure **S, L**  
Codice **EU048F**

Dettagli a pagina 92

**OLEO  
GEL**



## HAND EUCAP Cappuccio in Oleo-gel per le dita

Misure **Unica**  
Codice **EU049F**

Dettagli a pagina 93

**OLEO  
GEL**



## HAND GEL SPREADER LOOP Divaricatore con doppio anello di fissaggio

Misure **Unica**  
Codice **EU050F**

Dettagli a pagina 93

**OLEO  
GEL**



## HAND MULTI PROTECTION Cuscinetto protettivo in gel autoaderente

Misure **Unica - 8 x 7 cm**  
Codice **EU051F**


Dettagli a pagina 93

## LA COLONNA VERTEBRALE A RAGIONE PUÒ ESSERE DEFINITA COME L'ALBERO DELLA NOSTRA VITA.

È una complessa struttura ossea, disco-legamentosa e muscolare che unisce in sé caratteristiche peculiari contrapposte come la **STABILITÀ** e la **MOBILITÀ**.

Sono due concetti che non troverebbero un comune denominatore, ma che invece nella colonna vertebrale coesistono. E ciò è reso possibile dalla sovrapposizione di elementi ossei (le vertebre) e strutture visco-elastiche (i dischi intervertebrali) amalgamati e controllati da legamenti e muscoli.

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> Cervicale 7 vertebre | <b>3</b> Lombare 5 vertebre |
| <b>2</b> Dorsale 12 vertebre  | <b>4</b> Sacrale 5 vertebre |

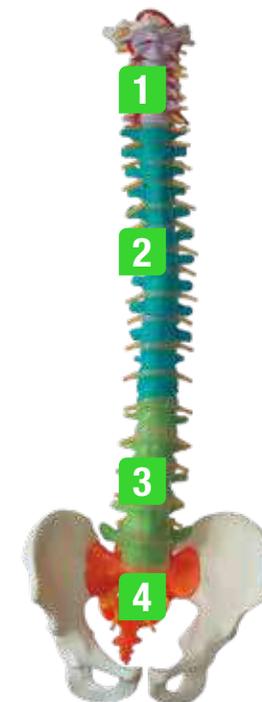



## COLONNA VERTEBRALE

### TUTORE LOMBARE

Studiato per le attività lavorative. Costruito in tessuto elasticizzato, sostiene efficacemente la zona lombare e alleggerisce gli stress sugli ultimi dischi. Dotato di sistema "criss cross" e stecche posteriori. Chiusura in velcro anteriore regolabile.

**Indicazioni:** lombalgia, discopatia

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU034**

Tab. misure pag. 138



### TUTORE LOMBARE ORTHO NERO ZERO IMPACT

In tessuto elasticizzato morbido e altamente traspirante, è dotato di fasce elastiche aggiuntive che consentono una regolazione ottimale della compressione, e rinforzi di supporto verticali che lo rendono particolarmente efficace. Chiusura anteriore regolabile.

**Indicazioni:** destinato a chi svolge attività lavorative che sottopongono la regione lombare a particolari stress. Ideale come prevenzione per chi soffre di frequenti lombalgie o di lombalgia cronica.

Misure **S, M, L, XL, XXL**  
Codice **EU046N**

Tab. misure pag. 138



## COLONNA VERTEBRALE

### Tutore lombare PUSH Care

Allevia dal dolore degli strappi muscolari nelle attività di tutti i giorni. Compressione uniformemente distribuita sui muscoli della regione lombare. Conformazione anatomica. Cuscinetto regolabile e chiusure in velcro con maniglie. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Adatto a ogni tipo di corporatura, maschile e femminile.

**Indicazioni:** disturbi cronici aspecifici della regione lombo-sacrale, sciatica, prevenzione degli strappi muscolari lombari.

Misure **1, 2, 3, 4, 5, 6**  
Codice **PC1401TL**

Tab. misure pag. 138



### Tutore lombare PUSH Med

Sostegno di grado elevato della colonna, dal tratto dorsale inferiore alle prime vertebre sacrali (D8-S2). Conformazione anatomica, non ostacola la posizione seduta. Compressione regolabile. Stecche metalliche preformate, regolabili. Correzione posturale della colonna lombare. Aderenza e vestibilità ottimali. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.

**Indicazioni:** spondilolisi e spondilolistesi, artrosi e discopatia, trattamento postoperatorio, fratture da compressione su base osteoporotica.

Misure **1, 2, 3, 4, 5, 6**  
Codice **PM2402TL**

Tab. misure pag. 138



### TUTORE LOMBARE ORTHO SPORT


Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU057**

Dettagli a pagina 123



## IL SISTEMA TIGGES

### TIGGES CORSETTO LOMBARE

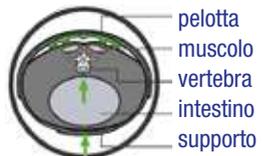

Il Sistema TIGGES allevia la contrattura muscolare ripristinando la normale pressione mediante il supporto elastico e sostenendo la colonna con la pelotta flessibile.

#### Supporti lombari funzionali dinamici

##### IL TUTORE LOMBARE CON PELOTTA SEGMENTATA FLESSIBILE MODULAZIONE DELLA TERAPIA CON TRAINING PROGRESSIVO IN 1 FASE

Nel campo dei disturbi della colonna lombare, i sostegni lombari TIGGES rappresentano un vero e proprio sistema di trattamento a sé.

La gamma dei prodotti è sufficientemente ampia da garantire la perfetta aderenza (e così il perfetto sostegno vertebrale) a ogni tipo di corporatura: femminile o maschile, normale, robusta o minuta.

Il rivoluzionario **Sistema TIGGES** si fonda sul principio del trattamento funzionale: **supporto dinamico**, riequilibrio delle forze in gioco sulla colonna vertebrale, spostamento attivo del baricentro del corpo mediante la compressione e l'elevazione dell'addome. In questo modo viene evitata ogni limitazione di movimento della colonna e il paziente avverte immediatamente i benefici della correzione attiva della postura.

Il sistema sfrutta l'azione sinergica della fascia elastica a elevata compressione e della pelotta a elementi flessibili articolati: il risultato è un sostegno dinamico, senza inutili e dannose limitazioni, con un costante massaggio della muscolatura paravertebrale.

#### Doppia pelotta in dotazione Uomo



#### Doppia pelotta in dotazione Donna



## CORSETTO LOMBARE

### TIGGES K/N UOMO

#### Modulazione della terapia in base alle fasi della sintomatologia



Misure XS, S, M, L, XL  
Codice TO100


Tab. misure pag. 138

Corsetto lombare funzionale con **doppia pelotta dinamica segmentata**. Oltre alla **pelotta standard** viene fornita una **pelotta più sottile** e utilizzata per le fasi di iniziale remissione dei sintomi (dopo un accesso acuto che si è giovato della pelotta più sostenuta), oppure nella prevenzione di recidive della lombalgia (nelle fasi di relativo benessere tra un accesso doloroso e l'altro). Apertura e chiusura a strappo. Le bande di chiusura in velcro permettono di regolare con precisione la compressione che si vuole esercitare. Modello basso, adatto ai soggetti particolarmente attivi.

**Indicazioni:** lombalgia e lombosciatalgia su base posturale, protrusione ed ernia discale, artrosi e discopatia lombo-sacrale.

### TIGGES K/N DONNA

#### Modulazione della terapia in base alle fasi della sintomatologia

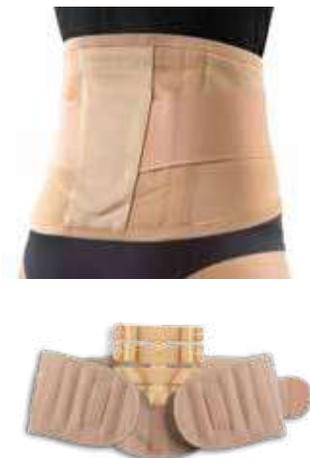

Misure XS, S, M, L, XL  
Codice TO101

Tab. misure pag. 138

Corsetto lombare funzionale con **doppia pelotta dinamica segmentata**. Oltre alla pelotta standard viene fornita una pelotta più sottile e utilizzata per le fasi di iniziale remissione dei sintomi (dopo un accesso acuto che si è giovato della pelotta più sostenuta), oppure nella prevenzione di recidive della lombalgia (nelle fasi di relativo benessere tra un accesso doloroso e l'altro). Apertura e chiusura a strappo. Le bande di chiusura in velcro permettono di regolare con precisione la compressione che si vuole esercitare. Modello basso, adatto per i soggetti particolarmente attivi.

**Indicazioni:** lombalgia e lombosciatalgia su base posturale, protrusione ed ernia discale, artrosi e discopatia lombo-sacrale.

## CORSETTO LOMBARE

### TIGGES UNISEX


**Corsetto lombare dinamico con pelotta segmentata flessibile**

Corsetto lombare funzionale con pelotta dinamica segmentata più sottile e leggera. Apertura e chiusura a strappo. Le bande di chiusura in velcro permettono di regolare con precisione la compressione che si vuole esercitare. Modello universale.

**Indicazioni:** lombalgia da sforzo, attività lavorative pesanti, artrosi e discopatia lombo-sacrale.

Misure **XS, S, M, L, XL**  
Codice **TO103**

Tab. misure pag. 138

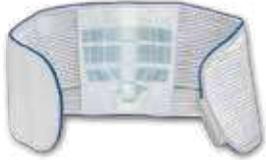


## L'ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO È FORMATA DA DUE OSSA, IL FEMORE E LA TIBIA.

**Partecipa all'articolazione anteriore anche la rotula. Un quarto osso sottile posto lateralmente alla tibia (perone) completa l'articolazione.**

Tutte le superfici articolari sono rivestite di cartilagine. Ulteriore protezione dai traumi e usura deriva dalla presenza di due menischi, che funzionano come cuscinetti ammortizzatori. Il ginocchio viene inoltre stabilizzato da quattro robusti legamenti: due laterali e due interni. Proprio per la presenza di numerose strutture anatomiche, i processi patologici a carico del ginocchio sono numerosi.



### SISTEMA TIGGES

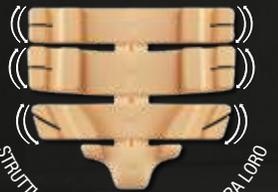

STRUTTURA A SEGMENTI ARTICOLATI FRA LORO E DISPOSTI "A PONTE" DELLA COLONNA

## CORSETTO LOMBARE



## IL GINOCCHIO

### Ginocchiera PUSH Care

Rinnovata e migliorata:

- Efficace supporto della rotula
- Facile da aprire e da indossare
- Gamma più ampia di misure per la coscia

Sollievo della cartilagine femoro-rotulea mediante il supporto stabilizzatore a ferro di cavallo, senza pressione indesiderata sul tendine rotuleo.

Materiali elasticizzati di alta qualità.

Facile da indossare e da allacciare.

Compressione uniforme e regolabile.

Aderenza anatomica e inserti in silicone anti-scivolamento.

**Indicazioni:** distorsioni del ginocchio lievi e moderate, meniscopatie, sindrome femororotulea, artrosi e artrite del ginocchio, instabilità residua del ginocchio, dopo interventi sui menischi e sulla cartilagine del ginocchio (artroscopia).

Misure 1, 2, 3, 4, 5

Tab. misure pag. 139

Versione **Ambidestra**

Codice **PC1302G**

Vedi anche Ginocchiera Push Sports P4301G - Pag. 132



## IL GINOCCHIO

### Ginocchiera PUSH Med

Stabilizzazione mediante snodi speciali a balestra: accompagnano la naturale flessione-estensione del ginocchio senza limitarla, neutralizzano completamente le sollecitazioni medio-laterali. Gli inserti anti-scivolamento in silicone stimolano la propriocezione.

Due cinghie stabilizzatrici oblique controllano gli snodi e tengono in posizione la ginocchiera. Una sola cinghia circolare alla coscia, poplite completamente libero. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.

**Indicazioni:** artrosi e artrite reumatoide con sinovite, instabilità articolare, trattamento secondario dopo chirurgia dei legamenti del ginocchio.

Misure 1, 2, 3, 4, 5

Versione **Ambidestra**

Codice **PM2301G**

Tab. misure pag. 139



### Supporto rotuleo PUSH Med

Sostiene la rotula e riduce le forze di trazione sul tendine. Stimola la propriocezione attraverso una pressione localizzata. Cuscinetto viscoelastico anti-scivolamento, anatomico. Copertura rigida per distribuire le forze esercitate dalla cinghia anelastica. Sottile, con tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.

**Indicazioni:** sindrome femoro-rotulea, "Jumper's knee" (ginocchio del saltatore), tendinite rotulea, morbo di Osgood-Schlatter, sublussazione/ipermobilità della sindesmosi tibio-peroneale prossimale.

Misure **Unica**

Versione **Ambidestra**

Codice **PM2302PA**

Vedi anche Cinturino rotuleo Push Sports P4302PA - Pag. 132

## IL GINOCCHIO

### Ginocchiera EUSPLINT

Stecca immobilizzatrice per ginocchio in tessuto stratificato soffice e confortevole. Apertura anteriore, chiusure regolabili in velcro. Per la tutela del ginocchio, in sostituzione del gesso. Munita di due stecche laterali e una posteriore.

**Indicazioni:** trattamento postoperatorio - immobilizzazione temporanea.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU 00650** (lunghezza cm 60)



## IL GINOCCHIO

### Ginocchiera TELESCOPICA POSTOPERATORIA Zero Impact

La ginocchiera postoperatoria Zero Impact contribuisce al ripristino della normale funzionalità del ginocchio o consente un prolungato periodo di riabilitazione.

La struttura in lega di alluminio è resistente al carico ma anche duttile per essere adattata alle singole esigenze: è possibile regolare la lunghezza della stecca premendo l'apposito tasto per scegliere la lunghezza desiderata. La stabilizzazione del ginocchio è data dalle quattro fasce di fissaggio. Regolazione bilaterale della flessione-estensione: flessione 0°-120°, estensione 0°-90°. Una volta scelto il grado di flessione/estensione è possibile bloccare l'impostazione premendo il tasto giallo verso il basso.

#### Indicazioni:

1. Trattamento conservativo dell'instabilità conseguente a protesi di ginocchio
2. Lacerazione del legamento crociato anteriore e posteriore (LCA+LCP), lesione dei legamenti collaterali (LCM e LCL)
3. Trattamento riparativo a seguito di frattura del ginocchio, della rotula, lussazione, sublussazione, lesione del menisco, contrattura, artrosi, iperestensione del ginocchio, ecc.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU059**



### Ginocchiera Sportiva KFS

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU0800**

Dettagli a pagina 120



### Tutore ROTULEO

Misure **S, M, L**  
Codice **EU056**

Dettagli a pagina 121



## IL GINOCCHIO

### Ginocchiera EU-CONT®

Calza perfettamente grazie anche a un allungamento longitudinale che impedisce lo scivolamento della ginocchiera. La parte centrale elastica si adatta in modo anatomicamente ottimale quando si flette il ginocchio. Priva di cuciture, è ideata per esercitare una forte compressione.

**Indicazioni:** distorsioni, contusioni, artrosi, artrosinovite.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU0400**

**EU-CONT**

Tab. misure pag. 139

Vedi anche Ginocchiera Bambù EU053 - Pag. 125

### Ginocchiera RINFORZATA - EU-CONT®

Guaina di maglia elasticizzata ideata per esercitare una compressione; rinforzata da 2 stecche flessibili laterali.

**Indicazioni:** distorsioni, lesioni legamentose dei collaterali, strappi muscolari.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU0410**

**EU-CONT**

Tab. misure pag. 139

Vedi anche Ginocchiera rinforzata Bambù EU054 - Pag. 125

### Ginocchiera SYLICON - EU-CONT®

Guaina di maglia elasticizzata con inserto in silicone per il sostegno e la contenzione della rotula. L'anello integrato di silicone produce una compressione e un massaggio benefico delle parti molli dell'articolazione. È presente una stecca su ogni lato.

**Indicazioni:** condropatia femoro-rotulea, lievi versamenti articolari.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU0420**

**EU-CONT**

Tab. misure pag. 139

## LA CAVIGLIA È UNA STRUTTURA COMPLESSA, COSTITUITA DA OSSA, MUSCOLI, TENDINI E TESSUTO CONNETTIVO.

Essa è sottoposta a stress fisici rilevanti durante le attività quotidiane e ancor più durante le attività sportive, cosicché le lesioni traumatiche della caviglia sono molto comuni nei pazienti di ogni fascia di età e rappresentano il tipo più frequente di lesione muscolo-scheletrica osservabile in Pronto Soccorso. Grazie alla sua peculiare architettura, la caviglia (o articolazione tibiotarsica) è estremamente stabile nei confronti delle forze in eversione, che sospingono il piede verso l'esterno.

### Cavigliera EU-CONT®

Tessuto a maglia con elastomero intrecciato a trama alterna per impedire l'effetto laccio sopra ai malleoli. Offre grande elasticità in lunghezza e in altezza per un adattamento anatomico perfetto e senza pieghe.

**Indicazioni:** contusioni, stiramenti, distorsioni, edemi declivi, riabilitazione dopo rimozione di apparecchi gessati.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU0500**

**EU-CONT**

Tab. misure pag. 140

Vedi anche Cavigliera Bambù EU055 - Pag. 126

## LA CAVIGLIA

### PUSH Care

Migliora la sensazione di stabilità della caviglia, diminuisce il gonfiore e allevia il dolore. Compressione regolabile mediante la chiusura Powernet® e la cinghia extra-compressiva. Compatibile con ogni tipo di scarpa. Applicazione facilitata. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.

**Indicazioni:** lievi distorsioni e irritazioni capsulari, tendiniti, instabilità lieve della caviglia, artrosi senza instabilità.

Misure 1, 2, 3, 4, 5  
Codice PC12012C DX  
PC12011C SX

Tab. misure pag. 140



## LA CAVIGLIA

### PUSH Med

Base elasticizzata combinata con rinforzi anelastici laterali a U ("staffa"). Stabilizzazione con cinghie elastiche e anelastiche. Bloccaggio del tallone integrato. Chiusura a cerniera e regolazione con velcro. Zone di comfort sul tendine d'Achille e sul retro piede. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero, traspirante con inserti anti-scivolamento in silicone, per stimolare la propriocezione. Sottile, leggera e traspirante.

**Indicazioni:** lesioni acute dei legamenti (alternativa al taping), instabilità legamentosa moderata, trattamento delle fratture stabili della caviglia, trattamento secondario delle fratture della caviglia, infiammazioni capsulari e tendiniti, artrosi associata a instabilità, prevenzione secondaria delle lesioni dei legamenti della caviglia (recidive), caviglia del calciatore, sindrome da impingement.

Misure 1, 2, 3, 4, 5  
Codice PM22012C DX  
PM22011C SX

Tab. misure pag. 140



### PUSH Med Aequi Flex

Tutore funzionale per la caviglia costruito con materiali più leggeri ma con gli stessi criteri della ortesi Aequi PUSH Ortho. Espressamente progettata per il trattamento delle distorsioni della tibiotarsica. Applicabile immediatamente dopo il trauma, protegge i legamenti lesionati, stabilizza l'articolazione, assiste la riabilitazione precoce e consente una più rapida ripresa delle attività lavorative e sportive. Il guscio mediale, altamente protettivo nei confronti dell'apparato legamentoso, è molto flessibile e non ostacola la flessione dorsale e plantare del piede. Le fasce elastiche sono regolabili individualmente in base all'entità del gonfiore, che si modifica considerevolmente nelle diverse fasi della guarigione e del trattamento.

**Indicazioni:** distorsioni della caviglia di tutti i gradi (I-II-III grado), sia acute che croniche, trattamento funzionale delle lesioni dei legamenti della caviglia, trattamento secondario di frattura della tibiotarsica, riabilitazione dopo distorsione, prevenzione delle recidive di distorsione, instabilità della caviglia.

Misure 1, 2, 3  
Codice PM22022AC DX  
PM22021AC SX

Tab. misure pag. 140

Vedi anche Cavigliera a 8 Push Sports P42022C DX / P42021C SX - Pag. 130



### PUSH Aequi Ortho

Il tutore caviglia Push Aequi può essere definita uno stabilizzatore dinamico della caviglia. Contiene materiale rigido su un solo lato (quello mediale), per fornire il maggior grado possibile di stabilizzazione senza inibire la libertà di movimento. La rigidità decresce verso i bordi, dando sostegno solo nei punti dove esso è richiesto e possiede una depressione per alloggiare il malleolo mediale. L'inibizione dell'inversione/eversione è altamente efficace, ma la zona plantare è flessibile, per consentire la flessione dorsale e plantare del piede. La stabilizzazione è completata da una robusta cinghia anelastica, disposta da laterale a mediale. Le cinghie elastiche esercitano la compressione attorno alla caviglia e sono regolabili.

**Indicazioni:** instabilità grave della caviglia, trattamento funzionale delle lesioni acute dei legamenti della caviglia, **trattamento secondario di fratture della tibiotarsica**, prevenzione secondaria delle lesioni dei legamenti della caviglia.

Misure 1, 2, 3  
Codice PO3201ACD DX  
PO3201ACS SX

Tab. misure pag. 140

Vedi anche Cavigliera Kicx Push Sports P42012C DX / P42011C SX - Pag. 131



# CAVIGLIERA BIVALVA MARATHON



**STEP\_1**  
Aprire completamente i lacci del tutore.



**STEP\_2**  
Applicare sulla caviglia i due gusci assicurandosi che la fascia di congiunzione degli stessi sia posizionata sotto il tallone.



**STEP\_3**  
Fissare i lacci con il velcro (regolare la tensione dei lacci a seconda delle proprie esigenze).

## LA CAVIGLIA



Inserto in schiuma sintetica a memoria di forma.

### MARATHON MEMORY a staffa

Modello con le imbottiture a memoria di forma, si adatta perfettamente al profilo della caviglia. Garantisce un'intima aderenza all'anatomia individuale e un perfetto sostegno articolare. L'imbottitura ha un suo spessore doppio in corrispondenza dei malleoli, ciò ne aumenta il comfort.

**Indicazioni:** distorsione recente di 1°-2° grado con versamento moderato (fase acuta), instabilità articolare (cronica) e prevenzione delle distorsioni durante lo sport.

Misure **Unica ambidestra**  
Codice **EU029**

### MARATHON AIR a staffa e MARATHON AIR LITE a staffa

Offre il più elevato comfort e il massimo grado di sostegno articolare. Gli inserti vengono forniti pregonfiati, la valvola di cui sono dotati consente la regolazione individuale della compressione.

**Indicazioni:** distorsione recente di 2°-3° grado con versamento marcato (fase acuta). In tutti i casi di importante gonfiore della caviglia. Frattura malleolare composta/stabile e postumi di intervento. Dopo rimozione di un gesso. Nella riabilitazione (fasi iniziali caratterizzate da gonfiore pronunciato).



Inserto gonfiabile, regolabile.

### MARATHON AIR

Misure **Unica ambidestra**  
Codice **EU029G**



Inserto gonfiabile, regolabile.

### MARATHON AIR LITE

Misure **Unica ambidestra**  
Codice **EU029GL**

## LA CAVIGLIA

### ASO - Ankle Stabilizer Orthosis

Tessuto di supporto in speciale tessuto di nylon rinforzato. Lacci stabilizzatori per sostenere i legamenti e bloccare il tallone. Chiusura a lacci. Linguetta in materiale a cellule chiuse, traforato. Stecche amovibili in materiale plastico.

**Indicazioni:** trattamento delle lesioni acute dei legamenti della caviglia, prevenzione delle distorsioni e delle recidive dopo una precedente distorsione; instabilità cronica della caviglia, alternativa al taping tradizionale nello sport.

Misure **XS, S, M, L, XL, XXL** Tab. misure pag. 140  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **MS200 (colore nero)**  
**MS200B (colore bianco)**

Vedi anche Tutore Caviglia EU058 - Pag. 122



- 1** La chiusura in neoprene fornisce un ancoraggio sicuro ai lacci e alle stringhe.
- 2** La linguetta è fabbricata in Cool Flex™, traspirante e fresco da indossare. Lo stesso materiale è impiegato anche per rivestire la parte posteriore della scarpetta, per maggiore comfort della regione achillea.
- 3** Le stringhe in poliestere e cotone sono robuste e non si arricciano.
- 4** Le comode allacciature autoaderenti consentono di fissare con sicurezza i lacci stabilizzatori.
- 5** I lacci stabilizzatori in nylon rinforzato bloccano efficacemente il tallone, riproducendo l'effetto del taping.
- 6** La scarpetta in nylon rinforzato è molto resistente e non si deteriora a livello degli occhielli.

## LA CAVIGLIA

### PIN CAM WALKER Eumedica

Stivaletto deambulatorio con giunti articolari per mantenere bloccata, limitare selettivamente o concedere la flessione estensione del piede. Profilo ribassato della suola per mantenere la normale lunghezza dell'arto trattato rispetto al controlaterale. Suola monoscocca rivestita in gomma antisdrucchiolo con forma "rocker bottom". Imbottiture in morbido tessuto sintetico di schiuma. Bracci laterali e staffa in metallo. Giunti articolari a livello della tibiotarsica. Sistema di regolazione a perni mobili con carter trasparente di sicurezza (incrementi di 7,5°). Possibilità di scelta tra posizione fissa, 45° di flessione dorsale e 45° di flessione plantare. Sostituisce il gesso senza rinunciare al risultato clinico ottimale, alla contenzione, all'igiene, al confort e alla sicurezza nel passo.

**Indicazioni:** fratture e distorsioni del piede e della tibiotarsica, lesioni del tendine di Achille, trattamento secondario di fratture e osteotomie che consentono il carico, immobilizzazioni prolungate, ritardi di consolidazione e pseudoartrosi, riabilitazione postoperatoria.

Misure **S (35 - 37,5), M (38-42), L (43 - 46)**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU026**



### PUSH Ortho Aequi Junior

Il tutore offre il giusto equilibrio tra un efficace supporto meccanico e un ottimale comfort in tutti i casi di lesione della caviglia. L'ortesi è stata progettata per bambini dai 6 ai 12 anni d'età (numero scarpa tra 30 e 37). Il tutore **Aequi Junior** stabilizza l'articolazione tibiotarsica durante il movimento sia di inversione che di eversione e, indifferentemente, nelle posizioni di flessa e neutrale. Il funzionamento ottimale del tutore si ottiene indossandolo in una scarpa robusta con i lacci.

**Indicazioni:** lesioni acute dei legamenti della caviglia, causate da traumi sia in inversione che in eversione, stabilizzazione di fratture della caviglia trattate conservativamente o chirurgicamente, instabilità articolare residua (lassità cronica dei legamenti), prevenzione secondaria delle lesioni dei legamenti della caviglia.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **PO3202AJ**



## LA CAVIGLIA

### WALKER ZERO IMPACT

Il walker è provvisto di aste montanti sagomate che riducono la pressione sull'arto inferiore, assicurando contemporaneamente migliore stabilità e immobilizzazione.

Può contenere adeguatamente bendaggio e imbottiture di cui necessitano il piede e la caviglia.

La suola, dotata di un nuovo profilo ribassato e molto leggera, presenta una superficie antiscivolo.

La chiusura con cinturini a velcro di facile presa e gli anelli a D che aiutano nell'applicazione/rimozione, contribuiscono alla compliance del paziente. Imbottiture confortevoli e rimovibili. La soletta interna rimovibile e ventilata riduce notevolmente la presenza di umidità nella zona del piede.

La possibilità di rimozione ne consente il lavaggio.

**Indicazioni:** lesioni delle parte molli della parte distale della gamba, distorsioni della caviglia da moderate a gravi, lesioni delle sindesmosi tibio-peroneale distale, dolore e lesioni dell'avampiede, mesopiede e retro piede, fratture stabili del piede, della caviglia e della parte distale della gamba, fratture dei metatarsi, dopo interventi di riparazione dei tendini e dei legamenti, dopo altri interventi chirurgici (es. alluce valgo, artrodesi, ecc).

Misure **S (35 - 37,5), M (38 - 42), L (43 - 46)**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU060 - Modello alto**  
**EU060B - Modello basso**

### Rialzi per tallone (accessorio a parte)

Disponibile il set di rialzi per il tallone per il trattamento post-operatorio del tendine d'Achille. Fissando i rialzi tramite il supporto adesivo presente sugli stessi, è possibile ottenere diversi gradi di sollevamento del tallone:

**3 rialzi** = 22° di sollevamento del tallone

**2 rialzi** = 16° di sollevamento del tallone

**1 rialzo** = 10° di sollevamento del tallone

Codice **EU060RID - Dx**  
**EU060RIS - Sx**



Dettagli a pagina 95



Dettagli a pagina 98



Dettagli a pagina 96



Dettagli a pagina 96



### ANTIDECUBITO



### PRAFO® - Tutore caviglia e piede con funzione antidecubito

Misure **Unica ambidestra regolabile**  
Codice **PR650APU**  
(controllo piano sagittale, piede diabetico)  
**PR650D**  
(controllo piano sagittale e frontale, piede neurologico)



### RIABILITAZIONE

### AFO PUSH ORTHO® Sistema funzionale per piede cadente

Misure **1, 2, 3**  
Codice **PA32032AFO DX**  
**PA32031AFO SX**



### RIABILITAZIONE

### REHA STABIL

Misure **dal n°36 al n°48**  
Codice **ORTORS**

Tab. misure pag. 136



### RIABILITAZIONE

### STABIL II

Misure **dal n°36 al n°48**  
Codice **ORTOS2**

Tab. misure pag. 136



# PRENDITI CURA DEI TUOI PIEDI

**IL PIEDE  
È UN DISTRETTO  
ANATOMICO MOLTO  
IMPORTANTE,  
SOGGETTO COM'È A  
CONTINUO CARICO  
E A FREQUENTI  
PATOLOGIE DA  
SOVRACCARICO  
FUNZIONALE.**

Le deformità del piede, di varia entità, sono tra le cause più frequenti di consulto medico.

Per alleviare i disturbi del piede è stata messa a punto la gamma che presentiamo nelle pagine seguenti, caratterizzata dal sostegno delle parti sofferenti del piede con silicone medicale o un morbido gel protettivo.

Fa inoltre parte della struttura del gel un purissimo olio minerale a effetto emolliente sulla cute.



Integramente  
progettato e  
sviluppato in  
**ITALIA**

PATENT PENDING PCT/IB2016/050424



Senza Valgofix



Con Valgofix



## VALGOFIX®

### Tutore dinamico funzionale per l'alluce valgo

Tutore per il trattamento e la correzione dell'alluce valgo e dei disturbi correlati, munito di un innovativo sistema dinamico che guida e sostiene il movimento articolare del dito durante il passo, proteggendo la sporgenza ossea da sfregamenti ed eliminando la borsite reattiva. Studiato per un utilizzo sia diurno che notturno, Valgofix® esercita la sua azione protettiva e correttiva in modo invisibile all'interno di scarpe comode, consentendo di svolgere le normali attività e mantenendo l'alluce nel suo corretto allineamento. Lavabile a 30°C. Asciugare lontano da fonti di calore.

#### 3 FUNZIONI IN 1:

1. PREVENZIONE DI DEFORMITÀ MODERATE  
Aiuta a correggere la deviazione ed evita l'aggravamento della deformità dell'alluce valgo.
2. TRATTAMENTO CORRETTIVO POST-OPERATORIO  
Mantiene la correzione ottenuta con l'intervento chirurgico e protegge la zona operata.
3. RIABILITAZIONE POST-OPERATORIA  
Sostiene il dito operato durante la rieducazione e abbrevia il tempo di guarigione.


**Indicazioni:** alluce valgo, esostosi del primo metatarso, borsite metatarso-falangea, dolore articolare, sindrome pronatoria dell'avampiede associata all'alluce valgo.

- 1 Sezione dinamica con funzione di stabilizzazione e di guida del movimento articolare dell'alluce.
- 2 Stecca in poliuretano speciale Elastollan® stampato a iniezione.
- 3 Fascia metatarsale anatomica senza cuciture e regolabile con Velcro®.
- 4 Fascia digitale anatomica senza cuciture e regolabile con Velcro®.
- 5 Cuscinetto protettivo in gel rivestito.

Misure **Unica**  
Codice **EU24**



- ✓ **Prevenzione**
- ✓ **Attenuazione**
- ✓ **Risoluzione**

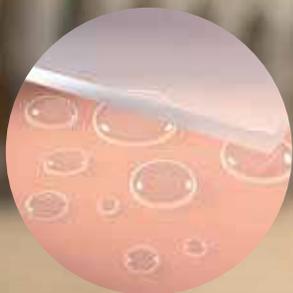

## L'OLEO-GEL E I SUOI BENEFICI

Grazie alle sue proprietà chimico-fisiche, il nostro gel è la sostanza ideale per ricoprire e proteggere la cute di ogni parte del corpo. È in grado di adattarsi perfettamente alle forme e alle sporgenze.

È un ottimo ammortizzatore delle pressioni e dissipatore degli attriti.

Il microclima che si crea tra l'Oleo-gel e la cute aiuta la stessa a mantenersi più morbida ed elastica.



### EUSAVE® SPLINT ELASTICO PER ALLUCE VALGO

Tutore elastico per alluce valgo

Tutore espressamente studiato per il trattamento postoperatorio dell'alluce valgo. Composto da gambaleto elastocompressivo, presa avvolgente sull'alluce, bandelletta elastica con fissaggio a velcro. Contrasta l'edema e mantiene la correzione chirurgica.

**Indicazioni:** trattamento elettivo dopo correzione chirurgica dell'alluce valgo, previene l'insorgere dell'edema post-operatorio dopo chirurgia dell'avampiede, sindrome algodistrofica dopo intervento chirurgico sull'avampiede, trattamento adiuvante nei pazienti con deformità dell'alluce in attesa di intervento chirurgico. Trattamento conservativo dell'alluce valgo nei pazienti in cui vi è controindicazione assoluta all'intervento chirurgico.

Misure **S, M, L**  
Versioni **Destra e sinistra**  
Codice **EU037**

Tab. misure pag. 140

### ZERO SPLINT

Splint elastico per alluce valgo

Fascia elastica studiata per il trattamento dell'alluce valgo. Favorisce la corretta posizione dell'alluce, alleviando il dolore. Grande adattabilità ed elevato comfort della fascia grazie al tessuto elastico. Tutore invisibile in quanto poco invasivo grazie ad una fascia elastica morbida e sottile. Può essere utilizzato sia di giorno sia di notte.

**Indicazioni:** alluce valgo, trattamento conservativo dell'alluce valgo.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU061**



### EU-GEL UNIVERSAL BUNION

Protezione per alluce valgo

Protezione dell'esostosi del primo metatarso e della sovrastante borsite (alluce valgo). Cuscinetto morbido di gel sottile (3 mm) inserito su una leggerissima guaina di tessuto elasticizzato. Il gel va a contatto della pelle, alla quale diffonde il suo olio medicale per proteggerla e ammorbidirla. Assorbe tutte le forze di pressione e di sfregamento, dando sollievo dal dolore e dall'infiammazione. Entra comodamente in tutti i tipi di scarpa e resta sempre perfettamente posizionato. Ipoallergenico, dermatologicamente testato. Lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** alluce valgo, protezione dell'esostosi del primo metatarso, borsite.

Misure **S, L - Modello ambidestro**  
Codice **S025SF**  
**S025LF**

### EU-GEL COMFORT BUNION

Protezione per l'alluce valgo con cuscinetto cavo

Il cuscinetto di gel polimerico inserito nella manichetta di tessuto elasticizzato assorbe gli urti e riduce la pressione in ogni modello di scarpa, alleviando così il dolore e i fastidi causati dall'alluce valgo. La guaina soffice e liscia come seta, ideata da stimati specialisti del piede, tiene confortevolmente in posizione il cuscinetto di gel aperto al centro, progettato anatomicamente sulla deformità dolorosa e non scivola durante il cammino. Si indossa sotto la calza. È lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** alluce valgo, protezione dell'esostosi del primo metatarso, riduce le pressioni e gli sfregamenti sopra e intorno all'area della deformità alleviando il dolore.

Misure **S, L - Modello ambidestro**  
Codice **S044SF**  
**S044LF**



interno in  
**OLEO  
GEL**



### ACHILLE's Heel Pad

Supporto per il trattamento della tendinite dell'achilleo, sia su base degenerativa che microtraumatica. Sostiene ed esercita un continuo massaggio della zona mediante l'inserto di gel polimerico.

**Indicazioni:** tendiniti ed estesopatie del tendine di Achille.

Misure **S1010F piccolo/ medio**  
Codice **S1010LF grande/ extra grande**  
Versione **Ambidestra**

interno in  
**OLEO  
GEL**



### Malleo GEL

Protezione anti-edema dei malleoli. Due cuscinetti protettivi per le regioni perimalleolari mediale e laterale sul supporto di una guaina leggera e sottilissima. Massimo confort e protezione effetto antiedemigeno. Sollievo garantito delle caviglie gonfie e affaticate.

**Indicazioni:** trattamento post-operatorio - edemi perimalleolari di diversa natura post-traumatica, circolatoria, protezione dei malleoli.

Misure **Unica**  
Codice **S1015**



### GEL TOE SPREADER W/TOE LOOP Divaricatore con anello di fissaggio al primo o secondo dito

L'anello in gel morbido e flessibile mantiene il dito nel corretto allineamento. Riduce l'attrito e l'irritazione della pelle, dà sollievo all'articolazione deformata. Lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** alluce valgo, sovrapposizione dita adiacenti.

Codice **S027 MF Medio**  
**S027 LF Grande**  
Versione **Ambidestra**

**OLEO  
GEL**



### CUSTOM COMFORT TOE ALIGNER Divaricatore per alluce in gel polimerico

Questo divaricatore è l'unico sul mercato capace di graduare la contropressione sull'alluce. Il paziente può regolare la durezza del dispositivo in 3 modi:

1. Leggera senza inserto
2. Media inserto arancione
3. Rigida inserto verde

Inserendo uno dei due spessori all'interno, si garantisce la spinta di allineamento perfetta per una correzione ottimale dell'alluce valgo, oppure avere una delicata separazione senza inserti. Un prodotto confortevole, che contrasta anche la possibile deformazione del secondo dito.

**Indicazioni:** alluce valgo, sovrapposizione dita adiacenti.

Codice **S049 SF Piccolo**  
**S049 LF Grande**  
Versione **Ambidestra**

**OLEO  
GEL**





### GEL BUNION TOE SPREADER

Protezione per alluce valgo con divaricatore

Allevia il dolore e fornisce il corretto allineamento all'alluce. Riduce la pressione sull'articolazione metatarsofalangea. Il design brevettato garantisce la protezione tra l'alluce e la scarpa. Il dispositivo scorre facilmente sull'alluce ed è molto pratico da indossare. Lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** alluce valgo, protezione universale per la prominenza ossea.

Misura **Unica**  
Codice **S028F**  
Versione **Ambidestra**

OLEO  
GEL



### GEL BUNION TOE SPREADER RINFORZATO

Protezione per alluce valgo con divaricatore

Allevia il dolore e fornisce il corretto allineamento dell'alluce valgo di grado più accentuato. È un supporto morbido in silicone, ma allo stesso tempo molto resistente. Riduce la pressione sull'articolazione metatarsofalangea. Il design brevettato fornisce la protezione tra l'alluce e la scarpa. Il dispositivo scorre facilmente sull'alluce ed è molto pratico da indossare. Lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** alluce valgo più accentuato, protezione universale per la prominenza ossea.

Misura **Unica**  
Codice **S048F**  
Versione **Ambidestra**

SILICONE



### DOUBLE LOOP BUNION SPREADER

Divaricatore a doppio anello per alluce valgo e 2° dito a martello

Allevia il dolore e corregge l'allineamento delle prime due dita. Riduce la pressione sull'articolazione metatarsofalangea dell'alluce. Il doppio anello assicura che il divaricatore resti in sede, fornendo protezione tra l'alluce e la scarpa.

Il morbido gel si adatta alle dita, minimizzando le aree di pressione. Adatto nella maggior parte delle calzature.

**Indicazioni:** alluce valgo, protezione universale per la prominenza ossea, 2° dito a martello, 2° dito sovrapposto.

Misura **Unica**  
Codice **S039F**  
Versione **Ambidestra**

OLEO  
GEL



### CUSTOM BUNION TOE SPREADER

Protezione per alluce valgo con divaricatore

Protezione in gel polimerico.

Allevia il dolore sull'articolazione metatarsofalangea e fornisce il corretto allineamento all'alluce. Il paziente può regolare la durezza del dispositivo in 3 modi:

1. Leggera senza inserto
2. Media inserto arancione
3. Rigida inserto verde

Inserendo uno dei due spessori all'interno, si garantisce la spinta di allineamento per una correzione ottimale dell'alluce valgo, oppure avere una delicata separazione senza inserti. Adatto a quasi tutte le calzature.

**Indicazioni:** alluce valgo, protezione universale per la prominenza ossea, 2° dito a martello, 2° dito sovrapposto.

Misura **Unica**  
Codice **S050F**  
Versione **Ambidestra**

OLEO  
GEL





### DOUBLE LOOPED BIG TOE CORRECTOR

Separatore a doppio anello  
per alluce e 2° dito

**Allinea le dita deviate e sovrapposte.** I due anelli in gel mantengono il dispositivo in perfetta posizione, correggendo contemporaneamente la deformità. Separa l'alluce e il 2° dito senza creare alcuna pressione. Il morbido gel si adatta alle dita, esercitando le sue proprietà protettive. Adatto nella maggior parte delle calzature.

**Indicazioni:** alluce valgo, 2° dito a martello, 2° dito sovrapposto.

Misura **Unica**  
Codice **S041F**  
Versione **Ambidestra**



OLEO  
GEL



### GEL TOE SPREADER

Distanziatore per dita

**Distanziatore in gel polimerico a legami incrociati** (tridimensionali), espressamente studiato per le dita dei piedi. Grazie all'olio minerale contenuto, protegge dalle irritazioni e desquamazioni interdigitali e dà sollievo alle callosità che si formano tra le dita.

**Indicazioni:** deviazioni delle dita dei piedi, sfregamenti, callosità.

Codice **S017SF Piccolo**  
**S017LF Grande**  
Versione **Ambidestra**



OLEO  
GEL



### GEL TOE SPREADER W/RIBBED FABRIC

Divaricatore con base di tessuto elastico

**Riduce l'irritazione tra le dita.** La maglia tubolare morbida ed elastica si applica facilmente sulle dita permettendo una corretta applicazione del tutore. Il divaricatore in morbido gel polimerico idrata e ammorbidisce la pelle. Non si schiaccia e non perde la sua forma nemmeno con uso prolungato. Lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** alluce valgo, sovrapposizione dita adiacenti.

Codice **S030MF Medio**  
**S030LF Grande**  
Versione **Ambidestra**



OLEO  
GEL



### GEL TOE SEPARATOR

Divaricatore per dita

**Divaricatore per le dita dei piedi** in morbido gel polimerico contenente olio minerale che viene rilasciato gradualmente. Non si schiaccia e non perde la sua forma, nemmeno con l'uso prolungato. Indispensabile per mantenere il corretto allineamento delle dita dei piedi, anche dopo interventi chirurgici. Il prodotto è riutilizzabile.

**Indicazioni:** alluce valgo, casi di sovrapposizione delle dita adiacenti.

Codice **S016SF Piccolo**  
**S016MF Medio**  
**S016LF Grande**  
Versione **Ambidestra**



OLEO  
GEL



### DIGITUBE Tubolare con gel ritagliabile

È un supporto tubolare in tessuto di maglia elasticizzata, rivestita internamente di gel polimerico. Si adatta con uniformità alle sporgenze del dito e ammorbidisce la pelle irritata con l'effetto lenitivo dell'olio minerale.

**Indicazioni:** callosità, ipercheratosi, lesioni da sfregamento o da eccessiva pressione delle scarpe.

Misura **S, L**  
Codice **S109 ASF Piccolo**  
**S109 LF Grande**



### DIGITAL PADS Cuscinetto digitale

Il cuscinetto in morbido gel polimerico contenente olio minerale, grazie alla sua natura elastica, si adatta alle esigenze del caso durante l'uso per ritornare poi alla sua forma originaria. È incompressibile e non si lacera. L'olio minerale naturale presente nel cuscinetto serve ad ammorbidire la lesione cheratosica.

**Indicazioni:** calli, duroni, occhi di pernice, dita a martello, ecc.

Codice **S001XSF Piccolo**  
**S001SMF Medio**  
**S001LXLF Grande/Extra Grande**



### DIGI - STRIP Guaina tubolare ritagliabile

Protezione tubolare per le dita delle mani e dei piedi, parzialmente rivestita in morbido gel polimerico contenente olio minerale. Maglia elasticizzata all'esterno, gel polimerico all'interno. Può essere tagliata nella lunghezza desiderata.

**Indicazioni:** adatta a lenire i fastidi derivati da dita a martello, callosità, vesciche, ecc.

Codice **S109SF Piccolo**  
**S109MF Medio**  
**S109LF Grande**



### DIGITAL CAP Guaina digitale

Questa guaina digitale è adatta alla protezione delle dita del piede. L'Oleo-gel polimerico, che la riveste internamente, assorbe totalmente gli sfregamenti e si adatta alle deformità anatomiche. Per modificare il diametro del DIGITAL CAP è sufficiente trazionare la guaina orizzontalmente o verticalmente. Può essere tagliata nella lunghezza desiderata.

**Indicazioni:** lesioni da sovraccarico e da sfregamento, callosità, ragadi.

Codice **S004SF Piccolo**  
**S004LF Grande**





interno in  
**OLEO  
GEL**

### UNIVERSAL GEL STRAP Cuscinetto per metatarsalgie

Cuscinetto per l'avampiede in morbido gel polimerico contenente olio minerale. Sostiene delicatamente le teste dei metatarsi, eliminando il dolore alla base delle dita. Agisce come un ammortizzatore durante il cammino. Ammorbidisce le lesioni ipercheratosiche (calli, duroni, fittoni). La maglia di supporto è elasticizzata nei due sensi.

**Indicazioni:** metatarsalgie meccaniche.

Versioni **Destra e sinistra**  
Codice **S003SMF Piccolo, Medio**  
**S003LXL Grande, Extra grande**



**OLEO  
GEL**

### 4 IN 1 UNIVERSAL PROTECTOR WITH SEPARATOR Protezione metatarsale con divaricatore

La protezione metatarsale in gel polimerico con divaricatore, grazie al morbido gel, funge da ammortizzatore per la parte anteriore del piede e contemporaneamente ha un'azione di divaricazione. Dona sollievo alla zona metatarsale assorbendo traumi e pressioni, contribuisce all'allineamento dell'alluce, riducendo l'infiammazione e l'accavallamento delle dita.

**Indicazioni:** alluce valgo, protezione universale per la prominenza ossea. Callo, borsite del 5° dito del piede. Metatarsalgia.

Codice **S052SF Misura S piede sinistro**  
**S052LSF Misura L piede sinistro**

**S052DF Misura S piede destro**  
**S052LDF Misura L piede destro**



### DUO METATARSAL Supporto metatarsale

Cuscinetto metatarsale in oleogel polimerico, ricoperto di tessuto morbido e sottile. Assorbe la pressione e l'attrito e riduce il dolore. Rallenta la formazione della callosità (durone) alla pianta del piede sotto le dita. Si applica sotto le calze, inserendo il 2° dito del piede nell'apposito occhiello. Facile da indossare.

**Indicazioni:** metatarsalgie da sovraccarico.

Codice **S018SF Piccolo**  
**S018LF Grande**



Interno in  
**OLEO  
GEL**





## Morbido sollievo a ogni passo

Regola la durezza del dispositivo in 3 modi:

LEGGERA senza inserto

MEDIA inserto arancione

RIGIDA inserto verde

### CUSTOM BUNION TOE SPREADER Protezione per alluce valgo con divaricatore



Dettagli a pagina 65

### CUSTOM COMFORT TOE ALIGNER Divaricatore per alluce in gel polimerico



Dettagli a pagina 63

### CUSTOM DOUBLE LOOPED BIG TOE CORRECTOR Separatore a doppio anello per alluce e 2° dito



Dettagli a pagina 73

### CUSTOM DOUBLE LOOPED SMALL TOE CORRECTOR Separatore a doppio anello per 3°, 4° e 5° dito



Dettagli a pagina 73



### CUSTOM DOUBLE LOOPED BIG TOE CORRECTOR

**Separatore a doppio anello per alluce e 2° dito**  
Allinea le dita deviate e sovrapposte. I due anelli in gel mantengono il dispositivo in perfetta posizione, correggendo contemporaneamente la deformità. Separa l'alluce e il 2° dito senza creare alcuna pressione:

1. Leggera senza inserto
2. Media inserto arancione
3. Rigida inserto verde

Inserendo uno dei due spessori all'interno, si garantisce la spinta di allineamento per una corretta separazione tra alluce e 2° dito, oppure avere una delicata separazione senza inserti. Adatto a quasi tutte le calzature.



**Indicazioni:** alluce valgo, 2° dito a martello, 2° dito sovrapposto.

Misura **Unica**  
Codice **S053F - Ambidestra**



### CUSTOM DOUBLE LOOPED SMALL TOE CORRECTOR

**Separatore a doppio anello per 3°, 4° e 5° dito**

Allinea le dita deviate e sovrapposte. I due anelli in gel mantengono il dispositivo in perfetta posizione, correggendo contemporaneamente la deformità. Separa il 3°, 4° e 5° dito senza creare alcuna pressione.

Il paziente può regolare la durezza del dispositivo in 3 modi:

1. Leggera senza inserto
2. Media inserto arancione
3. Rigida inserto verde

Inserendo uno dei due spessori all'interno, si garantisce la spinta di allineamento per una corretta separazione tra 3°, 4° e 5° dito, oppure avere una delicata separazione senza inserti. Adatto a quasi tutte le calzature.



**Indicazioni:** callosità sotto al 5° dito, varismo del 5° dito. Separa il 3°, 4° e 5° dito.

Misura **Unica**  
Codice **S054F - Ambidestra**




### EUCAP Cappuccio di Oleo-gel per le dita del piede

Il gel ammorbidisce la pelle, lenisce il fastidio e protegge il dito. Imbottitura, protezione e sollievo per calli, occhi di pernice, unghie incarnite, cuticole. Ricopre completamente il dito. Ritagliabile, lavabile e riutilizzabile. Foro di ventilazione apicale, per agevolare la naturale traspirazione della pelle del dito. Utilizzabile anche sulle dita della mano.

**Indicazioni:** protezione e sollievo per calli, unghia incarnita, occhi di pernice, cuticole.

Misure **Unica**  
Codice **S029F**

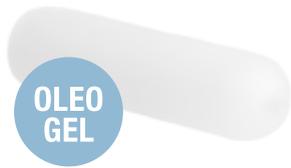

OLEO  
GEL




### EUCREST - Cresta di Oleo-gel universale per le dita a martello

Allevia i fastidi delle dita a martello e ad artiglio. È un supporto morbido conformato anatomicamente per adattarsi alla radice delle dita del piede. L'anello flessibile ed elastico si adatta al dito con facilità e resta sempre in posizione. Aiuta a riallineare le dita. Lavabile, riutilizzabile. È utilizzabile indifferentemente sia sul piede destro che sul piede sinistro.

**Indicazioni:** dito a martello, dito ad artiglio.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **S031F**

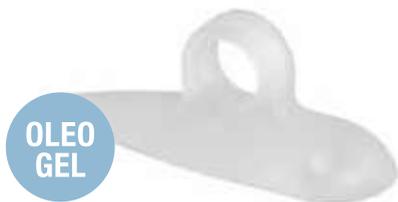

OLEO  
GEL



### EUCREST RINFORZATO Cresta universale per le dita del piede

Allevia i fastidi delle dita a martello e ad artiglio più accentuate. È un supporto morbido in silicone ma allo stesso tempo molto resistente, conformato anatomicamente per adattarsi alla radice delle dita del piede. L'anello flessibile ed elastico è confortevole e resta sempre in posizione. Aiuta a riallineare le dita. Facile da applicare e rimuovere. Non si sposta. Lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** dito a martello, dito ad artiglio.

Misure **Unica**  
Versioni **Destra e Sinistra**  
Codice **S047**



SILICONE



### EUCREST 3 - Cresta universale per le dita a martello a tre anelli

Corregge simultaneamente la deformità a martello delle tre dita centrali e ne allevia i fastidi. Supporto morbido, anatomicamente conformato. Il triplo anello flessibile ed elastico si adatta alle dita con facilità e resta sempre in posizione. Materiale trasparente, igienico, lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** dita a martello multiple (2°-3°-4° dito), in associazione all'alluce valgo, nel piede cavo e nel piede reumatico.

Versioni **Destra e Sinistra**  
Codice **S046SMF - Piccolo, Medio**  
**S046LXLF - Grande, Extragrande**



OLEO  
GEL





**EUVAL**  
Protezione anatomica  
in Oleo-gel per l'alluce valgo

Gel morbido e flessibile per imbottire e proteggere l'esostosi dell'alluce valgo. Il gel ammorbidisce la pelle, lenisce il fastidio e protegge il dito. Design anatomico ultra-sottile per essere indossato nella maggior parte delle calzature.

**Indicazioni:** protezione della sporgenza dell'alluce valgo da ogni forma di pressione o sfregamento.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **S032F**



OLEO  
GEL



**EUPINKIEFINGER®**  
Protezione anatomica  
in Oleo-gel per il 5° dito

Gel morbido e flessibile per la protezione della sporgenza del 5° dito del piede da pressioni o sfregamento. Il gel ammorbidisce la pelle, lenisce il fastidio e protegge il dito. Il confortevole anello avvolge la base del 5° dito e mantiene il prodotto in posizione. Design anatomico ultra-sottile per essere indossato nella maggior parte delle calzature.

**Indicazioni:** callo e borsite del 5° dito del piede.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **S033F**



OLEO  
GEL



**EUPINKIEFINGER® DOUBLE LOOP**  
Divaricatore per il 5° dito  
con doppio anello

Allevia il dolore localizzato alla sporgenza sotto al mignolo e garantisce il corretto allineamento del dito. Il suo design brevettato riduce la pressione sull'articolazione metatarso-falangea e protegge il 5° dito dalla scarpa. Il prodotto si infila facilmente sul 4° e 5° dito. È lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** protezione della sporgenza ossea del 5° dito da pressione o sfregamento, riduzione del dolore sull'articolazione metatarso-falangea, aiuta a riallineare le dita esterne.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **S045F**



OLEO  
GEL



**DOUBLE LOOPED  
SMALL TOE CORRECTOR**  
Separatore a doppio anello  
per 3°, 4° e 5° dito

Allinea le dita deviate e sovrapposte. I due anelli in gel mantengono il dispositivo in perfetta posizione, correggendo contemporaneamente la deformità. Separa il 3°, 4° e 5° dito senza creare alcuna pressione. Il morbido gel si adatta alle dita, esercitando le sue proprietà protettive. Adatto nella maggior parte delle calzature.

**Indicazioni:** callosità sotto al 5° dito, varismo del 5° dito. Separa il 3°, 4°, 5° dito.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **S040F**



OLEO  
GEL



### EUDUPLEX® - Imbottitura in Oleo-gel sottile per le teste dei metatarsi

Costruito con gel dello spessore di soli 2 mm, ricoperto da un leggerissimo tessuto elasticizzato. Allevia la sensazione di bruciore, tipica delle condizioni di sovraccarico delle teste metatarsali. Ridistribuisce le forze che si generano durante il cammino o la corsa, ammortizzando l'impatto al suolo dell'avampiede. Si indossa comodamente nella maggior parte delle calzature e si può calzare sia sul piede destro che sul piede sinistro, semplicemente rovesciandolo su sé stesso.

**Indicazioni:** metatarsalgia, neuroma di Morton, callosità dell'avampiede.

Misure **S/M, L/XL**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **S034SMF Piccolo / Medio**  
**S034LXL Grande / Extra grande**



interno in  
**OLEO GEL**



### MULTI PROTECTION Cuscinetto protettivo in gel autoaderente

Dispositivo in Oleo-gel autoaderente, rivestito sul lato esterno da uno strato di tessuto elasticizzato sottile e morbido. Protegge da pressione localizzata e attrito le zone di cute più esposte. Previene gli arrossamenti e le vesciche. Ritagliabile nella forma e nella misura desiderata. Elastico in tutte le direzioni, si adatta perfettamente ad ogni area di applicazione. Anallergico. Lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** protezione delle aree di pelle esposte a pressione e attrito, prevenzione degli arrossamenti cutanei e delle vesciche.

Misure **Unica - 8 x 7 cm**  
Codice **S038F**



**OLEO GEL**

Allungabile nelle 4 direzioni



interno in  
**OLEO GEL**

### SUPPORTO PER ARCO PLANTARE

Nuovo dispositivo per la cura della fascite plantare e delle plantalgie in generale. Riduce il dolore e migliora la mobilità. Supporto confortevole facile da indossare. Gel massaggiante: comfort e sostegno.

**Indicazioni:** fascite plantare, sperone calcaneare, tendinite, sindrome del tunnel tarsale, sindrome del cuboide.

Misure **Unica**  
Versioni **Destra e sinistra**  
Codice **S035F**



interno in  
**OLEO GEL**

### PRESSURE SENSITIVE SHEET Cuscinetto in Oleo-gel con supporto telato



Misure **10 x 10 cm**  
Codice **S006F**

Dettagli a pagine 95



### EUSTATIC Gambaletto per piedi delicati o diabetici



Misure **L, XL**  
Codice **EU038**

Tab. misure pag. 140



La nuova fibra  
**SILVER**

Dettagli a pagina 103





## I SILICONI SONO POLIMERI INORGANICI BASATI SU UNA CATENA SILICIO-OSSIGENO E GRUPPI FUNZIONALI ORGANICI LEGATI AGLI ATOMI DI SILICIO.

Nei nostri prodotti viene usato un silicone estremamente raffinato molto morbido o, quando serve, a densità differenziata. Il nostro silicone è ipoallergenico, dotato di alta tollerabilità, assorbe ottimamente i colpi, ritorna subito alla forma originale dopo essere stato sottoposto a pressioni, ha una lunga durata ed è gradevole sulla pelle e facilmente lavabile.



### PLANTARE GEL-AIR

Plantare antitraumatico. Adatto a ogni tipo di scarpa, elegante o sportiva. Ammortizza il carico dell'arto inferiore durante il cammino. Massimo comfort. Particolarmente indicato nell'uso di scarpe a tacco alto.

**Indicazioni:** metatarsalgie, plantalgie, dolori da sovraccarico e su base circolatoria.

Misure **Unica**  
Codice **S081**



### GEL-AIR MINI PLANTARE Supporto per le teste metatarsali

Sostegno delle teste metatarsali in morbido silicone. Allevia i dolori localizzati alla base delle dita dei piedi sotto le teste metatarsali sostenendole e proteggendole dalle pressioni. Esercita un massaggio dell'area dolorante a ogni ciclo del passo. Speciale disegno di superficie, costituito da un'alternanza di salienze e depressioni romboidali.

**Indicazioni:** metatarsalgie meccaniche, secondarie, miste, neuroma di Morton, ipercheratosi plantare. Ideale per tacchi alti.

Misure **Unica**  
Codice **EU087F**



### GEL-AIR Protezione retro tallone

Dispositivo in gel autoaderente. Applicato internamente alla parte posteriore della scarpa, protegge il tallone da pressione localizzata e attrito. Previene il dolore e le vesciche della parte posteriore del tallone, provocati dallo sfregamento del bordo della scarpa. Utilizzabile anche senza le calze, a diretto contatto della pelle. Anallergico. Lavabile e riutilizzabile, mantiene a lungo l'adesività.

**Indicazioni:** protezione del tallone da pressione e attrito contro la scarpa, prevenzione del dolore e delle vesciche sulla parte posteriore del tallone.

Misure **Unica**  
Codice **S037F**

OLEO  
GEL



### ALL GEL TOE protezione per le dita dei piedi

La protezione in gel per le dita del piede evita i fastidi derivanti dalla frizione e dalla pressione che si creano all'interno della calzatura. Si adatta alla maggior parte delle calzature, lavabile e riutilizzabile, fori traspiranti.

**Indicazioni:** protezione delle dita del piede, prevenzione degli arrossamenti cutanei e delle vesciche, prevenzione della lesione da sfregamento o da eccessiva pressione delle scarpe.

Misure **S, L**  
Codice **S051SF Piccola**  
**S051LF Grande**

### DUO EU-INSOLE Supporto metatarsale con divaricatore

Ha una doppia funzione: infatti al plantare anteriore si aggiunge un divaricatore delle dita. Il morbido silicone del plantare allevia il dolore e il bruciore alla base delle dita. È resistente allo sfaldamento.

**Indicazioni:** alluce valgo associato a metatarsalgia, disallineamento funzionale delle teste dei metatarsi.

Misure **Unica**  
Codice **S023 DRF Dx**  
**S023 SRF Sx**



SILICONE

### EU-INSOLE Supporto metatarsale con anello

Cuscinetto in morbido silicone per il sostegno e la protezione delle teste dei metatarsi. Design anatomico. Con anello che serve per mantenere il dispositivo sempre nella corretta posizione, agganciandolo al primo o secondo dito. Allevia il dolore da sovraccarico.

**Indicazioni:** disallineamento funzionale della testa dei metatarsi, atrofia del cuscinetto adiposo dell'avampiede, metatarsalgia, neuroma di Morton.

Misure **Unica**  
Codice **S021 DRF - Dx**  
**S021 SRF - Sx**



### Plantare EU-SHOCK ABSORBER 4/4

Plantare in morbido silicone con forellini per una maggiore traspirabilità, con proprietà biomeccaniche sovrapponibili a quelle dei tessuti molli del piede. Massimo sostegno e massima capacità ammortizzante. Inserti in gel siliconico colorato di minore densità per alleviare i sovraccarichi.

**Indicazioni:** algie plantari meccaniche.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU086**

Tab. misure pag. 141

SILICONE



### Plantare EU-SHOCK ABSORBER MICROBIAL PROTECTION 4/4

Plantare 4/4 in morbido silicone con copertura antimicrobica che diminuisce la proliferazione batterica prevenendo la formazione di cattivi odori. Inserti colorati a densità minore per alleviare i sovraccarichi nelle zone più sensibili.

**Indicazioni:** tallonite, metatarsalgia, plantalgie del piede piatto e del piede cavo.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU086MP**

Tab. misure pag. 141

SILICONE





### Talloniera EU-SHOCK RED

Talloniera calcaneale in morbido silicone con parete stabilizzante e scarico centrale in gel siliconico colorato di minore densità per alleviare i sovraccarichi. Particolarmente indicata per talalgie.

**Indicazioni:** fascite plantare, talalgie.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU083**

Tab. misure pag. 141



SILICONE



### Talloniera EU-SHOCK BLUE

Talloniera calcaneale in morbido silicone con parete stabilizzante con scarico obliquo in gel siliconico colorato di minore densità per "spina calcaneale".

**Indicazioni:** talalgia da "spina calcaneale".

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU082**

Tab. misure pag. 141



SILICONE



SILICONE

### Talloniera TALUS

Talloniera in morbido silicone, a profilo ribassato. Comfort ottimizzato, efficacia assicurata: sia come cura che come prevenzione. Per trattare con successo un'ampia gamma di disturbi dei piedi e della schiena.

**Indicazioni:** fascite plantare, tallonite, spina calcaneale, infiammazione del tendine d'Achille, borsite del calcagno, ragadi e fissurazione del tallone, lombalgia, rachialgie (meccaniche, posturali e degenerative lombari).

Misure **Unica**  
Codice **S080**



SILICONE

### Talloniera EU-SHOCK standard

Talloniera in morbido silicone, a profilo ribassato. Comfort ottimizzato, efficacia assicurata: sia come cura che come prevenzione. Per trattare con successo un'ampia gamma di disturbi dei piedi e della schiena.

**Indicazioni:** fascite plantare, tallonite, spina calcaneale, infiammazione del tendine d'Achille, borsite del calcagno, ragadi e fissurazione del tallone, lombalgia, rachialgie meccaniche, posturali e degenerative lombari.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU084**

Tab. misure pag. 141



SILICONE

### Talloniera EU-SHOCK con inserto rimovibile

Talloniera specifica per la cura dello sperone calcaneale. Rimuovendo l'inserto centrale si crea un'area di scarico selettivo che elimina completamente la pressione localizzata sotto lo sperone. Lasciando l'inserto in sede, la talloniera diventa un supporto che ammortizza le pressioni su tutta l'area del tallone.

**Indicazioni:** sperone calcaneale, fascite plantare, tallonite.

Misure **S, M, L**  
Codice **EU085**

Tab. misure pag. 141



# LE PROPRIETÀ DEL COCCO




SCOPRI IL RIVESTIMENTO  
DI ULTIMA GENERAZIONE IN FIBRA DI COCCO

Questo speciale tessuto è dotato di proprietà traspiranti, antibatteriche, assorbenti ed è anche ecologico.



Il rivestimento in fibra di Cocco è uno speciale tessuto di ultimissima generazione: esso è dotato di proprietà traspiranti, antibatteriche, assorbenti ed è ecologico.

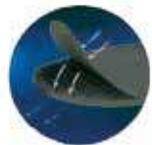

Plantari di ultimissima generazione con soletta AMMORTIZZANTE e TRASPIRANTE



Invaso profondo per il calcagno e il supporto dell'arcata plantare con 2 diversi gradi di consistenza permettono PROPRIETÀ DI SOSTEGNO E CONTENZIONE DIFFERENZIATE



## PLANTARE COCCO-TECH RED

Il più morbido dei plantari con conchiglia di sostegno. Leggero, contenzione moderata, inserto calcaneale in gel dalle proprietà ammortizzanti. Adatto alla maggior parte delle calzature. Elevato grado di accettazione da parte dei pazienti (diabetici, impiego generale). Termoformabile e ritagliabile.

**Indicazioni:** talalgia da spina calcaneare, leggera pronazione del retro piede, adatto per il piede diabetico, micosi (piede d'atleta), sostegno dell'arcata plantare longitudinale, piedi affaticati, dolori alla pianta dei piedi.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU076**

Tab. misure pag. 141



## PLANTARE COCCO-TECH BLACK

Il plantare che offre maggior sostegno. Massimo controllo del mesopiede e retro piede. La speciale struttura scarica il peso e minimizza l'ingombro. Adatto alla maggior parte delle calzature. Adatto per un utilizzo continuo e per le attività sportive. Termoformabile e ritagliabile.

**Indicazioni:** allineamento del calcagno, tendiniti, correzione valgismo, micosi (piede d'atleta), pronazione, plantalgia, talalgia.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU075**

Tab. misure pag. 141

# PLANTARI IN COCCO




**FIBRA DI COCCO:**  
Il rivestimento in fibra di Cocco è uno speciale tessuto di ultimissima generazione: esso è dotato di proprietà traspiranti, antibatteriche, assorbenti ed è ecologico.



**MEMORY FOAM:**  
attutente, a memoria di forma, leggero, antibatterico.



Invaso profondo per il calcagno e il supporto dell'arcata plantare.

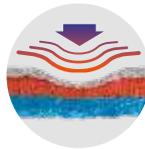

AMMORTIZZANTE



## PLANTARE MEMORY 4G® Plantare con azione traspirante e antibatterica

Plantare con base in materiale riciclato Memory Foam traspirante ad elevata memoria di forma e dalle proprietà ammortizzanti. Invaso profondo per il calcagno e supporto dell'arcata plantare.

Il **rivestimento in fibra di COCCO** è uno speciale tessuto di ultimissima generazione: esso è dotato di proprietà **traspiranti, antibatteriche, assorbenti ed è ecologico**. Design adatto per calzature casual e sportive.



I plantari Memory 4G® sono il risultato di una approfondita ricerca di materiali e dell'applicazione delle tecnologie più avanzate.

I plantari offrono molti vantaggi:

- TRASPIRANTI
- ANTIBATTERICI
- ASSORBENTI
- CONFORTEVOLI
- AMMORTIZZANTI
- ANATOMICI
- LEGGERI
- ADATTI ALLA MAGGIOR PARTE DELLE CALZATURE
- RITAGLIABILI IN PUNTA
- PROGETTAZIONE E PRODUZIONE INTERAMENTE ITALIANA

**Indicazioni:** plantalgia, talalgia, congestione venosa e linfatica, crampi, pesantezza dei piedi e delle gambe, protezione del piede durante il cammino e l'attività fisica.

Misura **S, M, L, XL**  
Codice **EU088**

Tab. misure pag. 141



Bianco



Beige

Nero

## SALVA-PLANTARE ADEGUA®

La pelle ha una naturale presenza di batteri. Un alto livello di batteri, come la loro totale assenza, crea diversi problemi (allergie, odore, malattie, etc.). Il tessuto Q-SKIN® non è un battericida ma limita con efficacia le eccessive proliferazioni batteriche.

### Controllo odore:

normalmente i microbi sani della pelle vengono trasferiti ai tessuti. Con le normali fibre di nylon, questi batteri possono proliferare e crescere molto velocemente lasciando un cattivo odore anche su solette e plantari. Il Q-SKIN® con cui sono realizzati i Salva-Plantari ADEGUA®, con le sue caratteristiche microparticelle d'argento, limita la crescita di batteri non crescano nei tessuti, riducendo spiacevoli odori.



### Effetto Permanente:

il filato Q-SKIN® del Salva-Plantare ADEGUA®, grazie agli agenti antimicrobici nella matrice polimerica, ha un effetto permanente (effetto batteriostatico dopo più di 100 lavaggi).

Il Salva-Plantare ADEGUA® realizzato con il filato Q-SKIN® allunga la durata di plantari/solette e genera un globale effetto benefico dentro le calzature e ai piedi.

### Indicazioni:

contribuisce a limitare la proliferazione batterica ed il cattivo odore del piede - protezione di plantari.

Misure **1 (35/37) - 2 (38/40) - 3 (41/43) - 4 (44/46)**

Colori **bianco, beige, nero.**

Codice **ADCS colore bianco**  
**ADCSB colore beige**  
**ADCSN colore nero**

## ADEGUA®



Non è un dispositivo medico


## CICATRICI IPERTROFICHE LA NATURA RIMARGINA LE FERITE, EUSCAR AIUTA LA NATURA A FARLO NEL MODO MIGLIORE

La riparazione di una perdita di sostanza si attua mediante una complessa interazione fra mediatori chimici, cellule e proteine strutturali che cooperano affinché i tessuti lesionati possano recuperare la loro integrità e funzione.

L'alterazione di questo equilibrio, a livello cutaneo, può procurare l'insorgere di cicatrici atrofiche, ipertrofiche fino alla formazione di cheloidi.

La sola terapia chirurgica per queste lesioni si è dimostrata inefficace, dando luogo a numerose recidive. Da più di 15 anni l'uso del silicone ha sovvertito i normali protocolli terapeutici, dimostrandosi un metodo efficace non solo nel trattamento, ma anche nella prevenzione degli inestetismi cicatriziali.

Partendo dal sinergismo occlusione, compressione e uso di silicone si è creato un dispositivo medico specifico per ogni distretto corporeo.

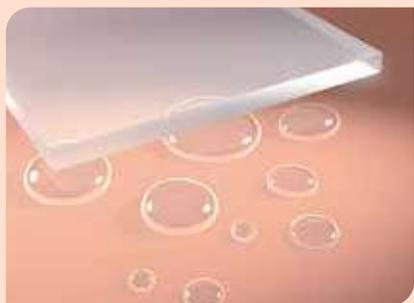

IL "MICROCLIMA" CHE SI CREA TRA PATCH E CUTE FAVORISCE LA RIDUZIONE DELLA CICATRICE



## CICATRICI IPERTROFICHE



### EUSCAR Patch

Il PATCH EUSCAR è una placca in silicone medicale di alta qualità che rende meno visibili le cicatrici cutanee di ogni tipo. È particolarmente indicata per le cicatrici in fase di guarigione ed è utile per ridurre, ove possibile, le cicatrici meno recenti. La placca EUSCAR PATCH è indicata per le ferite post-chirurgiche e per ridurre l'eventuale tendenza alla formazione di cicatrici ipertrofiche.

**Indicazioni:** cicatrici, cicatrici ipertrofiche, cheloidi.

Codice **EUS1C cm 2,5 x 10**



### EUSCAR Pomata\*

La POMATA EUSCAR è una emulsione eudermica facilmente assorbibile dalla cute. I principi attivi sono UREA, VITAMINA E (tocoferolo), PANTENOLO (vitamina B-5), OLI ESSENZIALI a base di AGLIO (antibiotico naturale) e MELILOTO (acidi cumarinici con funzioni anticoagulanti naturali). POMATA EUSCAR è indicata nei casi di gestione delle cicatrici, per mantenere integre le membrane cellulari per le specifiche proprietà antinfiammatorie e di protezione naturale dell'epidermide. La POMATA EUSCAR migliora l'elasticità della pelle e si integra nei trattamenti fisioterapici come i massaggi dedicati allo scollamento cellulare sottocutaneo. Pomata Euscar Eumedica riduce la visibilità delle cicatrici e limita la formazione di cheloidi.

Codice **EUS1P 30 ml**

\* È un prodotto cosmetico



WONDERSCAR

### WONDERSCAR - Silicone Gel Sheet

Foglio in silicone per il trattamento di cheloidi e cicatrici ipertrofiche di tutte le superfici corporee. Il foglio è anallergico, atossico. Può essere tagliato nella misura desiderata.

Codice **S1045W219 cm 19,5 x 9,5 - 2 mm**

## E CICATRICI IPERTROFICHE



interno in  
**OLEO  
GEL**

### CARPAL GEL SLEEVE Cuscinetto in Oleo-gel

Il supporto per compressione Carpal Gel Sleeve è un cuscinetto in tessuto provvisto di un pad in gel dalla forma anatomica dello spessore di circa 6 mm che previene e riduce i traumi, gli impatti, la pressione. Ideale per cheloidi e cicatrici ipertrofiche risultanti da chirurgia plastica e ricostruttiva, traumi, ustioni e per il trattamento post-operatorio del tunnel carpale. Il gel rilascia olio minerale, che previene e riduce la comparsa di tessuto cicatriziale. Il tessuto elastico in 4 direzioni consente una mobilità ottimale del polso.

Misure **S/M, L**  
Versioni **Destra e sinistra**  
Codice **S1012 SM**  
**S1012 L**

### HAND DIGITUBE Tubolare con gel ritagliabile

La maglia tubolare elasticizzata interamente rivestita in Oleo-gel polimerico, contribuisce al rimodellamento di cicatrici dovute a interventi chirurgici o traumi. Ritagliabile a misura, lavabile e riutilizzabile.



Misure **S, L**  
Codice **EU047F**

### HAND DIGITAL CAP Guaina digitale

Con l'azione compressiva della maglia tubolare e l'azione emolliente dell'Oleo-gel polimerico di cui è interamente rivestito, HAND DIGITAL CAP dona sollievo dal dolore in caso di artrite, esito di chirurgia, esito di trauma. Protegge il letto dell'unghia in caso di trauma e protegge la cute disidratata in caso di amputazione. Può ridurre l'ipersensibilità, aumentare l'elasticità cutanea e l'aspetto della cicatrice. Lavabile e riutilizzabile.

Misure **S, L**  
Codice **EU048F**

## E CICATRICI IPERTROFICHE



**OLEO  
GEL**

### HAND EUCAP Cappuccio in Oleo-gel per le dita

Cappuccio in oleogel polimerico molto morbido ed elastico, diventa una seconda pelle protettiva, mentre il continuo massaggio contribuisce al rimodellamento delle cicatrici. Il foro apicale agevola la traspirazione cutanea. Lavabile e riutilizzabile.



Misure **Unica**  
Codice **EU049F**

### HAND GEL SPREADER LOOP Divaricatore con doppio anello di fissaggio

Divaricatore in oleogel polimerico morbido ed elastico, indicato per il trattamento di cicatrici posizionate nelle commessure interdigitali. Provvisto di due pratici anelli di fissaggio alle dita, è lavabile e riutilizzabile.

Misure **Unica**  
Codice **EU050F**

### HAND MULTI PROTECTION Cuscinetto protettivo in gel autoaderente

Dispositivo in Oleo-gel autoaderente, rivestito sul lato esterno da uno strato di tessuto elasticizzato sottile e morbido. La sua applicazione favorisce la riduzione delle cicatrici. Lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** protezione delle aree di pelle esposte a pressione e attrito, prevenzione degli arrossamenti cutanei e delle vesciche.



Ritagliabile nella forma e nella misura desiderata.

Elastico in tutte le direzioni, si adatta perfettamente a ogni area di applicazione.

Misure **Unica - 8 x 7 cm**  
Codice **EU051F**

## I PRODOTTI DELLA LINEA ANTIDECUBITO PREVENGONO LE ULCERE DA DECUBITO MEDIANTE LA DISSIPAZIONE DELLE FORZE PRESSORIE, SIA PERPENDICOLARI CHE TANGENZIALI.

Essi sono costituiti da un gel polimerico applicato su un supporto di tessuto. Il gel polimerico possiede le caratteristiche di essere atossico, anallergico, trazioneabile in ogni direzione, incomprimibile come l'acqua, elastico, a memoria di forma totale. Inoltre, il gel polimerico contiene all'interno della sua struttura chimico-fisica un olio minerale di elevatissima purezza. Ne sono state sperimentalmente studiate anche le proprietà cicatrizzanti ed eutrofiche in caso di perdita di sostanza cutanea e ustioni. Questi prodotti sono diretti in particolare ai pazienti anziani, a quelli costretti a lunghe degenze a letto, ai paraplegici e tetraplegici, ai disabili in generale.



### Lenzuoletto Antidecubito

Studiato per le regioni sacro-coccigea, dorsale e scapolare. Uno strato di gel polimerico è applicato su un supporto di tessuto elasticizzato. Il gel va posizionato a diretto contatto della cute da proteggere. Spessore 0,5 cm.

Codice **S1042 cm 20 x 20**  
**S1043 cm 28 x 38**  
**S1044 cm 40 x 50**



### Lenzuoletto Antidecubito - Ricoperto

Simile al precedente, ricoperto con tessuto elasticizzato da entrambi i lati.

Codice **S1042C cm 20 x 20**  
**S1043C cm 28 x 38**  
**S1044C cm 40 x 50**



Modello chiuso

### Protezione per il Gomito in Oleo-gel

Maglia elasticizzata tubolare leggera e anti-arriccimento, con disco di gel polimerico per proteggere il gomito.

Misura **S/M donna, L uomo**  
Codice **S107**



Modello chiuso

### Protezione per il Tallone in Oleo-gel

Maglia elasticizzata tubolare leggera e anti-arriccimento, con protezione calcaneale in gel polimerico.

Misura **S/M donna, L uomo**  
Codice **S107**



### PRAFO® Tutore caviglia e piede con funzione antidecubito

Presidio per la terapia, la riabilitazione e la prevenzione del paziente neuroleso.  
**Doppia funzione:**

- PR-Pressure Relief: antidecubito.
- AFO-Ankle Foot Orthosis: tutore caviglia e piede.

Regolazione sia dell'altezza che della lunghezza per adattarlo a tutti i pazienti. Regolazione della flessione plantare per correggere l'equinismo del piede. Funzione di molla per facilitare la deambulazione. Barra antirrotatoria per posizionare correttamente l'arto. Scarico completo del calcagno per prevenire le lesioni da decubito.

**Indicazioni:** paziente emiplegico, sia allettato che in fase di recupero, riabilitazione neuromotoria, prevenzione e correzione degli atteggiamenti posturali, prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee da decubito nel paziente neuroleso.

Misure **Unica**  
Versione **Ambidestra regolabile**  
Codice **PR650APU** (controllo piano sagittale, piede diabetico)  
**PR650D** (controllo piano sagittale e frontale, piede neurologico)

 **DIABETOLOGIA**

 **RIABILITAZIONE**



### PRESSURE SENSITIVE SHEET Cuscinetto in Oleo-gel con supporto telato

Cuscinetto di gel polimerico ritagliabile nelle forme e misure desiderate, in modo da adattarsi e aderire a tutte le salienze anatomiche. Su un lato è disposto un supporto telato, per facilitarne l'applicazione e la rimozione.

**Indicazioni:** protezione da attriti e pressione localizzata.

Misura **cm 10 x 10**  
Codice **S006F con supporto telato**  
**S010QF senza supporto telato**



## RIABILITAZIONE



### SCARPE TERAPEUTICHE SPECIALI ORTHOTECH®

Persone di tutte le età, affette da problemi ereditari o causati da incidenti o malattie, hanno bisogno di calzature speciali in grado di alleviare il dolore e di ripristinare almeno in parte la mobilità. **OrthoTECH®** è la linea di scarpe terapeutiche costruite con materiali hi-tech, conformi ai più elevati standard di qualità, belle nell'aspetto, comode e funzionali. Sono stati conservati tutti i benefici delle scarpe su misura, eliminando però la necessità di laboriose misurazioni e modifiche. **Un concetto superiore di terapia: il trattamento funzionale** delle lesioni dell'arto inferiore. Questo trattamento contribuisce con successo a migliorare i risultati e ad accorciare il tempo di riabilitazione. Le scarpe terapeutiche **OrthoTECH®** attuano una limitazione selettiva dei movimenti articolari, consentono una deambulazione sicura e favoriscono la concessione del carico.



Misure dal n° 36 al n° 48  
Codice ORTORS

Tab. misure pag. 136

#### Reha Stabil

##### Scarpa di riabilitazione neuro-ortopedica.

Tomaia in cuoio rigido, allacciatura anteriore a strappo (gestibile con una sola mano), controtallone più alto e rinforzato, alloggiamenti laterali per inserire cuscinetti in poliammide, solette in polietilene preformato, imbottitura interna, suola antisdrucchiolo larga e stabile con punta in materiale morbido per prevenire l'inciampo, area flessibile alla suola per consentire un'andatura elastica, apertura anteriore per il controllo e il corretto posizionamento delle dita. Abbinabile ad altri supporti ortopedici (talloniere, plantari, ecc.).

**Indicazioni:** instabilità della tibiotarsica, difficoltà della deambulazione in esiti di paralisi, piede emiplegico, piede spastico.

#### Stabil II

##### Scarpa terapeutica di seconda generazione.

Tomaia in cuoio rigido, allacciatura laterale senza asole, controtallone più alto e rinforzato, alloggiamenti laterali per inserire cuscinetti in poliammide, solette in polietilene preformato, imbottitura interna, suola antisdrucchiolo larga e stabile, collare alla caviglia per proteggere il tendine d'Achille. Abbinabile ad altri supporti ortopedici (talloniere, plantari, ecc.).

**Indicazioni:** prevenzione nei pazienti soggetti a frequenti lesioni dei legamenti, terapie supplementari delle lesioni dei legamenti, lesioni degenerative del tendine tibiale posteriore, ritardo di consolidazione o pseudoartrosi di fratture della caviglia, artrosi/artrite della tibiotarsica e/o della sottoastragalica, esiti di artrodesi tibiotarsica/sottoastragalica, esiti di fratture del calcagno e dell'astragalo, esiti di osteotomia correttiva distale di tibia/perone.

Misure dal n° 36 al n° 48  
Codice ORTOS2

Tab. misure pag. 136



## RIABILITAZIONE



#### EUEMI - SLING

##### Fionda per pazienti emiplegici HIP - KNEE - ANKLE - FOOT SLING

La fionda custom-made è costituita da strisce di tessuto inestensibile a due colori (Cod. colore: grigio per la spalla e nero per la gamba). Tutte le parti della fionda sono regolabili tramite la fibbia per adattarsi alla corporatura del paziente. **Ortesi per la deambulazione del paziente emiplegico.** Corregge la cinematica della caviglia, ripristina la sequenza del passo normale e produce un incremento della velocità del cammino. Economica e meglio tollerata della comune Ankle-Foot Orthosis (AFO).

Misure Unica (regolabile)  
Codice EU036D Dx  
EU036S Sx

#### PRAFO® Tutore caviglia e piede con funzione antidecubito

Presidio per la terapia, la riabilitazione e la prevenzione del paziente neuroleso.  
**Doppia funzione:**

- PR-Pressure Relief: antidecubito.
- AFO-Ankle Foot Orthosis: tutore caviglia e piede.

Regolazione sia dell'altezza che della lunghezza per adattarlo a tutti i pazienti. Regolazione della flessione plantare per correggere l'equinismo del piede. Funzione di molla per facilitare la deambulazione. Barra antitoratoria per posizionare correttamente l'arto. Scarico completo del calcagno per prevenire le lesioni da decubito.

**Indicazioni:** paziente emiplegico, sia allettato che in fase di recupero, riabilitazione neuromotoria, prevenzione e correzione degli atteggiamenti posturali, prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee da decubito nel paziente neuroleso.



Misure Unica  
Versione Ambidestra regolabile  
Codice PR650APU (controllo piano sagittale, piede diabetico)  
PR650D (controllo piano sagittale e frontale, piede neurologico)



#### DIABETOLOGIA



#### RIABILITAZIONE



## RIABILITAZIONE



REALIZZAZIONE  
SU MISURA



FISSAGGIO  
ANTERIORE



REGOLAZIONE  
PERSONALIZZATA



### AFO PUSH ORTHO® Sistema funzionale Per piede cadente

- DESIGN INNOVATIVO
- SOSTEGNO ECCELLENTE
- STABILITÀ LATERALE

L'Ortesi Push Afo offre un eccellente sostegno in caso di disturbo al sollevamento del piede durante la deambulazione. Il suo innovativo design consente un'andatura naturale e permette di camminare di nuovo in modo sicuro ed efficiente.

Push AFO è un'ortesi caviglia-piede che, combinando diverse funzioni in modo esclusivo, solleva il piede durante la fase di swing (o di oscillazione), sostiene la flessione plantare dopo l'appoggio del tallone e permette, successivamente, la distensione del piede. L'ortesi, inoltre, offre stabilità laterale all'articolazione della caviglia.

Le fasce elastiche di Push AFO sono regolabili. In questo modo è possibile determinare il grado di sollevamento dinamico del piede nella fase di swing, in base alle esigenze personali di chi l'utilizza. All'appoggio del tallone, la funzione di contenimento delle fasce elastiche consente un efficace controllo della flessione plantare. Durante la fase di stance (appoggio), l'ortesi Push AFO consente all'articolazione della caviglia di flettersi e di estendersi liberamente e, durante la fase di distensione dell'avampiede, permette la funzione (residua) dei muscoli del polpaccio, contribuendo a un'andatura efficiente e naturale.

Di norma, è la calzatura indossata a consentire di fissare l'ortesi attorno al piede; Push AFO, invece, è dotata di un proprio sistema di fasce elastiche di fissaggio. Questo innovativo design consente d'indossare l'ortesi AFO anche con una calzatura leggera, per esempio una pantofola, stando in casa.

**Indicazioni:** ridotto controllo dei muscoli elevatori del piede durante la fase di swing e di risposta al carico (appoggio del piede / foot flat), eventualmente in combinazione con instabilità della caviglia. Patologie in cui può verificarsi una perdita di funzione dei muscoli elevatori del piede: ictus, ernia, sclerosi multipla, sindrome post-polio, distrofia muscolare, lesioni del midollo spinale.

Misure 1, 2, 3  
Codice PA32032AFO Dx  
PA32031AFO Sx

Tab. misure pag 140



## RIABILITAZIONE



### DORSAL NIGHT SPLINT Tutore notturno per lo stretching della pianta del piede

**Doccia per il piede da indossare di notte.**

Esercita lo stretching della fascia plantare e del tendine d'Achille, mantenendo il piede in posizione costante a 90°. Struttura anteriore a guscio con due semplici fasce di fissaggio al piede e alla gamba in morbido tessuto traspirante. Ledita e tutta l'area della caviglia e del retro piede restano libere. Semplice, confortevole ed efficace.

**Indicazioni:** fascite plantare, tendinite dell'Achilleo, piede cadente neurologico, dolore post-statico

Misure **SM, LXL**  
Codice **EU052 SM**  
**EU052L XL**

Tab. misure pag 140



### EURESTSPLINT Tutore di supporto per il piede

Eurestsplint è un tutore ideato per l'immobilizzazione, la stabilizzazione e la prevenzione della rotazione durante la notte o a riposo.

Consigliato nella riabilitazione dopo distorsioni e fratture, in caso di fascite plantare, dopo chirurgia di piede e caviglia e per la prevenzione del piede cadente, in caso di accorciamento del tendine d'Achille e in caso di lesioni da pressione dovute al prolungato allettamento.

Il supporto rimovibile a T, provvisto di ulteriori supporti rimovibili, consente il controllo della rotazione e la regolazione dell'elevazione del piede.

La struttura del tutore e le proprietà dei materiali garantiscono immobilizzazione efficace di piede e caviglia e costituiscono un supporto robusto e confortevole.

Il tutore anti-rotazione impedisce il movimento eccessivo e previene la rotazione indesiderata di piede e caviglia, mantenendoli in una posizione stabile, ma anche confortevole, durante il riposo, consentendo così un recupero più rapido in modo sicuro e agevole.

Consente la regolazione di altezza ed equilibrio del piede grazie al supporto a T da posizionare sotto il tutore. Garantisce comfort e pulizia grazie ai cuscinetti in spugna rimovibili.

**Indicazioni:** immobilizzazione di piede e caviglia in differenti posizioni.

Misure **M (n° 38-41), L (n° 42-45)**  
Codice **EU063**



## RIABILITAZIONE



### Tutore di spalla per emiplegici

Sostiene l'arto superiore colpito da emiplegia e si oppone alla discesa della testa omerale, mantenendo i capi articolari della spalla congruenti. Leggero, ben tollerato, economico. Si applica e si rimuove facilmente per consentire le cure riabilitative.

**Indicazioni:** emiplegia e suoi esiti, "spalla paralitica".

Misure **XS, S/M, L/XL**  
Codice **EU 013**

Tab. misure pag. 137



### BENDAGGIO E TAPING




### EUCARD - Fascia toracica compressiva post-operatoria

Il dispositivo EUCARD è un presidio post-operatorio per la gestione e il recupero da interventi al torace. Il dispositivo è destinato alla riduzione di eventuali ematomi e al contenimento di possibili edemi. La fascia toracica EUCARD è composta da una cintura sternale regolabile completa di placca pettorale integrata. Il dispositivo è realizzato in tessuto felpato con imbottitura in PU, bordature in cotone e chiusure a Velcro®. Facile e rapida da rimuovere e riapplicare per consentire l'ispezione in sito e le medicazioni della ferita chirurgica.

**Indicazioni:** trattamento contenitivo post-operatorio di interventi al torace.

Misure **Unica**  
Codice **EU 039**

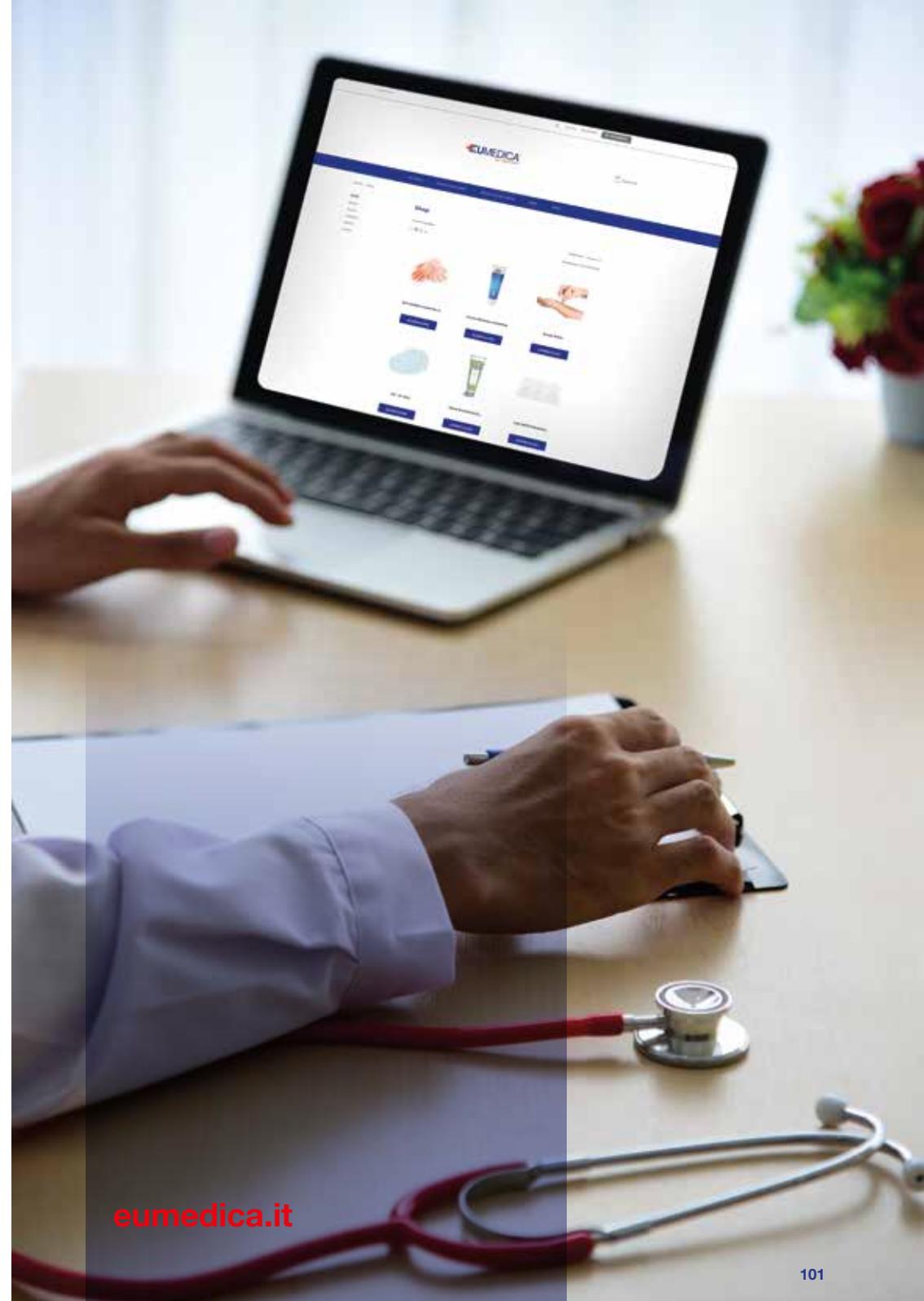

[eumedica.it](http://eumedica.it)



## ISTRUZIONI PER IL RILEVAMENTO TAGLIA



1 Lunghezza gamba

2 **SMALL**  
Ø a polpaccio cm 28/33  
**MEDIUM**  
Ø a polpaccio cm 34/39  
**LARGE**  
Ø a polpaccio cm 40/46

3 **SMALL**  
Ø caviglia cm 19/21  
**MEDIUM**  
Ø caviglia cm 22/24  
**LARGE**  
Ø caviglia cm 25/28

## EUTROMBOFIX®

### Calza per la profilassi della trombosi

Maglia elasticizzata con fili rivestiti. La calza veste perfettamente ed è ben tollerata dalla pelle. Resistente alla traspirazione e agli unguenti. Lavorata a maglia secondo la forma anatomica, a compressione graduale da 18 mm Hg (caviglia) a 8 mm Hg (coscia). Apertura di ispezione sotto le dita dei piedi. Bordo prossimale con inserto in silicone. Lavabile e sterilizzabile (121° autoclave).

#### Indicazioni:

- Profilassi della trombosi nel trattamento dei degenti, prima, durante e dopo interventi chirurgici.

#### Controindicazioni:

- Se ne sconsiglia l'uso in presenza di grave arteriosclerosi, dermatiti, gravi edemi delle gambe anche di origine cardiaca, ulcere aperte.

## COME INDOSSARE CORRETTAMENTE LA CALZA



## TABELLA TAGLIE

	<b>SMALL</b> FASCIA GIALLA	<b>MEDIUM</b> FASCIA VERDE	<b>LARGE</b> FASCIA ROSSA
<b>SHORT</b> FASCIA SOTTILE	<b>SHORT / SMALL</b> STATURA PICCOLA (mt 1,60 ca.) CORPORATURA ESILE FASCIA SOTTILE GIALLA Cod. <b>EU 163 AG C S</b>	<b>SHORT / MEDIUM</b> STATURA PICCOLA (mt 1,60 ca.) CORPORATURA MEDIA FASCIA SOTTILE VERDE Cod. <b>EU 163 AG C M</b>	<b>SHORT / LARGE</b> STATURA PICCOLA (mt 1,60 ca.) CORPORATURA ROBUSTA FASCIA SOTTILE ROSSA Cod. <b>EU 163 AG C L</b>
<b>REGULAR</b> FASCIA MEDIA	<b>REGULAR / SMALL</b> STATURA MEDIA (mt 1,70 ca.) CORPORATURA ESILE FASCIA MEDIA GIALLA Cod. <b>EU 163 AG R S</b>	<b>REGULAR / MEDIUM</b> STATURA MEDIA (mt 1,70 ca.) CORPORATURA MEDIA FASCIA MEDIA VERDE Cod. <b>EU 163 AG R M</b>	<b>REGULAR / LARGE</b> STATURA MEDIA (mt 1,70 ca.) CORPORATURA ROBUSTA FASCIA MEDIA ROSSA Cod. <b>EU 163 AG R L</b>

È disponibile anche la misura EXTRA LARGE con tassello: Cod. **EU 163 AG XLT**  
Ø Polpaccio superiore cm 46, Ø Caviglia superiore cm 28



## PRAFO® Tutore caviglia e piede con funzione antidecubito

Nuovo presidio per la terapia, la riabilitazione e la prevenzione del paziente neuroleso. Doppia funzione:

- PR-Pressure Relief: antidecubito.
- AFO-Ankle Foot Orthosis: tutore caviglia e piede.

Regolazione sia dell'altezza che della lunghezza per adattarlo a tutti i pazienti. Regolazione della flessione plantare per correggere l'equinismo del piede. Funzione di molla per facilitare la deambulazione. Barra antirotatoria per posizionare correttamente l'arto. Scarico completo del calcagno per prevenire le lesioni da decubito.

**Indicazioni:** paziente emiplegico, sia allettato che in fase di recupero, riabilitazione neuromotoria, prevenzione e correzione degli atteggiamenti posturali, prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee da decubito nel paziente neuroleso.

Misure **Unica**  
Versione **Ambidestra regolabile**  
Codice **PR650APU** (controllo piano sagittale, piede diabetico)  
**PR650D** (controllo piano sagittale e frontale, piede neurologico)



**ANTIDECUBITO**



**RIABILITAZIONE**

## EUSTATIC

### Gambaletto per piedi delicati o diabetici

La sua particolare tessitura, con cuciture appiattite, evita qualsiasi abrasione o sfregamento e garantisce una compressione graduata sul piede per favorire la circolazione sanguigna. Nella realizzazione del tessuto, dove il cotone è prevalente, è stata inserita la fibra Silver, ottenuta unendo uno strato di argento puro alla superficie di un filamento continuo in modo permanente, avente proprietà antimicrobica, antistatica, naturale, termoregolante, schermante. Tali fibre, oltre a eliminare i cattivi odori, mantengono il piede fresco e asciutto. Il gambaletto non va indossato su ferite aperte.

**Indicazioni:** piede delicato/diabetico, piede amputato o con ulcere.



La nuova fibra **SILVER**

Misure **L, XL**  
Codice **EU038**

Tab. misure pag. 140



## EUMEDICA SHOES



Fascione anti squilibrio  
in microporosa



### SISTEMA SECURA® SUOLA ANTI SQUILIBRIO

#### Caratteristiche:

- Suola costruita in gomma microporosa a densità differenziata, con una inclinazione per scaricare la pressione dall'avampiede e trasferirla sul retro piede
- Retro piede (tacco) costituito da una mescola di densità più consistente per una maggiore stabilità e robustezza
- Fascione centrale anti squilibrio posto sotto l'avampiede costituito da una mescola morbida che assorbe il carico di pressione nel caso di uno sbilanciamento del peso in avanti durante la deambulazione

#### Sistema SECURA®

#### Caratteristiche:

- Tomaia in speciale tessuto forato per garantire la massima circolazione dell'aria. Ottima resistenza all'abrasione, alla tensione, alla lacerazione e al lavaggio
- Tomaia regolabile per contenere qualsiasi piede
- Suola in microporosa a bidensità con fascione centrale antisbilanciamento in avanti
- Contrafforte esterno per un maggior sostegno alla caviglia
- Peso estremamente leggero

**Indicazioni:** trattamento del post-operatorio.

Misure **dal n° 35/6 al 45/6**  
(ogni due numeri)  
Vendita al pezzo

Versione **Ambidestra**  
Codice **SC100N**



## EUMEDICA SHOES



### Sistema SECURA® Flat

#### Caratteristiche:

- Calzatura post-operatoria con suola semirigida sagomata in modo da favorire la naturale camminata.
- Tomaia in tessuto forato per facilitare la traspirazione.
- Fascia di chiusura che consente la regolazione della parte anteriore della calzatura e del volume interno; facilita l'alloggiamento di piedi edematosi, gonfi o bendati.
- Contrafforte esterno per un maggior sostegno della caviglia.

**Indicazioni:** trattamento del post-operatorio.

Misure **dal n° 35/6 al 45/6**  
(ogni due numeri)  
Vendita al pezzo  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **SC300N**





## SCARPE TERAPEUTICHE SPECIALI ORTHOTECH®



Dettagli a pagina 96

### Reha Stabil

#### Scarpa di riabilitazione neuro-ortopedica.

Tomaia in cuoio rigido, allacciatura anteriore a strappo (gestibile con una sola mano), controtallone più alto e rinforzato, alloggiamenti laterali per inserire cuscinetti in poliammide, solette in polietilene preformato, imbottitura interna, suola antidrucciolo larga e stabile con punta in materiale morbido per prevenire l'inciampo, area flessibile alla suola per consentire un'andatura elastica, apertura anteriore per il controllo e il corretto posizionamento delle dita. Abbinabile ad altri supporti ortopedici (talloniere, plantari, ecc.).

**Indicazioni:** instabilità della tibiotarsica, difficoltà della deambulazione in esiti di paralisi, piede emiplegico, piede spastico.

Misure **dal n° 36 al n° 48** Tab. misure pag. 136  
Codice **ORTORS**



Dettagli a pagina 96

### Stabil II

#### Scarpa terapeutica di seconda generazione.

Tomaia in cuoio rigido, allacciatura laterale senza asole, controtallone più alto e rinforzato, alloggiamenti laterali per inserire cuscinetti in poliammide, solette in polietilene preformato, imbottitura interna, suola antidrucciolo larga e stabile, collare alla caviglia per proteggere il tendine d'Achille. Abbinabile ad altri supporti ortopedici (talloniere, plantari, ecc.).

**Indicazioni:** prevenzione nei pazienti soggetti a frequenti lesioni dei legamenti, terapie supplementari delle lesioni dei legamenti, lesioni degenerative del tendine tibiale posteriore, ritardo di consolidazione o pseudoartrosi di fratture della caviglia, artrosi/artrite della tibiotarsica e/o della sottoastragalica, esiti di artrodesi tibiotarsica/sottoastragalica, esiti di fratture del calcagno e dell'astragalo, esiti di osteotomia correttiva distale di tibia/perone.

Misure **dal n° 36 al n° 48** Tab. misure pag. 136  
Codice **ORTOS2**



### PRESSURE RELIEF PADDING Imbottitura per ridurre le pressioni

Foglio di gel adesivo su un lato dello spessore di circa 3 mm, con rivestimento di tessuto di nylon, ideale per un'efficace riduzione di frizioni, attriti e pressioni. Si impiega come imbottitura per tutori e ortesi di ogni tipo.

Codice **S1120 cm 10 x 91**  
**S1121 cm 20 x 91**



### GEL E ROLL Benda elastica con Oleogel

Benda elastica impregnata di gel polimerico.

**Indicazioni:** diminuzione volumetrica di moncone d'amputazione, stasi venosa, edema del moncone.

Misure **cm 10 x mt 3**  
Codice **S101**



### PRESSURE SENSITIVE SHEET Cuscinetto in Oleogel con o senza supporto adesivo telato

Misure **cm 10 x 10**  
Codice **S006F con supporto telato**  
**S010QF senza supporto telato**

**ANTIDECUBITO** Dettagli a pagina 95



### EUSTATIC Gambaletto per piedi delicati o diabetici

Misure **L, XL** Tab. misure pag. 140  
Codice **EU038**

**DIABETOLOGIA** Dettagli a pagina 103



## PARTIAL FOOT SOCK Calza per amputazione parziale del piede

Indicato per amputazioni transmetatarsali. La calza è costituita da due strati di tessuto di Lycra e Spandex senza cuciture. La parte distale è rivestita di Oleo-gel che protegge da urti e pressioni.

Misure **Regular (altezza caviglia),  
X-Long (altezza polpaccio)**  
Codice **S104**



## SILOSHEATH Coprimoncone con Oleo-gel

Cappuccio per ricopertura di moncone d'amputazione impregnato di gel polimerico. Agisce come un comune cappuccio copri-moncone elasticizzato, inoltre disperde urti, vibrazioni e attrito tra protesi e moncone, elimina le abrasioni cutanee e si adatta ad ogni situazione locale (grandezza dell'arto residuo, edema, ecc.)

Misure **1 ÷ 8** Tab. misure pag. 142  
Codice **S102**



## MOLDING DISTAL ROLL - ON Tubolare Anatomico Distale

Roll-on, tubolare anatomico distale è un prodotto morbido, modellabile, totalmente in oleogel, ha un effetto lenitivo e idratante, protegge da pressioni e attriti.

**Indicazioni:** posizionato sull'apice del moncone protegge da attriti e sfregamenti. Circonferenza all'apice del moncone.

Misure **S, M, L** Tab. misure pag. 142  
Codice **S110**



## Eupress Grip

Maglia tubolare elasticizzata compressiva. Conferisce sostegno ai muscoli e alle strutture articolari. Coadiuvata la riabilitazione dopo la rimozione di splints e apparecchi gessati. Mantiene in sito le medicazioni sia agli arti che al tronco. Traspirante.

**Indicazioni:** riabilitazione, bendaggio su medicazioni.

- |        |  |
|--------|--|
| Codice | <b>R011B</b> Ø cm 6,25<br>Mano o arto piccolo                                  |
|        | <b>R011C</b> Ø cm 6,75<br>Braccio medio, caviglia piccola                      |
|        | <b>R011D</b> Ø cm 7,50<br>Braccio grande, caviglia media,<br>ginocchio piccolo |
|        | <b>R011E</b> Ø cm 8,45<br>Caviglia grossa, ginocchio medio,<br>coscia sottile  |
|        | <b>R011F</b> Ø cm 10,00<br>Coscia media, ginocchio grande                      |
|        | <b>R011G</b> Ø cm 12,00<br>Coscia grande                                       |



## BENDAGGIO E TAPING



### Eupress Tape

Nastro adesivo anelastico in tessuto di cotone 100%. Per eseguire rinforzi ai bendaggi di base, a protezione di strutture legamentose articolari (in prevenzione e cura). Taglio a zig zag - Anima da 1".

**Indicazioni:** taping e bendaggio funzionale. Ottimo per il fissaggio di tutori a prevenzione delle retrazioni cicatriziali nella chirurgia del paziente ustionato.

Codice	<b>CP1025</b>	<b>CP1038</b>	<b>CP1050</b>
	cm 2,5 x 10 mt	cm 3,8 x 10 mt	cm 5 x 10 mt



### Kinesio Tape Benda elastica adesiva neuromuscolare

Taping neuromuscolare adattabile a qualsiasi parte del corpo, fornisce supporto al trattamento muscolare. Ipoallergenico, resistente all'acqua, traspirante, privo di lattice. La funzione del taping è quella di attenuare dolori causati da contratture e tensioni muscolari, tendiniti e artrosi cervicali, edemi ed ematomi sottocutanei. Aiuta il naturale processo di guarigione dei tessuti. Dimensione: 5 cm x 5 mt

**Indicazioni:** allevia il dolore. Aiuta a ridurre l'infiammazione. Contribuisce alla ripresa motoria.

Codice	<b>EU074B</b>	<b>EU074N</b>	<b>EU074R</b>	<b>EU074BL</b>
	colore beige	colore nero	colore rosa	colore blu



### EUCARD Fascia compressiva toracica

Misure **Unica**  
Codice **EU 039**

Dettagli a pag. 100



# alevia®

## IL NATURALE BENESSERE DI MANI E PIEDI

CREME ED EMULSIONI A BASE DI  
SOSTANZE NATURALI FUNZIONALI  
ED ESTRATTI VEGETALI

UNA LINEA COMPLETA  
per dare sollievo e idratazione

Alevia è la linea di creme\* ed emulsioni studiate per la cura e il benessere di mani e piedi sensibili, secchi, screpolati e disidratati. Prodotti specifici formulati per prevenire fastidi e disturbi, e offrire all'epidermide massimo comfort, grazie a sostanze funzionali naturali ricche di preziose virtù.

\* Sono prodotti cosmetici





### CREMA GAMBE E PIEDI STANCHI

**Indicazioni:** ideale per proteggere e mantenere giovane la pelle. Indicata per donare sollievo a gambe e piedi stanchi e con sensazione di pesantezza. Adatta per decongestionare piedi e gambe gonfie e doloranti, dopo essere stati a lungo in piedi.

**Proprietà:** crema leggera, non untuosa, che si applica con facilità e si assorbe rapidamente. Ricca di principi attivi vegetali, quali gli estratti di ippocastano, meliloto e ruscus. Ha azione riposante e rinfrescante, e contiene inoltre vitamina E.

Codice **AL1ST**

Prodotto cosmetico



### CREMA MANI E PIEDI SCREPOLATI

**Indicazioni:** la pelle ha un naturale film idrolipidico di protezione il cui giusto equilibrio è garanzia di morbida elasticità per l'epidermide. Quando si rompe l'equilibrio la pelle si secca o, peggio, si screpola ed è necessario riportarla al più presto alla sua normale idratazione con l'apporto dei necessari principi nutritivi.

**Proprietà:** questa delicata crema riesce a ripristinare applicazione dopo applicazione il giusto grado di umidità dell'epitelio grazie a polimeri a bassa tensione superficiale e alto potere lubrificante, senza per altro ungere minimamente. Impedisce l'occlusione dei pori e consente una normale traspirazione.

Codice **AL7SC**

Prodotto cosmetico



### CREMA PIEDI SECCHI

**Indicazioni:** consigliata per piedi secchi, disidratati e screpolati. Per ammorbidire la cute o in caso di rugosità, ipercheratosi e talloni disidratati.

**Proprietà:** crema che sfrutta l'azione combinata di più ingredienti: il burro di karitè, la vitamina E, e l'urea. Quest'ultima sostanza idrata profondamente la pelle e ammorbidisce le callosità e rugosità del piede.

Profumata con olio essenziale naturale di lavanda.

Codice **AL2SE**

Prodotto cosmetico



### EMULSIONE MASSAGGIO CAVIGLIE E PIEDI GONFI

**Indicazioni:** ideale come crema per il massaggio ai piedi, e nel trattamento di caviglie gonfie e doloranti e nella pratica sportiva.

**Proprietà:** emulsione leggera, non untuosa, che si applica con facilità e si assorbe rapidamente. Contiene un particolare estratto di ippocastano titolato al 90% in escina ad alta concentrazione, estratto di ananas e di arnica.

Codice **AL12EC**

Prodotto cosmetico



### CREMA RINFRESCANTE E DEODORANTE

**Indicazioni:** consigliata per prevenire la formazione di cattivi odori e per rinfrescare i piedi. Non contenendo antitraspiranti, è particolarmente indicata per pelli sensibili.

**Proprietà:** possiede un effetto deodorante di lunga durata che viene assicurato da sostanze di derivazione naturale, senza interferire sulla traspirazione. Le proprietà rinfrescanti e lenitive vengono assicurate dall'olio essenziale di menta e dall'estratto di centella, ad alto titolo di principi attivi. La vitamina E protegge ulteriormente la pelle.

Codice **AL4DE**

Prodotto cosmetico



### EMULSIONE MASSAGGIO PIEDI DELICATI

**Indicazioni:** emulsione da massaggio ad azione emolliente, idratante, eutrofica. Contiene vitamina E ad alta concentrazione e sostanze ad azione idratante profonda (urea, pantenolo, PCA, sodio lattato) e triterpeni da centella asiatica.

**Proprietà:** trattamento cosmetico indicato come coadiuvante per prevenire le alterazioni cutanee del piede diabetico.

Codice **AL11EM**

Prodotto cosmetico



### CREMA PER MANI E PIEDI FREDDI

**Indicazioni:** una anche lieve insufficienza circolatoria, che può essere causata da diversi fattori (la stagione invernale, il fumo, l'obesità o il dover stare in piedi a lungo), può provocare una fastidiosa sensazione di freddo a mani e piedi. Si accusa un senso di indolenzimento, stanchezza o gonfiore. Alevia, grazie alle acquisizioni della cosmetica moderna, contribuisce ad ovviare a questi inconvenienti.

**Proprietà:** un leggero massaggio con questa crema contribuisce a migliorare la circolazione veicolando nella cute le sostanze funzionali, mantiene l'idratazione donando un durevole senso di benessere.

Codice **AL8FR**

Prodotto cosmetico



### CREMA PREVENZIONE ARROSSAMENTI

**Indicazioni:** è particolarmente indicata per chi, per ragioni professionali, venga a contatto con detersivi, solventi o altre sostanze dannose per la pelle. Consigliata anche per bambini e anziani che debbano fare uso costante di pannolini o pannoloni. È comunque una efficace profilassi per chiunque preveda situazioni di stress per la pelle di mani e piedi nella routine quotidiana.

**Proprietà:** la composizione in crema assicura una facile applicazione e un rapido e totale assorbimento. Contiene speciali polimeri chiamati perfluoropolietieri, una recentissima scoperta della cosmetica scientifica, che agiscono come potente barriera contro ogni aggressione esterna di agenti chimici (detergenti, solventi, ecc.) o fisici (polvere, caldo, freddo).

Codice **AL9AR**

Prodotto cosmetico



### GEL DETERGENTE MANI IGIENIZZANTE

**Indicazioni:** detersione e igienizzazione delle mani in casa o fuori casa.

**Proprietà:** gel igienizzante mani studiato per la detersione e l'igienizzazione delle mani. Lascia sulla pelle una piacevole sensazione di freschezza e pulito. Adatto per varie occasioni, sia a casa che fuori casa quando non c'è la possibilità di lavarsi le mani. Il gel deterge, igienizza e asciuga velocemente sulla pelle. **Contiene acido ialuronico per idratare la pelle e il 75% di acool per l'igienizzazione delle mani.**

Codice **AL13IG**

Prodotto cosmetico



Non è dispositivo medico o dispositivo di protezione individuale ma è prodotta ai sensi dell'Art. 16 comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020

### EU-MASK MASCHERINA - Per adulti

**Indicazioni:** protezione da contaminazione tramite vie respiratorie.

Eu-mask è una mascherina per adulti lavabile e riutilizzabile con strato filtrante in TNT polipropilene intercambiabile (solo per adulto). Mascherina a tre strati con lacci regolabili dietro la testa o le orecchie. Tessuto tecnico elastico e morbido, delicato a contatto con la pelle. Lo strato filtrante in TNT polipropilene idrorepellente blocca fisicamente le gocce d'acqua.

È lavabile in lavatrice ad una temperatura massima di 40° C. Ogni filtro garantisce un minimo di 25 lavaggi.

Misure **Unica**  
Codice **EU062**



Non è dispositivo medico o dispositivo di protezione individuale ma è prodotta ai sensi dell'Art. 16 comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020

### EU-MASK MASCHERINA - Per bambini

**Indicazioni:** protezione da contaminazione tramite vie respiratorie.

Eu-mask è una mascherina per bambini, a tre strati, in colore bianco panna con bordature verdi ed arancio, molto pratica da indossare grazie alla forma ergonomica e agli elastici per il posizionamento sulle orecchie. Questa mascherina per bambini è lavabile a 40° C fino ad una massimo di 25 lavaggi. La mascherina per bimbi è quindi riutilizzabile. Tessuto tecnico elastico e morbido, delicato a contatto con la pelle. Lo strato filtrante in TNT polipropilene idrorepellente blocca fisicamente le gocce d'acqua.

Versioni **Unica**  
Codice **EU062K**



### GEL DETERGENTE MANI IGIENIZZANTE

Codice **AL13IG**

Dettagli a pagina 114

# DISPOSITIVI PROTEZIONE SLOAN

Gli articoli **Sloan** sono indumenti protettivi monouso per la protezione del personale medico e paramedico dal contatto con liquidi organici del paziente o con irrigazione e lavaggi, al fine di prevenire possibili infezioni.

I dispositivi **Sloan** sono fabbricati in polietilene, spessore più di 50 micron, con cuciture termosaldate. Possono essere indossati sia sotto un camice sterile che sopra i comuni vestiti.

Gli indumenti protettivi **Sloan** rispondono alle Norme del T.U. 81/2008 e s.m.i. emanate in recepimento alle direttive CEE sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il modello della tuta (JUMPSUITE) e dei calzoni (PANT PROTECTOR), grazie all'apertura posteriore, favorisce la traspirazione e garantisce all'utilizzatore una gradevole sensazione di asciutto sia all'interno che all'esterno. Questi articoli sono attualmente impiegati nei reparti di recupero funzionale, pronto soccorso, sale operatorie e sale-parto, ma sono indicati per un'ampia gamma di applicazioni anche non chirurgiche per le quali sussista il pericolo di un contatto con fluidi organici: autopsie, emodialisi, rianimazione, pulizia e manutenzione di sale operatorie, bagno dei pazienti.

Sono disponibili con suola anti-sdrucchiolo (NON-SKID BOOTIE, optional).

Medici ed infermieri sono divenuti sempre più sensibili alle problematiche connesse al contatto con i fluidi organici, quindi richiedono misure protettive più efficaci.

La letteratura medica più recente invita a considerare tutti i pazienti come potenzialmente infetti da HIV: ciò comporta che deve essere invitato in via cautelativa ogni contatto con i liquidi biologici. Sono così stati ideati gli articoli SLOAN STA-DRI che agiscono come valida barriera protettiva delle infezioni per il personale sanitario.



### BOOTLEG LEGGING Gambale monouso

Gambale in polietilene con spessore più di 50 micron, misura unica, doppio elastico di sostegno (caviglia – coscia) suola antisdrucciolo.

Codice **SL250Y**



### JUMPSUITE SALOPETTE Tuta monouso

Tuta in polietilene con spessore più di 50 micron, misura unica, apertura posteriore brevettata, suola antisdrucciolo.

Codice **SL150Y**



## PROTEZIONE DELLA PERSONA



### **FULL APRON** **Grembiule monouso**

Grembiule lungo in polietilene con spessore più di 50 micron, misura unica.

Codice **SL750Y**



### **PANT PROTECTOR** **Calzoni monouso**

Calzoni in polietilene con spessore più di 50 micron, cuciture termosaldate, apertura posteriore brevettata, suola antisdrucciolo.

Codice **SL350Y**



# RIACCENDI LA TUA VOGLIA DI SPORT

GRAZIE AI TUTORI  
ZERO IMPACT ACTIVE,  
DOLORI E FASTIDI  
DURANTE L'ATTIVITÀ  
SPORTIVA SONO  
SOLO UN RICORDO.



## IL GINOCCHIO

### GINOCCHIERA Sportiva KFS

Tutore sportivo con guaina anatomica e supporti per il controllo del "tracking" rotuleo. Dotato di giunti speciali ultrapiatti e ricoperti, apertura al poplite e alla rotula, che permettono la perfetta flessione ed estensione del ginocchio.

**Indicazioni:** protezione e sostegno del ginocchio durante lo sport, prevenzione delle lesioni dei legamenti, instabilità cronica del ginocchio, gonalgia anteriore da alterato tracking rotuleo.

Misure **S, M, L, XL**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU0800**

Tab. misure pag. 143



#### STEP 1

Aprire i lacci con il velcro. Aprire la parte superiore (coscia) e la parte inferiore (gamba) della guaina di base e posizionarla dietro il ginocchio.



#### STEP 3

Se la guaina è stata applicata correttamente, la rotula spingerà dall'apertura anteriore. I giunti devono centrarsi lungo i lati della coscia e della gamba.

#### STEP 2

Avvolgere la guaina attorno al ginocchio, trazionando il materiale fino a fissare tra loro le apposite chiusure in velcro poste sul davanti. Regolare la tensione della guaina in modo da avvertire la giusta compressione, senza che essa provochi fastidio.



#### STEP 4

Allacciare i lacci fissandoli con il velcro. Regolare la loro tensione in modo che siano ben stretti, ma non tanto da ostacolare la circolazione.

## IL GINOCCHIO

### TUTORE ROTULEO

Ideato per lo sportivo regolare che ricerca una ginocchiera stabilizzante per praticare la propria attività in modo efficace. Specifico per il trattamento e la prevenzione del Runner's knee (ginocchio del corridore). La lunetta laterale è adattabile a seconda delle esigenze.

**Indicazioni:** dolore anteriore del ginocchio nello sport, Runner's knee, sindrome femoro-rotulea, condromalacia della rotula, malallineamento dell'apparato estensore del ginocchio, iperestensione esterna della rotula, sublussazione laterale della rotula.

Misure **S, M, L**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU056**

Tab. misure pag. 143



#### STEP 1

Aprire completamente i lacci del tutore.

#### STEP 2

Applicare lo stabilizzatore rotuleo impegnando la rotula in corrispondenza del foro sul davanti del ginocchio.

#### STEP 3

Fissare i lacci con il velcro (regolare la tensione dei lacci a seconda delle proprie esigenze).

## LA CAVIGLIA

### Tutore CAVIGLIA

Per sostenere e proteggere la caviglia durante lo sport. Allevia il dolore ed è sempre confortevole anche per utilizzi prolungati. Applicazione semplice e rapida. Grado di supporto intermedio/moderato. Triplice azione: lascia mobilità alla caviglia, mantiene il calore del corpo e agevola la traspirazione.

**Indicazioni:** protezione della caviglia durante le attività sportive, strappi, distorsioni, tendiniti e infiammazioni della caviglia di grado moderato, migliora la performance in caso di debolezza della caviglia.

Misure **S/M, L/XL**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU058**

Tab. misure pag. 143



**STEP\_1**  
Inserire il tallone nel foro, disponendo la parte più piccola (con le cinghie) della cavigliera sotto l'arcata del piede.

**STEP\_2**  
Chiudere la sezione anteriore sopra l'arcata del piede

**STEP\_3**  
Chiudere la sezione posteriore attorno alla caviglia

**STEP\_4**  
Fissare le cinghie lunghe incrociandole davanti alla caviglia. Regolare la tensione secondo le necessità.

## LA COLONNA

### TUTORE LOMBARE Ortho Sport

Il tutore lombare in tessuto elasticizzato confortevole e traspirante, è ideale per la pratica sportiva e ottimamente tollerato a contatto con la pelle, grazie alla morbidezza e alla velocità con cui l'umidità evapora, lasciando la pelle asciutta ed evitando il possibile raffreddamento da umidità trattenuta. Durante la pratica sportiva, è possibile rimuovere le stecche, se creano impedimento.

**Indicazioni:** lombalgia, contratture muscolari, prevenzione di dolori lombari.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU057**

Tab. misure pag. 143





## LE NATURALI PERFORMANCE DEL BAMBU

SCOPRI I BENEFICI DELLE FIBRE VEGETALI CHE RENDONO QUESTI TUTORI ANCORA PIÙ RESISTENTI, COMODI E LEGGERI.

Grazie alle proprietà antimicrobiche e alla capacità di assorbire il sudore favorendo la traspirazione, il bambù contribuisce a mantenere la temperatura corporea al giusto livello, per un comfort ottimale sia in estate che in inverno.



## IL GINOCCHIO

### GINOCCHIERA BAMBU

Ideata per chi pratica un'attività sportiva regolare, è dotata di inserti antiscivolo in silicone nella parte superiore. La parte centrale elastica si adatta in modo anatomicamente ottimale quando si flette il ginocchio, senza limitarne il movimento. Priva di cuciture.

**Indicazioni:** protezione del ginocchio durante le attività sportive, contusioni, distorsioni, artrosi, artrosinovite.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU053**

Tab. misure pag. 143

### GINOCCHIERA RINFORZATA BAMBU

Le due stecche laterali flessibili consentono un contenimento efficace, indispensabile per praticare sport. La parte centrale elastica si adatta in modo ottimale quando si flette il ginocchio. È dotata di inserti antiscivolo in silicone nella zona superiore e di un inserto in silicone che sostiene la rotula e produce un massaggio benefico nelle zone molli.

**Indicazioni:** protezione del ginocchio durante le attività sportive, contusioni, lesioni legamentose dei collaterali, strappi muscolari.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU054**

Tab. misure pag. 143





## LA CAVIGLIA



### CAVIGLIERA BAMBÙ

Il tessuto elasticizzato a trama alterna impedisce l'effetto laccio sopra i malleoli, lasciando liberi i movimenti durante l'attività fisica. Offre grande elasticità in lunghezza e altezza per un perfetto adattamento anatomico senza pieghe.

**Indicazioni:** protezione della caviglia durante le attività sportive, contusioni, stiramenti, distorsioni, edemi declivi, riabilitazione dopo la rimozione di apparecchi gessati.

Misure **S, M, L, XL**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU055**

Tab. misure pag. 143



# PER LA CAVIGLIA



push  
SPORTS

# CONTROL YOUR GAME!



620 ENERGY

690 POWER

933 FPS ACTIVITY

529500

CODE: 7381654  
BIANCO PUSH SPORTS  
SOPRABRACCIALE  
TO PREVENT INJURY

DISTRIBUITO DA:

**EUMEDICA**<sup>®</sup>  
Active

## LA GAMMA DI TUTORI PUSH SPORTS È STATA PROGETTATA DA UN TEAM DI SPECIALISTI ESPERTI, IN STRETTA COLLABORAZIONE CON ATLETI E PROFESSIONISTI DELLO SPORT, PER SODDISFARE ESATTAMENTE I DESIDERI DI CHI LI INDOSSA.

L'efficiente utilizzo di materiali di qualità superiore si traduce in una gamma di tutori sportivi ultrasottili e particolarmente confortevoli, che sostengono le articolazioni durante l'attività sportiva e che, grazie al design essenziale, sono ideali da indossare con calzature e abbigliamento sportivi. La gamma **Push Sports** si fonda sulle **competenze mediche di Push Braces**. Ogni tutore, inoltre, presenta una funzionalità ben studiata e su misura, per praticare sport all'insegna della salute e della sicurezza.



### TUTORE POLLICE PUSH SPORTS

L'ortesi per pollice Push Sports è utile in caso di dolore persistente al pollice in conseguenza dell'iperestensione dell'articolazione un infortunio giocando a palla o sugli sci. L'ortesi stabilizza l'articolazione, consentendo la guarigione dei legamenti interessati. L'apposito cappuccio protegge il pollice dolente da possibili urti, ad esempio dall'impatto con la palla. Le fasce del tutore sono regolabili in modo personalizzato e consentono a chi lo indossa di determinare il grado di limitazione della flessione del pollice in base alle proprie esigenze. Allo stesso tempo, le fasce compensano la mobilità dovuta al danno ai legamenti dell'articolazione. Le fasce del tutore si incrociano l'una con l'altra e neutralizzano le sollecitazioni medio-laterali dell'articolazione metacarpo-falangea del pollice. Le articolazioni del pollice rimanenti e il polso mantengono la loro libertà di movimento. Grazie all'ortesi per pollice, il palmo della mano risulta libero, consentendo di indossare guanti da portiere o da sci.

**Indicazioni:** pollice dello sciatore: iperestensione o dislocazione dell'articolazione metacarpo-falangea del pollice (MCP-1).

Misure **S, M, L** Tab. misure pag. 144  
Versioni **Destra e sinistra**  
Codice **P41032TP DX**  
**P41031TP SX**

### POLSIERA PUSH SPORTS



La polsiera Push Sports è particolarmente adatta in caso di dolore persistente o lieve instabilità del polso. Le stecche nel tutore limitano la flessione e l'estensione del polso inibendole, con una piacevole sensazione per chi lo indossa e consentendo di praticare sport senza difficoltà. Il grado di compressione è regolabile tramite la fascia elastica, che allo stesso tempo trasmette una sensazione di protezione. Grazie al materiale confortevole, a rapida asciugatura e dal design sottile, la polsiera Push Sports aderisce perfettamente alla pelle e presenta un'ottima conformazione anatomica.

**Indicazioni:** per la prevenzione di disturbi da sovraccarico ricidivi dell'articolazione del polso, in caso di disturbi da sovraccarico dell'articolazione del polso, in caso di dolore all'articolazione del polso, in caso di aumento della mobilità o instabilità dell'articolazione del polso.

Misure **S, M, L** Tab. misure pag. 144  
Versioni **Destra e sinistra**  
Codice **P41012P DX**  
**P41011P SX**

### POLSINO PUSH SPORTS



In caso di lievi disturbi da sovraccarico al polso, lo stabilizzatore Push Sports è la soluzione ideale. Questo tutore esercita una compressione attorno al polso, sostenendolo e riducendo il dolore durante l'attività sportiva. Grazie al materiale sottile e confortevole, lo stabilizzatore offre una sensazione piacevole. Posizionarlo è facile e le fasce anti-scivolamento in TPU garantiscono un mantenimento della posizione ottimale, con conseguente sensazione di sicurezza e stabilità per chi lo indossa.

**Indicazioni:** per la prevenzione di disturbi da sovraccarico ricidivi dell'articolazione del polso, in caso di leggeri disturbi da sovraccarico dell'articolazione del polso, in caso di aumento della mobilità dell'articolazione del polso.

Misure **Unica**  
Versioni **Destra e sinistra**  
Codice **P41022PSD DX**  
**P41021PSS SX**

## IL BRACCIO



### TUTORE EPICONDILITE PUSH SPORTS

Il tutore per gomito Push Sports è la soluzione ideale in caso di gomito del tennista o gomito del golfista, quando, a causa di un'intensa sollecitazione improvvisa, l'inserzione dei tendini dei muscoli dell'avambraccio sul gomito viene sovraccaricata e diventa dolente.

Mediante una pelotta, il tutore per gomito esercita una pressione sui muscoli dell'avambraccio interessati, con conseguente decompressione dell'inserzione tendinea colpita. La pressione si crea progressivamente grazie al materiale elastico della pelotta e a una piccola parte elastica presente sulla fascia. In questo modo, il dolore viene ridotto ed è possibile riprendere in piena sicurezza l'attività sportiva.

**Indicazioni:** "gomito del tennista" (epicondiliti).

Misure **Unica**  
Codice **P4701SA**

## LA CAVIGLIA

### CAVIGLIERA A 8 PUSH SPORTS



La cavigliera 8 Push Sports offre sostegno in caso di leggera distorsione della caviglia o riabilitazione (quasi) completata. La fascia elastica, che viene avvolta attorno alla caviglia formando un 8, stabilizza l'articolazione esercitando una compressione stabile e piacevole, con conseguente sensazione di sicurezza per chi indossa il tutore. Le speciali fasce anti-scivolamento in TPU hanno un andamento diagonale sopra l'avampiede e attorno al tallone e aumentano, in questi punti, la forza elastica del tutore. Le fasce in TPU a entrambi i lati della caviglia (sistema a "staffa") stimolano la propriocezione. La cavigliera è realizzata in materiale particolarmente sottile e traspirante e si asciuga rapidamente.

**Indicazioni:** distorsioni della caviglia (recidive), lieve distorsione della caviglia, lieve instabilità della caviglia, infiammazione capsulare.

Misure **S, M, L**  
Versioni **Destra e sinistra**  
Codice **P42022C DX**  
**P42021C SX**

Tab. misure pag. 144

## LA CAVIGLIA

### CAVIGLIERA KICX PUSH SPORTS



La cavigliera Kicx Push Sports offre la migliore protezione possibile da distorsione della caviglia durante l'attività sportiva, risultando particolarmente adatta sia alla ripresa degli allenamenti sia alla prevenzione di recidive in caso di instabilità della caviglia. Le fasce elastiche funzionali che s'incrociano sul lato esterno della caviglia ne limitano l'inversione in modo efficace. Le fasce sono fissate al lato interno rinforzato del tutore e si estendono verso l'esterno della caviglia seguendone la conformazione anatomica. Se il piede viene inclinato verso l'interno, le fasce elastiche entrano in tensione e prevengono la distorsione della caviglia. In questo modo è possibile praticare sport come sempre, poiché la cavigliera Kicx Push Sports consente la flessione plantare e dorsale dell'articolazione della caviglia. Il materiale elastico di qualità superiore aderisce perfettamente all'anatomia della caviglia e garantisce una piacevole compressione attorno alla caviglia. Il tutore è ultrasottile e quindi si adatta perfettamente alle calzature sportive leggere.

**Indicazioni:** instabilità della caviglia, prevenzione di traumi da inversione ricorrente (recidive).

Misure **S, M, L**  
Versioni **Destra e sinistra**  
Codice **P42012C DX**  
**P42011C SX**

Tab. misure pag. 144



## IL GINOCCHIO

### CINTURINO ROTULEO PUSH SPORTS

Il dolore attorno alla rotula o in corrispondenza dell'inserzione del tendine rotuleo, causato da progressivo sovraccarico, viene ridotto grazie allo stabilizzatore di rotula Push Sports. La pelotta elastica comprime il tendine rotuleo, fornendo un'efficace sostegno alla patella. Lo stabilizzatore di rotula comprime il tendine rotuleo esattamente sotto la patella, creando una leggera inclinazione con conseguente sollievo della cartilagine sul lato posteriore della patella. A ogni passo, il tutore esercita una compressione sul tendine rotuleo, che consente un buon dosaggio della pressione. Il grado di compressione può essere regolato in base alle esigenze di chi lo utilizza, modificando la tensione della fascia. Lo stabilizzatore di rotula aiuta chi lo indossa a riprendere a praticare sport senza dolore.

**Indicazioni:** infiammazione del tendine rotuleo, ginocchio del saltatore, morbo di Osgood-Schlatter.

Misure **Unica**  
Codice **P4302PA**

### GINOCCHIERA PUSH SPORTS

La ginocchiera Push Sports è la soluzione giusta quando uno sportivo avverte una leggera sensazione di instabilità al ginocchio, necessita di ulteriore supporto durante l'attività sportiva, accusa disturbi residui dopo un'operazione al menisco o una lesione ai legamenti. Questo tutore sostiene il ginocchio in modo esclusivo mediante due snodi a balestra su entrambi i lati dell'articolazione. Le sollecitazioni medio-laterali vengono neutralizzate, senza limitare in alcun modo la flessione e l'estensione del ginocchio. È proprio la forma particolare di questi snodi che consente di stabilizzare in modo eccellente l'articolazione del ginocchio, senza produrre limitazioni durante l'attività sportiva. Una pelotta a forma di ferro di cavallo è integrata nel tutore: essa si posiziona attorno alla rotula e contribuisce a stabilizzarla nell'arco di movimento del ginocchio. L'eccellente conformazione anatomica e lo spessore sottile della ginocchiera permettono di indossarla senza problemi sotto l'abbigliamento sportivo.

**Indicazioni:** sensazione di instabilità, lesione ai legamenti del ginocchio, artrosi, sindrome femoro-rotulea, lesione del menisco.


Misure **S, M, L, XL**  
Codice **P4301G**

Tab. misure pag. 144

# +EUMEDICA®

Active

Dedicata  
alle persone  
attive.

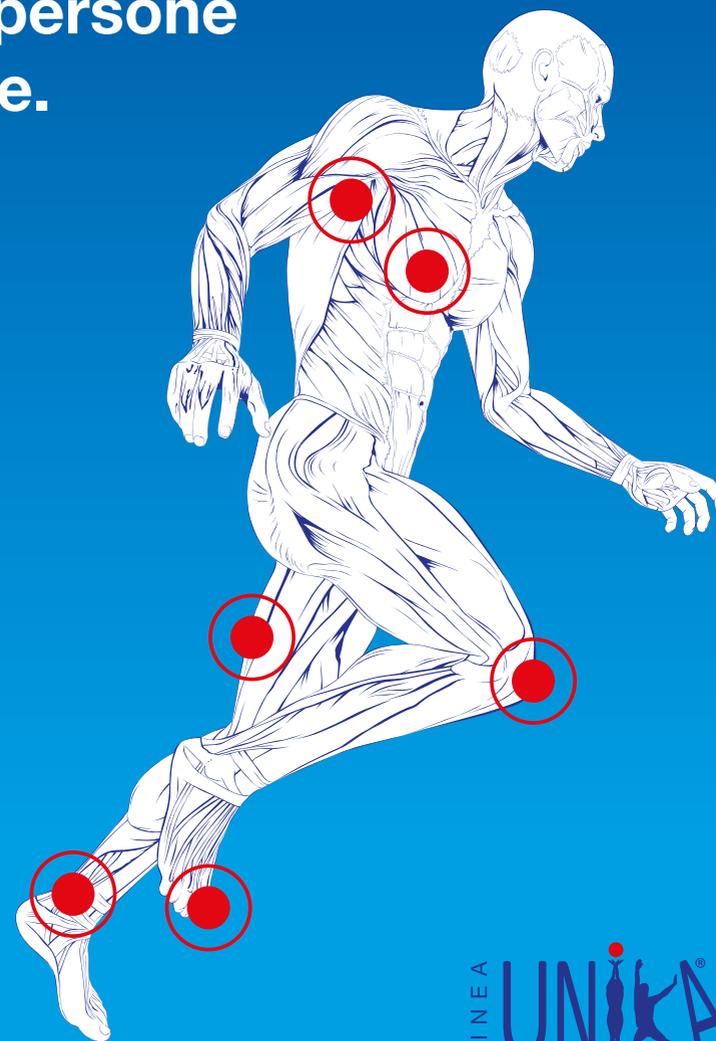

LINEA UNIKA®



Codice UK14AS - 75 ml

### Emulsione Antisfregamento

Particolari sostanze emollienti formano sulla pelle un film lubrificante superficiale, persistente e traspirante che protegge la pelle e previene fenomeni di irritazione dovuti allo sfregamento. Un particolare olio fluorurato (PFPE) dalle spiccate caratteristiche filmogene e protettive, combinato con sostanze lenitive (bisabololo, pantenolo e vitamina E) previene gli arrossamenti.

**Indicazioni:** formulazione non occlusiva espressamente studiata per gli atleti professionisti in particolare podisti e ciclisti che presentano aree cutanee particolarmente soggette a fenomeni di attrito e sfregamento come cosce, ascelle, ecc.



Codice UK13AT - 30 ml


### Crema Siliconica Antiattrito


Esclusive sostanze silicomiche lubrificanti formano un film superficiale, persistente e traspirante che protegge la pelle dai fenomeni di irritazione dovuti allo sfregamento. Un amido particolare dona alla pelle una totale scorrevolezza e un elevato potere assorbente per prevenire attrito e frizioni.

**Indicazioni:** formulazione non occlusiva espressamente studiata per gli atleti professionisti (in particolare podisti e ciclisti) che presentano aree particolarmente soggette a fenomeni di attrito e sfregamento come piedi, capezzoli, ecc.



## Tabelle misure

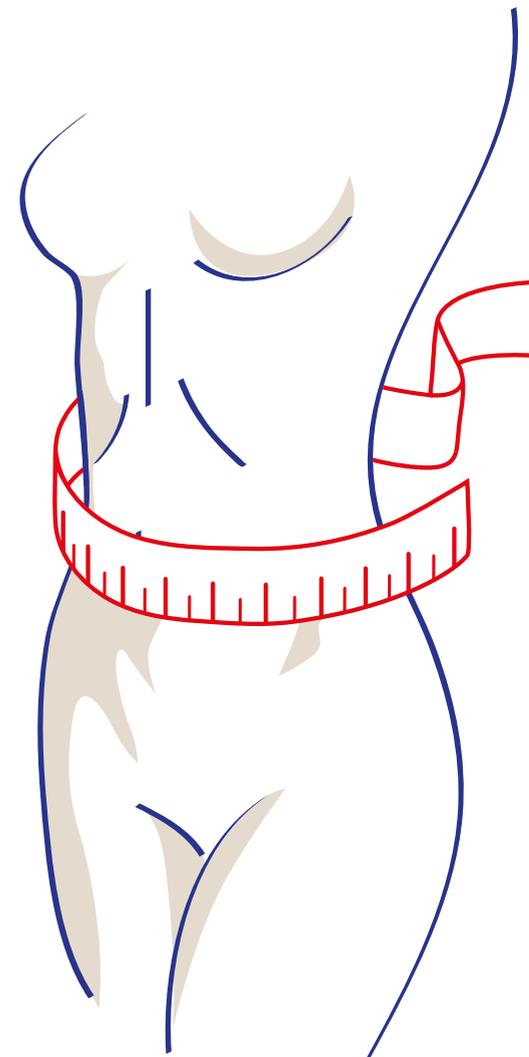

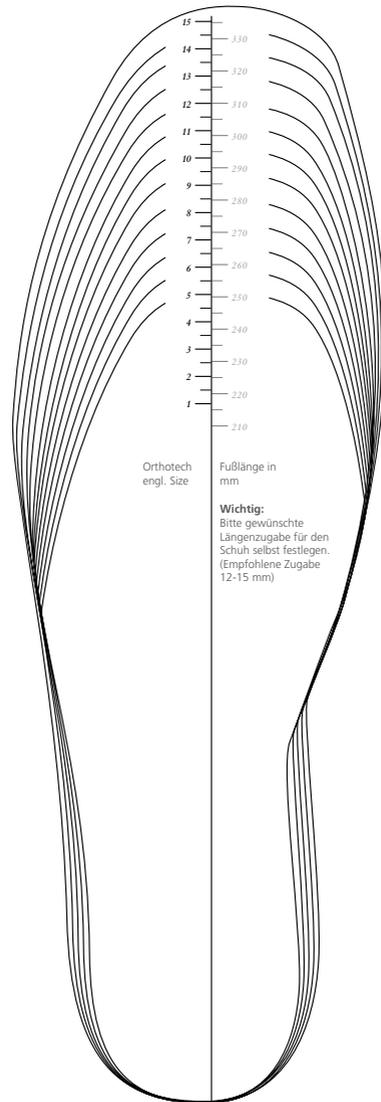

UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
OrthoTECH													
FR	35 ½	37	38	39	½	42	43	44	½	46	47	48	50

## COLLO

### COLLARI PUSH

Misura	1	2
Per tutti i modelli	cm 27 - 36	cm 37 - 46

### COLLARE EUOSOFT ED EUOSOFT RINFORZATO

Misura	Small	Medium	Large
H. cm 8	cm 33 - 38	cm 39 - 43	cm 44 - 49
H. cm 10	cm 33 - 38	cm 39 - 43	cm 44 - 49

### COLLARE EULIGHT

Misura	Small	Medium	Large
	cm 33 - 38	cm 39 - 43	cm 44 - 49

## SPALLA

### TUTORE DI SPALLA PER EMPLEGICI

Misura	XS	S/M	L/XL
Circonferenza	sotto cm 29 Ø	da cm 30 Ø a 33	da cm 34 Ø in poi

La circonferenza va presa +/- a cm10 al di sopra del gomito.

### BENDAGGIO S.O. BAND

Misura	S	M	L	XL
Circonferenza torace	fino a 60 cm	da 61 a 81 cm	da 81 a 100 cm	da 101 a 120 cm
Lunghezza prodotto	cm190	cm 230	cm 280	cm 320

Per determinare la misura, passare il metro sul paziente come se si stesse indossando il tutore stesso

### TUTORE PER SPALLA PUSH MED


Misura	1	2	3
Circonferenza	cm 55 - 75	cm 76 - 105	cm 106 - 140

### EUFIX-SO STABILIZZATORE DI SPALLA

Misura	Small	Medium	Large	X - Large
Circonferenza torace	cm 80 - 95	cm 96 - 110	cm 111 - 125	cm 126 - 140
DX	EU044SD	EU044MD	EU044LD	EU044XLD
SX	EU044SS	EU044MS	EU044LS	EU044XLS

### A-C BAND BENDAGGIO PER L'ARTICOLAZIONE ACROMION-CLAVEARE

Misura	Small	Medium	Large
Lunghezza avambraccio	cm 30 - 35	cm 36 - 40	cm 41 - 45
DX	EU045SD	EU045MD	EU045LD
SX	EU045SS	EU045MS	EU045LS

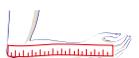

## TABELLE MISURE COLONNA VERTEBRALE

### TUTORI LOMBARI

\* solo per tutore lombare Ortho Nero Zero Impact

#### TUTORE LOMBALE E TUTORE LOMBALE ORTHO NERO - ZERO IMPACT

Misura	S	M	L	XL	XXL *
Per tutti i modelli	cm 75 - 85	cm 86 - 95	cm 96 - 105	cm 106 - 115	cm 116 - 130

Altezza fascia lombare ANTERIORE	<b>EU034</b> cm 20	<b>EU046N Ortho</b> cm 20
Altezza fascia lombare POSTERIORE	<b>EU034</b> cm 24	<b>EU046N Ortho</b> cm 24



#### TUTORE LOMBALE PUSH CARE E PUSH MED


Misura	1	2	3	4	5	6
Per tutti i modelli	cm 65 - 75	cm 76 - 85	cm 86 - 97	cm 98 - 110	cm 111 - 125	cm 126 - 145

Altezza fascia lombare ANTERIORE	<b>Push Care:</b> cm 15	<b>Push MED</b> cm 16
Altezza fascia lombare POSTERIORE	<b>Push Care:</b> cm 25	<b>Push MED</b> cm 32



### CORSETTO LOMBALE TIGGES

#### MISURE

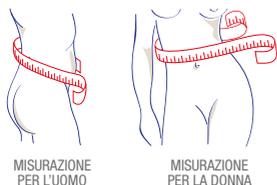

MISURAZIONE PER L'UOMO

MISURAZIONE PER LA DONNA

#### MODELLI

##### TIGGES K/N UOMO



##### TIGGES K/F DONNA



##### TIGGES E UNISEX



#### TAGLIE

	I° XS	II° S	III° M	IV° L	V° XL	Altezza Corsetto
<b>Uomo Tigges K/N</b>	Cod. TO100XS Post. cm 20	Cod. TO100S	Cod. TO100M	Cod. TO100L	Cod. TO100XL	Ant. cm 16 Post. cm 20
<b>Donna Tigges K/F</b>	Cod. TO101XS Post. cm 23,5	Cod. TO101S	Cod. TO101M	Cod. TO101L	Cod. TO101XL	Ant. cm 16 XS/S Ant. cm 18 M/L/XL Post. cm 23,5
<b>Unisex Tigges E</b>	Cod. TO103XS Post. cm 23	Cod. TO103S	Cod. TO103M	Cod. TO103L	Cod. TO103XL	Ant. cm 17 Post. cm 23
<b>Circonferenza vita</b>	cm 75 - 85	cm 85 - 95	cm 95 - 105	cm 105 - 115	cm 115 - 125	

## TABELLE MISURE GOMITO, MANO, POLSO E GINOCCHIO

### GOMITO

#### SISTEMA FUNZIONALE PER GOMITO PUSH

Misura	1	2	3	4	5
Per tutti i modelli	cm 22 - 24	cm 25 - 26	cm 27 - 28	cm 29 - 32	cm 33 - 36



### MANO E POLSO

#### POLSIERA ULTRA FIT PLUS

Misura	Small	Medium	Large	X - Large
Per tutti i modelli	cm 13 - 15	cm 16 - 18	cm 19 - 20	cm 21 - 23



#### POLSIERA ULTRA FIT LACCI

Misura	Small	Medium	Large	X - Large
Per tutti i modelli	cm 13 - 16	cm 16 - 19	cm 19 - 23	cm 23 - 25

#### POLSIERA PUSH CARE E MED - FERULA PUSH SPLINT

Misura	1	2	3	4
Per tutti i modelli	cm 13 - 15	cm 16 - 17	cm 18 - 19	cm 20 - 21



#### PUSH ORTHO CMC TUTORE DINAMICO PER LA RIZOARTROSI


Misura	0	1	2	3
Per tutti i modelli	cm 15 - 17,5	cm 17,5 - 19,5	cm 19,5 - 22,5	cm 22,5 - 27



### GINOCCHIO

#### SISTEMA FUNZIONALE PER GINOCCHIO PUSH

Misura	1	2	3	4	5
Per tutti i modelli	cm 28 - 31	cm 32 - 34	cm 35 - 37	cm 38 - 41	cm 42 - 45

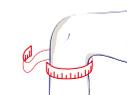

#### GINOCCHIERA, GINOCCHIERA RINFORZATA E GINOCCHIERA SYLYCON / EU-CONT®

Misura	I° - S	II° - M	III° - L	IV° - XL
Per tutti i modelli	fino a cm 32	cm 32 - 37	cm 37 - 42	oltre cm 42

EU-CONT



## CAVIGLIA E PIEDE

### SISTEMA FUNZIONALE PER CAVIGLIA PUSH CARE E MED

Misura	1	2	3	4	5
Per tutti i modelli	cm 26 - 29	cm 30 - 32	cm 33 - 35	cm 36 - 38	cm 39 - 41



### SISTEMA FUNZIONALE PER CAVIGLIA ORTHO AEQUI E MED AEQUI FLEX

Misura	1	2	3
Per tutti i modelli	cm 27 - 31	cm 32 - 34	cm 35 - 40

### SISTEMA FUNZIONALE PER PIEDE CADENTE AFO PUSH ORTHO

Misura	1	2	3
cm.	cm 27 - 31	cm 31 - 34	cm 34 - 40
Num. piede	36 - 41	39 - 44	42 - 47



### SISTEMA EUSAVE

Misura piede	Small	Medium	Large
	n° 35 - 38	n° 39 - 42	n° 43 - 46

### SISTEMA EUSTATIC

Misura	Large	X - Large
Per tutti i modelli	n° 39 - 40	da 41 in poi

### DORSAL NIGHT SPLINT

Misura	S - M	L - XL
Uomo	dal n° 38 al 42	dal n° 43 al 48
Donna	dal n° 37 al 42	dal n° 42 al 46

### CAVIGLIERA FUNZIONALE ASO

Misura	X - Small	Small	Medium	Large	X - Large	XX - Large
Per tutti i modelli	cm 25,5 - 28	cm 28,5 - 30,5	cm 31 - 33	cm 33,5 - 35,5	cm 36 - 38	cm 38,5 - 40,5



### CAVIGLIERA / EU-CONT®



Misura	I° - S	II° - M	III° - L	IV° - XL
Per tutti i modelli	cm 20 - 22	cm 22 - 24	cm 24 - 26	cm 26 - 30



COCCO-TECH®	Misure	ITALIA
Cod. RED EU076 - Cod. BLACK EU075	S	35/38
Cod. RED EU076 - Cod. BLACK EU075	M	39/41
Cod. RED EU076 - Cod. BLACK EU075	L	42/43
Cod. RED EU076 - Cod. BLACK EU075	XL	44/47

MEMORY 4G®	Misure	ITALIA
Cod. EU088S	S	35/38
Cod. EU088M	M	39/41
Cod. EU088L	L	42/43
Cod. EU088XL	XL	44/47



EU-SHOCK ABSORBER 4/4 E EU-SHOCK ABSORBER 4/4 MICROBICAL PROTECTION	Misure	ITALIA
Cod. EU086S - Cod. EU086MPS	S	35/38
Cod. EU086M - Cod. EU086MPM	M	39/41
Cod. EU086L - Cod. EU086MPL	L	42/43
Cod. EU086XL - Cod. EU086MPXL	XL	44/47

EU-SHOCK BLUE	Misure	ITALIA
Cod. EU082S	S	33/35
Cod. EU082M	M	36/39
Cod. EU082L	L	40/42
Cod. EU082XL	XL	43 oltre

EU-SHOCK RED	Misure	ITALIA
Cod. EU083S	S	33/35
Cod. EU083M	M	36/39
Cod. EU083L	L	40/42
Cod. EU083XL	XL	43 oltre

EU-SHOCK STANDARD	Misure	ITALIA
Cod. EU084S	S	33/35
Cod. EU084M	M	36/39
Cod. EU084L	L	40/42
Cod. EU084XL	XL	43 oltre

EU-SHOCK CON INSERTO RIMOVIBILE	Misure	ITALIA
Cod. EU085 S	S	34
Cod. EU085 M	M	35/40
Cod. EU085 L	L	41/46



SILOSHEATH TABELLA MISURE

Mis.	Code	Description	Approx. Gel Length	Approx. Distal Length	Approx. Distal Circ.	Approx. Prox. Circ.
I°	13315	Child	20 cm	25 cm - 34 cm	17 cm - 24 cm	17 cm - 26 cm
II°	13325	Short / Narrow	25 cm	38 cm - 44 cm	18 cm - 28 cm	18 cm - 32 cm
III°	13335	Short / Regular	25 cm	38 cm - 44 cm	20 cm - 34 cm	20 cm - 38 cm
IV°	13345	Medium / Narrow	33 cm	43 cm - 49 cm	20 cm - 34 cm	20 cm - 38 cm
V°	13355	Medium / Regular	25 cm	43 cm - 49 cm	23 cm - 37 cm	23 cm - 43 cm
VI°	13365	Large / Narrow	33 cm	46 cm - 54 cm	23 cm - 37 cm	23 cm - 43 cm
VII°	13375	Large / Regular	33 cm	46 cm - 54 cm	28 cm - 42 cm	28 cm - 49 cm
VIII°	13385	Large / Wide	33 cm	46 cm - 54 cm	31 cm - 50 cm	31 cm - 56 cm



come indossare il coprimoncone protesico con gel silosheath



come togliere il coprimoncone

TABELLA MISURE NOLDING DISTAL ROLL-ON

Codice	Misure	Circonferenza all'apice del moncone	Spessore	Lunghezza
S110	S	Ø cm 18,5	mm 2	cm 15
S110	M	Ø cm 21,5	mm 2	cm 15
S110	L	Ø cm 23,5	mm 2	cm 15

I BENEFICI DEL GEL SULLA PELLE

- L'esclusivo olio minerale medicale trasuda continuamente e gradualmente lungo tutto l'arco di vita del prodotto
- Formulato per il rilascio graduale sulla cute
- Il gel polimerico a reticolo tridimensionale si muove su tre piani distinti: ogni superficie si sposta sull'altra
- Fabbricazione secondo i più elevati standard: certificazione ISO 9001-2000
- Dermatologicamente testato
- Ammorbidisce e appiana le cicatrici e i trapianti cutanei.
- Benefico nella prevenzione delle lacerazioni della pelle per colpi, attrito e abrasione (utile in particolare per i pazienti che hanno in precedenza sofferto di problemi della pelle o della ferita)
- Esalta il comfort del paziente, migliorando l'elasticità e il trofismo delle cicatrici introflesse
- Migliora l'elasticità della pelle

CON

- Gel Protettivo
- Morbida
- Soffice
- Follicoli visibili
- Colorito normale

SENZA

- Gel Protettivo
- Rugosa
- Arrossata
- Non liscia
- Non elastica
- Fragile



GINOCCHIO


GINOCCHIERA SPORTIVA KFS - ZERO IMPACT ACTIVE

Misura	S	M	L	XL
	cm 32,5 - 35	cm 35,5 - 37,5	cm 38 - 42,5	cm 43 - 47,5



TUTORE ROTULEO - ZERO IMPACT ACTIVE

Misura	S	M	L
circonf. sopra ginocchio	cm 30 - 36	cm 34 - 40	cm 38 - 44
circonf. sotto ginocchio	cm 26 - 32	cm 30 - 36	cm 34 - 38

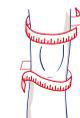

GINOCCHIERA E GINOCCHIERA RINFORZATA BAMBÙ - ZERO IMPACT ACTIVE

Mis.	Descrizione
I° - S	fino a cm 32
II° - M	cm 32 - 37
III° - L	cm 37 - 42
IV° - XL	oltre cm 42



Per una corretta scelta della taglia misurare la circonferenza del ginocchio dove indicato dalla freccia



CAVIGLIA

TUTORE CAVIGLIA - ZERO IMPACT ACTIVE

Misura	SM	LXL
Per tutti i modelli	n° 35 - 40	n° 41 - 44



CAVIGLIERA BAMBÙ - ZERO IMPACT ACTIVE

Mis.	Descrizione
I° - S	cm 20 - 22
II° - M	cm 22 - 24
III° - L	cm 24 - 26
IV° - XL	cm 26 - 30



Per una corretta scelta della taglia misurare la circonferenza della caviglia dove indicato dalla freccia



COLONNA

TUTORE LOMBARE ORTHO SPORT - ZERO IMPACT ACTIVE

Misura	S	M	L	XL
Per tutti i modelli	cm 75- 85	cm 86 - 95	cm 96 - 105	cm 106 - 115



Altezza fascia ANTERIORE S= cm 17 / altre = cm 17,5  
Altezza fascia POSTERIORE S= cm 22 / altre = cm 23

## POLSO

### TUTORE POLLICE - PUSH SPORTS

Misura	S	M	L
Per tutti i modelli	cm 16 - 19	cm 19 - 22,5	cm 22,5 - 26



### POLSIERA - PUSH SPORTS

Misura	S	M	L
Per tutti i modelli	cm 13 - 15,5	cm 15,5 - 18	cm 18 - 20,5



## GINOCCHIO

### GINOCCHIERA - PUSH SPORTS

Misura	S	M	L	XL
Per tutti i modelli	cm 27 - 31	cm 31 - 35	cm 35 - 40	cm 40 - 45



## CAVIGLIA

### CAVIGLIERA A 8 - PUSH SPORTS

Misura	S	M	L
Per tutti i modelli	cm 20 - 22,5	cm 22,5 - 25,5	cm 25,5 - 28,5



### CAVIGLIERA KICK - PUSH SPORTS

Misura	S	M	L
Per tutti i modelli	cm 28 - 32	cm 32 - 35	cm 35 - 39
Num. piede	n° 37 - 42	n° 40 - 45	n° 42 - 46



# +EUMEDICA®

## Materiali POP



Cartelli vetrina e da banco



Espositori

Totem



**Misure  
Grande**

H cm 194  
P cm 38  
L cm 58

**Misure  
Ridotto**

H cm 178  
P cm 31  
L cm 29

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



**ESPOSITORE DA BANCO  
LINEA PIEDE**

**Misure**

H cm 45  
P cm 26  
L cm 20,5



**ESPOSITORE DA BANCO  
ALLUCE VALGO**

**Misure**

H cm 39,5  
P cm 23  
L cm 24

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



**ESPOSITORE DA BANCO  
EUDUPLEX®**

Misure

H cm 39,5  
P cm 23  
L cm 24



**ESPOSITORE DA BANCO  
VALGOFIX®**

Misure

H cm 45  
P cm 16  
L cm 29



**ESPOSITORE DA BANCO EUCAP  
EUPINKIEFINGER - EUVAL - EUCREST**

Misure

H cm 39,5  
P cm 23  
L cm 24



**ESPOSITORE DA BANCO  
EUSAVE®**

Misure

H cm 39,5  
P cm 23  
L cm 24

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



ESPOSITORE DA BANCO  
EUSTATIC

Misure

H cm 40  
P cm 35  
L cm 24



ESPOSITORE DA BANCO  
EUSCAR MANO

Misure

H cm 39  
P cm 35  
L cm 24

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



ESPOSITORE DA BANCO  
ALEVIA

Misure

H cm 39,5  
P cm 23  
L cm 24



ESPOSITORE DA BANCO  
GEL AIR

Misure

H cm 45  
P cm 26  
L cm 20,5

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



ESPOSITORE DA BANCO  
EUSCAR

Misure

H cm 39,5  
P cm 23  
L cm 24



ESPOSITORE DA BANCO  
PUSH ORTHO CMC

Misure

H cm 39  
P cm 23  
L cm 24



ESPOSITORE DA BANCO  
GEL DETERGENTE MANI

Misure

H cm 26  
P cm 15  
L cm 10



ESPOSITORE DA BANCO  
PUSH SPORTS

Misure

H cm 49  
P cm 35  
L cm 24



Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario




Misure

H cm 42  
L cm 30



Misure

H cm 42  
L cm 30

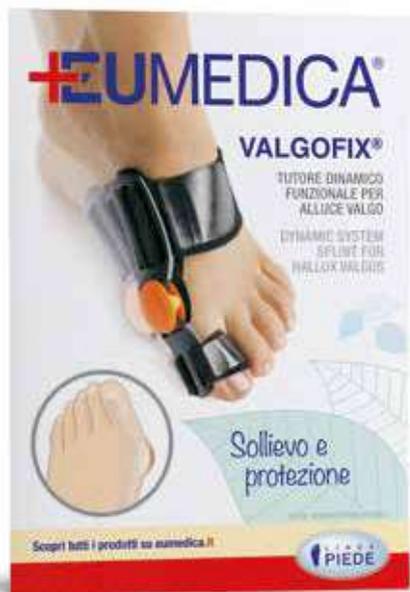

Misure

H cm 42  
L cm 30



Misure

H cm 42  
L cm 30

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



Misure

H cm 42  
L cm 30



Misure

H cm 42  
L cm 30



Misure

H cm 100  
L cm 70



# TOTEM - FRONTE RETRO



# TOTEM - FRONTE RETRO




### Misure

H cm 150  
L cm 50



### Misure

H cm 150  
L cm 50

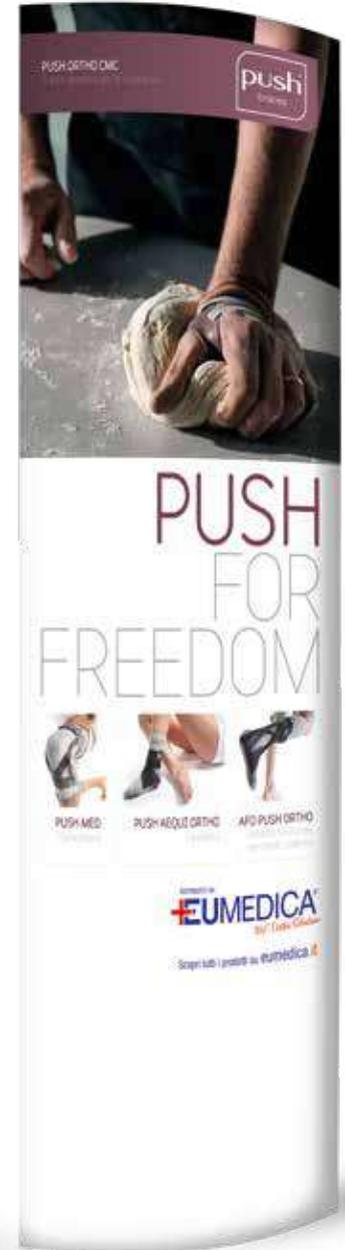

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

**PIEDE**

*Coccola i tuoi piedi*

Prova il comfort unico dei prodotti Eumedica in silicone e in morbido Oleo-gel. Scopri la gamma completa su [eumedica.it](http://eumedica.it)

**EUMEDICA**  
360° Care Solution

**PIEDE**

*Coccola i tuoi piedi*

Prova il comfort unico dei prodotti Eumedica in silicone e in morbido Oleo-gel. Scopri la gamma completa su [eumedica.it](http://eumedica.it)

**VALGOFIX®** - Tutore dinamico funzionale per l'alluce valgo

**ZERO SPLINT** - Splint elastico per alluce valgo

Si indossa con 3 semplici gesti

**COCOD-TECH**  
Plantari con sovrappioggia di sostegno

**EUMEDICA**  
360° Care Solution

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Area for handwritten notes with horizontal dotted lines.

Misure

H cm 150  
L cm 50



