


# **+EUMEDICA®**

## **Migliora il tuo benessere**

IL TUO PARTNER IDEALE  
PER OFFRIRE AI TUOI CLIENTI  
SICUREZZA E PROTEZIONE  
IN QUALSIASI SITUAZIONE  
DI VITA QUOTIDIANA,  
LAVORO E SPORT.

11/2020

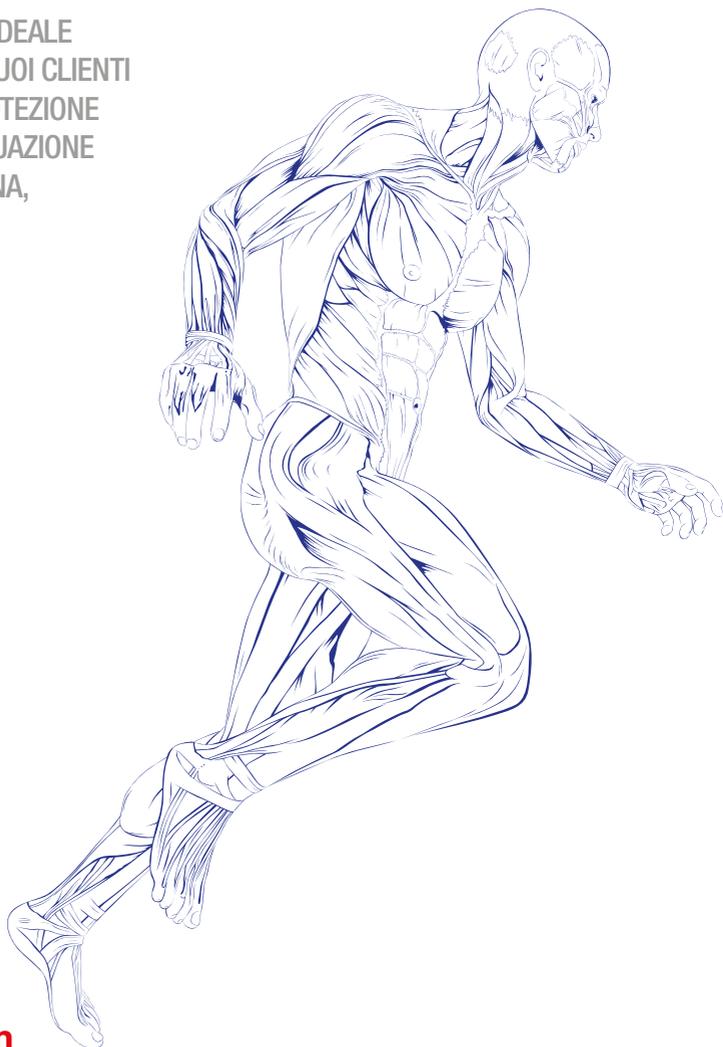

**Vademecum**



## EUMEDICA Srl

Azienda con sistema di gestione della qualità  
certificata da TÜV NORD CERT GmbH conforme alla norma

ISO 9001: 2015

“Certificato N° 44 100 097257”

## EUMEDICA VADEMECUM

Guida alle prescrizioni  
a cura del  
Servizio Marketing EUMEDICA

Edizione novembre 2020

Il **Vademecum** è stato approntato dal Servizio Marketing EUMEDICA  
per una facile e pronta individuazione del prodotto più idoneo  
a risolvere le diverse problematiche medico - chirurgiche.

Il **Vademecum** si rivolge al chirurgo e al tecnico ortopedico, al reumatologo,  
al medico sportivo, al podologo, al fisiatra, al tecnico della riabilitazione.

Alla ricerca della massima chiarezza e facilità di consultazione, nella stesura di questo prontuario  
abbiamo quasi sempre adottato il criterio della suddivisione topografica in distretti corporei.

Solo alcuni presidi sono stati invece raggruppati per classe di prodotto o indicazione.

“**Eumedica ha una missione:** migliorare la vita dei pazienti attraverso il recupero funzionale  
della menomazione, curando con il movimento secondo il metodo del bendaggio funzionale.”

Eumedica sostiene: **I BAMBINI DELLE FATE**  
per l'inclusione sociale

Pag.

<b>Intro Eumedica</b>	4
<b>Zero Impact</b>	 8
<b>Tabelle tecniche generali</b>	10
<b>Il collo</b>	20
<b>La spalla</b>	23
<b>Il gomito</b>	29
<b>Il polso e la mano</b>	30
<b>La colonna</b>	35
<b>Il ginocchio</b>	41
<b>La caviglia</b>	47
<b>Il piede</b>	 56
<b>Cicatrici ipertrofiche</b>	 86
<b>La mano</b>	88
<b>Antidecubito</b>	90
<b>Riabilitazione</b>	92
<b>Diabetologia</b>	97
<b>Eumedica Shoes</b>	99
<b>Materiali per protesi</b>	102
<b>Bendaggio e taping</b>	104
<b>Creme protezione mani e piedi</b>	 105
<b>Protezione della persona</b>	 109
<b>Zero Impact Active</b>	 113
<b>Push Sport</b>	 121
<b>Eumedica Active</b>	 127
<b>Tabelle misure</b>	134
<b>Materiali POP</b>	144

## Muoversi bene **per vivere meglio**

### Chi siamo:

Siamo un'azienda solida e dinamica che dal 1992 si dedica con passione alla ricerca di soluzioni medicali per lo **sport**, il **lavoro** e la **vita quotidiana**. Una **linea completa** di prodotti studiati per **proteggere** la zona di applicazione e risolvere disturbi legati all'apparato muscolo-scheletrico. **Praticità, comodità e massima durata** sono gli obiettivi che ricerchiamo in ogni soluzione.

### Cosa facciamo?

Curiamo attraverso il movimento, limitando le azioni scorrette delle articolazioni e consentendo la naturale attività. Rispondiamo alle richieste di pazienti e professionisti **per aiutarli ad affrontare in sicurezza e protezione ogni situazione della propria vita**.

### Scegliere Eumedica significa:

- affidarsi a **soluzioni** create in collaborazione con centri ospedalieri, cliniche, strutture private e i migliori tecnici ortopedici
- poter contare su **idee di nuova concezione**
- disporre di **prodotti costantemente aggiornati**, funzionali ed efficaci

SEDE EUMEDICA s.r.l. - Via della Meccanica, 8/10 | 35127 Padova

### Perché affidarsi a noi?

Curiamo la **gestione dell'aspetto commerciale** garantendo massima precisione, puntualità e la professionalità di un **Servizio Clienti** molto preparato che vi seguirà con attenzione e cortesia. Offriamo una **solida partnership tecnica** grazie a un team sempre presente composto da persone attente, precise, che sanno ascoltare le vostre esigenze e affiancarvi con competenza.

### Ci mettiamo in gioco

La **libertà di movimento inizia dal comfort**, che ci deve accompagnare in ogni passo della nostra giornata. Infortuni, dolori o fastidi, anche i più piccoli, possono condizionare il lavoro, l'attività sportiva o la vita di tutti i giorni. Ecco perché Eumedica **si mette in gioco** nella ricerca di soluzioni performanti per la cura della **salute fisica**, dedicando attenzione alla **qualità del movimento** in tutte le sue forme.

Tante idee, anche per lo stesso problema, capaci di soddisfare le esigenze più varie, con l'obiettivo di curare il **benessere** del corpo di tutti. **Muoversi bene significa vivere meglio** ed Eumedica lo sostiene con impegno.



## Scegliere Eumedica **significa:**

- Affidarsi a soluzioni create in collaborazione con centri ospedalieri, cliniche, strutture private e i migliori tecnici ortopedici
- Poter contare su idee di nuova concezione
- Disporre di prodotti costantemente aggiornati, funzionali ed efficaci

## NUOVA LEGENDA PER ORIENTARSI MEGLIO

DIVISIONE PER AREE CORPOREE

-  **Il collo**
-  **La spalla**
-  **Il gomito**
-  **Il polso e la mano**
-  **La colonna**
-  **Il ginocchio**
-  **La caviglia**
-  **Il piede**

DIVISIONE PRODOTTI SPECIFICI

-  **Cicatrici ipertrofiche**
-  **Protezione della persona**
-  **Antidecubito**
-  **Riabilitazione**
-  **Diabetologia**
-  **Eumedica Shoes**
-  **Materiali per protesi**
-  **Bendaggio e taping**

BRAND LINEA SPORT



## Le NOSTRE LINEE **prodotto**



**ZERO IMPACT,**  
la gamma di tutori studiata per sostenere la funzionalità delle articolazioni nella quotidianità, durante l'attività sportiva e nella riabilitazione.



**LINEA PIEDE,**  
prodotti specifici in morbido oleogel protettivo, pensati per prevenire o alleviare i disturbi più comuni legati ai piedi.



**EUSCAR,**  
la pomata ad azione emolliente e il patch in silicone ideati per il trattamento di cicatrici cutanee di ogni tipo. Prodotti specifici per la mano in morbido Oleo-gel, pensati per il trattamento delle cicatrici.



**ALEVIA,**  
creme protettive e lenitive per mani e piedi, a base di sostanze naturali funzionali ed estratti vegetali.



**UNIKA,**  
la linea dedicata al comfort degli sportivi e delle persone fisicamente attive.

Inoltre, Eumedica è distributore esclusivo italiano di **PUSH BRACES** e **PUSH SPORTS**, la gamma di tutori ortopedici e di tutori sportivi ultrasottili, che sostengono le articolazioni e garantiscono libertà di movimento.

**EUMEDICA®** DISTRIBUTORE UFFICIALE DI:





**PIÙ  
MOVIMENTO  
ALLA TUA VITA**

# UNA LINEA COMPLETA DI TUTORI PER DONARE SOLLIEVO ALLE ARTICOLAZIONI E RITROVARE IL PIACERE DI UNA VITA ATTIVA.



MEDX +

## USO RIABILITATIVO

I tutori ideati  
nelle riabilitazioni  
post-operatorie.



## USO QUOTIDIANO

I tutori adatti  
all'attività quotidiana.



## USO SPORTIVO

I tutori pensati  
per praticare sport.

**SCOPRI I PRODOTTI** nelle pagine successive

**LINEA SPORT** pagina 113

Tutti i dispositivi ZERO IMPACT offrono stabilità, sostengono il movimento nelle normali attività quotidiane e sportive, e favoriscono un rapido recupero nel decorso post-operatorio, assorbendo l'impatto causato da sovraccarichi. Ogni supporto è il risultato delle caratteristiche tecnico-strutturali dei materiali, che donano un effetto ammortizzante e aiutano a recuperare la funzionalità articolare.

# TABELLA TECNICA

## IL POLSO



	<b>Polsiera PUSH CARE</b>	<b>Polsiera PUSH MED</b>	<b>Tutore pollice PUSH ORTHO CMC</b>	<b>Ferula per polso PUSH MED SPLINT</b>	<b>Ultra fit lacci ZERO IMPACT</b>	<b>Ultra fit plus ZERO IMPACT</b>	<b>Tutore pollice PUSH SPORTS</b>	<b>Polsino PUSH SPORTS</b>	<b>Polsiera PUSH SPORTS</b>
<b>PAGINA</b>	30	30	31	31	32	32	122	123	123
<b>Prevenzione</b>	•			•			•	•	•
<b>Strappi / Tendiniti</b>	•	•		•	•	•	•	•	•
<b>Tunnel carpale</b>	•			•					
<b>Trattamento secondario post frattura</b>		•			•	•			
<b>Tutore per la rizoartrosi del pollice</b>			•						
<b>Artrosi / Artrite</b>	•	•	•	•	•	•			
<b>Distorsioni</b>		•		•	•	•			
<b>Tendinite De Quervain</b>						•			
<b>Iperestensione MCP-1 Pollice sciatore</b>							•		

# TABELLA TECNICA

## LA COLONNA



Tutore lombare  
PUSH CARE

Tutore lombare  
PUSH MED

Tutore lombare  
ZERO IMPACT

Tutore lombare  
Ortho Nero  
ZERO IMPACT

Tutore lombare  
Ortho  
ZERO IMPACT ACTIVE

Corsetto lombare  
Tigges K/N uomo  
ZERO IMPACT

Corsetto lombare  
Tigges K/N donna  
ZERO IMPACT

Corsetto lombare  
Tigges unisex  
ZERO IMPACT



	37	37	36	36	117	39	39	40
<b>PAGINA</b>								
Prevenzione	•		•	•				•
Lombalgia	•		•	•	•	•	•	•
Lombosciatalgia	•				•	•	•	•
Spondilolisi		•						
Spondilolistesi		•						
Artrosi		•			•	•	•	
Discopatia		•	•		•	•	•	
Trattamento postoperatorio		•						
Fratture su base osteoporotica		•						

# TABELLA TECNICA

## IL GINOCCHIO



MEDX +

ACTIVE



	Ginocchiera PUSH CARE	Ginocchiera PUSH MED	Supporto rotuleo PUSH MED	Ginocchiera EUSPLINT	Ginocchiera POSTOPERATORIA	Ginocchiera SPORTIVA KFS ZERO IMPACT ACTIVE	Tutore ROTULEO ZERO IMPACT ACTIVE	Ginocchiera BAMBU ZERO IMPACT ACTIVE	Ginocchiera rinforzata BAMBU ZERO IMPACT ACTIVE	Cinturino rotuleo PUSH SPORTS	Ginocchiera PUSH SPORTS	Ginocchiera EU - CONT ZERO IMPACT	Ginocchiera rinforzata EU - CONT ZERO IMPACT	Ginocchiera SYLICON EU - CONT ZERO IMPACT
<b>PAGINA</b>	42	43	43	44	45	114	115	119	119	126	126	46	46	46
Distorsioni da lievi a moderate	•							•	•		•	•	•	•
Meniscopatie	•								•					•
Artrosi e artrite	•	•						•	•			•	•	•
Post artroscopia	•								•					•
Instabilità articolare	•	•				•								
Trattamento secondario post chirurgia dei legamenti		•												
Gonalgia da alterato tracking rotuleo						•								
Sublussazione della rotula							•							
Sindrome femoro rotulea	•		•				•	•	•	•	•	•		•
Lesioni/riparazioni di tutti i legamenti del ginocchio			•	•	•									
Riparazioni osteocondrali, suture meniscali, fratture del piatto tibiale, fratture condiliche, osteotomie tibiali prossimali				•	•									
Ricostruzioni del tendine rotuleo e del tendine quadricipitale				•	•									
Strappi muscolari e distorsioni del ginocchio				•	•									
Artrosi mono-compartmentale del ginocchio di grado da lieve a moderato						•								
Ginocchio del saldatore			•							•				
Morbo di Osgrood-Schlatter														
Runner's Knee							•							

# TABELLA TECNICA LA CAVIGLIA



Cavigliera PUSH CARE	Cavigliera PUSH MED	Tutore PUSH MED AEQUI FLEX	Tutore PUSH ORTHO AEQUI	Cavigliera ZERO IMPACT MARATHON MEMORY	Cavigliera ZERO IMPACT MARATHON AIR	Cavigliera ZERO IMPACT MARATHON AIR LITE	Cavigliera ASO ANKLE STABILIZER	Cavigliera PUSH ORTHO Aequi Junior	Cavigliera EU - CONT ZERO IMPACT	Tutore Caviglia ZERO IMPACT ACTIVE	Cavigliera BAMBÙ ZERO IMPACT ACTIVE	Cavigliera a "8" PUSH SPORTS	Cavigliera KICX PUSH SPORTS
-------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	-----------------------------------



PAGINA	48	49	48	49	51	51	51	52	53	47	116	120	124	125
Compressione	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
Sostegno meccanico	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
Lieve instabilità	●									●	●	●	●	●
Lieve distorsione	●									●	●	●	●	●
Moderata instabilità								●	●					●
Grave instabilità			●	●				●	●					
Terapia conservativa dopo lesione ai legamenti		●	●	●	●	●	●	●	●					
Terapia post-traumatica i legamenti con edema			●			●	●							
Osteoartrite con instabilità		●	●	●	●			●	●					
Prevenzione lesioni ai legamenti		●	●	●	●			●	●					

# TABELLA TECNICA I PLANTARI

**+EUMEDICA®**



PAGINA	78	79	81	81	84	84	85	82	82	83	83	80	81
Metatarsalgia	•	•	•	•								•	•
Plantalgia		•	•	•	•	•	•						
Talalgia			•	•	•	•	•	•		•	•		
Spina calcaneare					•				•	•	•		
Piede diabetico					•	•							
Micosi (piede d'atleta)					•	•							
Tendinite						•				•			
Pronazione			•	•		•	•						
Piede piatto							•						
Fascite plantare			•	•		•				•	•		
Alluce valgo												•	



## IL COLLO



### IL COLLO NEL CORPO UMANO È UNA PARTE DOTATA DI GRANDE MOBILITÀ.

Lo scheletro nel collo è rappresentato dal settore cervicale della colonna, composto da 7 vertebre e dall'osso ioide, in posizione anteriore.

Nel collo hanno sede organi vitali che possono essere danneggiati gravemente da traumi di vario genere, tra questi uno molto frequente è il cosiddetto "colpo di frusta" conseguenza di un tamponamento in automobile.

Il collo, inoltre, può essere dolorante a causa di cattiva postura, specie di notte, o di artrosi cervicale.

È quindi importante disporre, in caso di bisogno, di sostegni conformati anatomicamente, funzionali, leggeri e traspiranti il cui uso sia confortevole ed efficace.



#### Collare Cervicale PUSH Care

Conformazione anatomica con bordi arrotondati. Sostegno funzionale del rachide cervicale. Tessuto in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Adatto all'utilizzo sia durante il giorno che la notte.

**Indicazioni:** cervicalgia lieve o moderata su base infiammatoria e post-traumatica, forme minori di artrosi cervicale.

Misure 1, 2  
Codice PC1601CO (h 8 cm)  
PC1602CO (h 10 cm)

Tab. misure pag. 136



#### Collare Cervicale PUSH Med

Conformato anatomicamente, con bordi arrotondati. Rinforzo con elevato grado di sostegno, in spugna sintetica semirigida. Tessuto in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Il rinforzo è amovibile durante le ore notturne oppure nelle fasi avanzate del trattamento. L'incavo in corrispondenza del pomo d'Adamo migliora molto il comfort.

**Indicazioni:** colpo di frusta cervicale, stadi avanzati dell'artrosi cervicale, cervico-brachialgia, discopatia, ernia del disco cervicale, trattamento postoperatorio.

Misure 1, 2  
Codice PM2601CO (h 8 cm)  
PM2602CO (h 10 cm)

Tab. misure pag. 136



## IL COLLO

### Collare EUSOFT

Collare ortopedico in poliuretano morbido chiusura regolabile in velcro.

**Indicazioni:** cervicalgie artrosiche e infiammatorie, distorsioni cervicali lievi.

Misure **S, M, L** Tab. misure pag. 136  
Codice **EU 008E** (h 8 cm)  
**EU 010E** (h 10 cm)

### Collare EUSOFT Rinforzato

Collare morbido in poliuretano rivestito in cotone con sostegno interno, chiusura regolabile in velcro.

**Indicazioni:** distorsioni cervicali, cervicobrachialgie, artrosi cervicali.

Misure **S, M, L** Tab. misure pag. 136  
Codice **EU 8 E** (h 8 cm)  
**EU 10 E** (h 10 cm)

### Collare EULIGHT

Collare ortopedico in polietilene tipo "Shanz". Rigido ma leggero. Traspirante, regolabile in altezza, chiusura in velcro.

**Indicazioni:** distorsione cervicale, "colpo di frusta", artrosi cervicale.

Misure **S, M, L** Tab. misure pag. 136  
Codice **EU 007**



## SCAPOLA, OMEROS E CLAVICOLA SONO LE TRE OSSA CHE FORMANO LA SPALLA.

Esse sono collegate insieme da un sistema di tendini e muscoli. Le patologie più comuni di questa articolazione, causate generalmente dall'età o dall'esecuzione di alcuni movimenti violenti e ripetuti sono: contusioni, distorsioni, fratture. Un valido aiuto nella cura dei vari traumi è costituito dai bendaggi e tutori qui presentati.



### Reggibraccio

Reggibraccio in tessuto - Fibbia regolabile. Mantiene comodamente l'arto superiore sospeso al collo.

**Indicazioni:** traumi e algie dell'arto superiore, postumi di emiplegia, riabilitazione.

Misure **Unica**  
Codice **EU 001**



### Reggibraccio aereo

Reggibraccio in tessuto traforato: massima leggerezza e traspirazione. Regolabile.

**Indicazioni:** traumi e algie dell'arto superiore, postumi di emiplegia, riabilitazione.

Misure **Unica**  
Codice **EU 012**

## LA SPALLA

### Bendaggio tipo VELPEAU

Immobilizza il braccio in abduzione contro il torace. Sostituisce la fasciatura alla Désault. Non ostacola l'igiene personale del paziente.

**Indicazioni:** lussazione scapolo-omeroale, fratture del collo dell'omero, trattamento postoperatorio (osteosintesi, acromioplastica).

Misure **Unica**  
Codice **EU 003** reggibraccio sintetico nero



### Bendaggio S. O. Band

Bendaggio preconfezionato e pronto all'uso per l'immobilizzazione della spalla e dell'arto superiore. L'alternativa ai bendaggi di Désault, di Gilchrist e di Velpeau sia nel pronto soccorso (fratture e lussazioni) che nel postoperatorio (fratture, lussazioni e lesioni della cuffia dei rotatori). Semplice da applicare, economico, leggero, igienico, sicuro. S.O. BAND si applica in maniera semplice, veloce e atraumatica per il paziente. Non provoca compressioni e garantisce una fissazione assolutamente stabile, senza limitare il comfort del malato. Consente l'ispezione della parte lesionata senza essere rimosso.

**Indicazioni:** contusioni, distorsioni, fratture e lussazioni della scapolo-omeroale, lesioni della cuffia dei rotatori, frattura dell'omero prossimale, immobilizzazione postoperatoria (osteosintesi, capsulorrafia, riparazione della cuffia).

Misure **S** cm 190  
**M** cm 230  
**L** cm 280  
**XL** cm 320

Codice **EU 015**

Per determinare la misura del tutore, passare il metro sul paziente come se si stesse indossando il tutore stesso.



## LA SPALLA

### Bendaggio per frattura di clavicola

Il bendaggio "a otto" mantiene retroposte le spalle, determinando la riduzione della frattura della clavicola. Costituito in schiuma poliuretanic ricoperta di maglia di cotone.

**Indicazioni:** frattura della clavicola.

Misure **XS** (L 92 cm)  
**S** (L 100 cm)  
**M** (L 110 cm)  
**L** (L 120cm)  
**XL** (L 130 cm)

Codice **EU 004**



Per determinare la misura del tutore, passare il metro sul paziente come se si stesse indossando il tutore stesso.



## LA SPALLA

### A-C Band - Bendaggio per l'articolazione acromion-claveare

Tutore specifico per il trattamento conservativo dei traumi che provocano la separazione dell'articolazione acromion-claveare. Permette di ridurre e mantenere ridotta l'articolazione, ripristinando il contatto fisiologico tra l'acromion e la clavicola.

**Indicazioni:** distorsioni, lussazioni e sublussazioni dell'articolazione acromion-claveare.

Misure **S, M, L**  
Versioni **Destra e Sinistra**  
Codice **EU 045**

Tab. misure pag. 136



### EUFIX-SO - Stabilizzatore di spalla

Progettato per offrire sostegno e protezione alla spalla di chi pratica sport, in particolare quelli di contatto. Utilissimo nella prevenzione dell'instabilità gleno-omerale e delle patologie della cuffia dei rotatori. Il suo meccanismo d'azione risiede nel controllo e nella limitazione selettiva del movimento che sarebbe rischioso o doloroso per l'atleta. Stabilizza, limita e assiste il movimento della spalla in accordo con le necessità specifiche di ogni singolo atleta. Con la limitazione controllata del movimento, è garantita la naturale funzione articolare e muscolare.

**Indicazioni:** sindromi dolorose della cuffia dei rotatori ("impingement" sottoacromiale, tendinite del capo lungo del bicipite, borsite, lesione parziale della cuffia), instabilità dell'articolazione scapolo-omerale (sublussazione/lussazione recidivante, lesione del cercone glenoideo), esiti di lesioni traumatiche della spalla.

Misure **S, M, L, XL**  
Versioni **Destra e Sinistra**  
Codice **EU 044**

Tab. misure pag. 136



## LA SPALLA

### EUREVERSE Tutore per abduzione della spalla

Tutore per abduzione della spalla con cuscino di sostegno in poliuretano rivestito in morbido tessuto, stecca rigida di sostegno polso e mano. Possibilità di scelta del grado di abduzione: a 15° oppure a 45°/65°. Igienico e comodo. Favorisce il trattamento riabilitativo. Evita la messa in tensione delle strutture riparate chirurgicamente.

**Indicazioni:** rottura della cuffia dei rotatori, artroprotesi di spalla, frattura della testa e del collo dell'omero, frattura del trochite omerale.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU 032 abduzione 15°**



### Tutore per abduzione della spalla a 45°/65°

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU 031 abduzione 45°/65°**

Tutore per abduzione della spalla a 45°



Tutore per abduzione della spalla a 65°



## LA SPALLA



RIABILITAZIONE

### Tutore di spalla per emiplegici

Sostiene l'arto superiore colpito da emiplegia e si oppone alla discesa della testa omerale, mantenendo i capi articolari della spalla congruenti. Leggero, ben tollerato, economico. Si applica e si rimuove facilmente per consentire le cure riabilitative.

**Indicazioni:** emiplegia e suoi esiti, "spalla paralitica".

Misure **XS, S/M, L/XL**  
Codice **EU 013**

Tab. misure pag. 136



## IL GOMITO È L'ARTICOLAZIONE CHE UNISCE IL BRACCIO CON L'AVAMBRACCIO ATTRAVERSO DUE MOVIMENTI: FLESSIONE ED ESTENSIONE.

Il gomito è particolarmente esposto alle patologie traumatiche, degenerative e infiammatorie.

### Gomitiera PUSH MED

Guaina compressiva. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Stecche di rinforzo flessibili per dirigere la flessione-estensione del gomito. Limitazione dell'estensione mediante due cinghie regolabili. Zone di comfort attorno alle aree più esposte. Aderenza perfetta, inserti in silicone anti-scivolamento. Applicabile facilmente con una mano sola.

**Indicazioni:** impingement da iperestensione del gomito, postumi di fratture o lussazioni, artrosi.

Misure **1, 2, 3, 4, 5**  
Codice **PM2702GO**

Tab. misure pag. 138



### Tutore per spalla PUSH MED

Immobilizzazione efficace di braccio e avambraccio, lasciando liberi la spalla e il collo. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. La cinghia toracica blocca il braccio in adduzione, una seconda cinghia blocca il polso e impedisce le rotazioni, una terza cinghia più piccola sostiene la mano all'altezza dei metacarpi.

**Indicazioni:** lussazioni e sublussazioni della spalla, frattura del collo dell'omero, lesioni dell'articolazione acromion-claveare, trattamento postoperatorio.

Misure **1, 2, 3**  
Codice **PM2503TS**

Tab. misure pag. 136



### Tutore per epicondilite EPI PUSH MED

Allevia il dolore al gomito mediante una pressione localizzata sugli estensori (gomito del tennista) o sui flessori del polso (gomito del golfista). Cuscinetto viscoelastico anti-scivolamento, anatomico. Copertura rigida per distribuire le forze esercitate dalla cinghia anelastica. Perfettamente tollerato, non ostacola le comuni attività quotidiane. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.

**Indicazioni:** epicondilite (gomito del tennista), epitrocleite (gomito del golfista)

Misure **Unica**  
Codice **PM2701GO**





## IL POLSO È LA REGIONE STRETTA E FLESSIBILE CHE DIVIDE LA MANO DALL'AVAMBRACCIO.

È formato da una fila di piccole ossa chiamate carpo e da una sorta di cerniera malleabile. Pollice dello sciatore, rizartriosi, morbo di Quervain, sindrome del tunnel carpale sono le malattie più comuni che colpiscono il polso. Ognuna di queste si può risolvere con l'aiuto del tutore adatto allo scopo.



### Polsiera PUSH Care

Compressione regolabile attorno al polso. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Migliora la sensazione di stabilità senza intralciare le attività quotidiane.

**Indicazioni:** lievi distorsioni e instabilità del polso, strappi e tendiniti di grado lieve, forme iniziali di artrosi e artrite.

Misure 1, 2, 3, 4  
Codice PC11012P DX  
PC11011P SX

Tab. misure pag. 138



### Polsiera PUSH Med

Doppio supporto del polso (dorsale e palmare) con stecche di forma anatomica modellabili. Compressione regolabile. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Ampio range di applicazioni: dalla fase acuta a quella riabilitativa. Si indossa facilmente con una mano sola. Non intralcia la funzione delle dita.

**Indicazioni:** distorsioni del polso da moderate a gravi, strappi e tendiniti, trattamento secondario di fratture del polso, artrosi.

Misure 1, 2, 3, 4  
Codice PM21012P DX  
PM21011P SX

Tab. misure pag. 138



## IL POLSO E LA MANO

### PUSH ORTHO CMC

#### Tutore dinamico per la rizoartrosi

Il supporto CMC dà sostegno al pollice quando è presente un'inflammazione o lesione dell'articolazione trapezio-metacarpale, specificamente progettato per il trattamento dell'artrosi trapezio-metacarpale, o rizoartrosi. Il tutore **PUSH Ortho CMC** mantiene il 1° metacarpo in posizione funzionale, con il pollice in opposizione. Esso stabilizza l'articolazione trapezio-metacarpale, lasciando completamente liberi sia il polso che l'articolazione metacarpo-falangea del pollice. Il nuovo prodotto si fonda sul principio della stabilizzazione attraverso la creazione di un **ambiente pseudo-idraulico**, mutuato dai principi del trattamento funzionale delle fratture di Sarmiento. In questo modo si ottiene, in conseguenza della stabilizzazione articolare, anche un efficace controllo del dolore. Il secondo principio fondante consiste nel **mantenimento della funzione**. Il pollice viene posto in posizione funzionale, le articolazioni vicine vengono lasciate libere e il dolore viene controllato: tutto ciò concorre ad aumentare l'utilizzo della mano nelle funzioni della vita quotidiana e a rallentare la progressione della malattia.

**Indicazioni:** trattamento conservativo di tutti gli stadi della malattia (Stadi I, II, III e IV), trattamento postoperatorio dopo artroplastica della trapezio-metacarpica, contrastare l'instabilità cronica della trapezio-metacarpica.

Misure 1, 2, 3  
Codice P031012CMC - DX  
P031011CMC - SX

Tab. misure pag. 138



### Ferula per polso PUSH Med Splint

Elevato grado di sostegno e protezione del polso. Stecche conformate anatomicamente. Compressione regolabile. Zone di comfort imbottite. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Si indossa facilmente con una mano sola. È utilizzabile sia di giorno che di notte.

**Indicazioni:** sindrome del tunnel carpale, strappi e tendiniti degli estensori resistenti alle terapie, disturbi dell'artrosi e dell'artrite reumatoide da moderati a gravi.

Misure 1, 2, 3, 4  
Codice PM21022PS DX  
PM21021PS SX

Tab. misure pag. 138

## IL POLSO E LA MANO

### ULTRA FIT LACCI Polsiera funzionale



Supporto funzionale per il polso traforato: traspirante e confortevole. Sistema di chiusura facilitato, a lacci con unico tirante: si chiude con una sola mano. Profilo speciale al palmo della mano: nessuna limitazione ai movimenti delle dita. Stecche modellabili: una dorsale e una palmare. Lunghezza polsiera cm 25.

**Indicazioni:** Artrosi, artrite reumatoide, tenosinoviti, distorsioni, trattamento secondario delle fratture del polso.

**Scelta della misura:** misurare la circonferenza del polso, nel punto dove esso è più largo.

Misure **S, M, L, XL** Tab. misure pag. 138  
Codice **EU0702 Destra**  
**EU0701 Sinistra**

Lunghezza polsiera: cm 25

Misure **S, M, L, XL** Tab. misure pag. 138  
Codice **EU0802 Destra**  
**EU0801 Sinistra**

Lunghezza polsiera: cm 19

### ULTRA FIT PLUS



Struttura di schiuma. Chiusure in velcro. Stecca palmare modellabile e removibile. Stecca modellabile per il pollice. Colore Nero. Sostegno combinato del polso e del pollice, efficace e confortevole. Mobilità completa delle altre dita. Allacciatura del pollice regolabile. Lunghezza della polsiera cm 25.

**Indicazioni:** strappi e distorsioni del pollice e del polso, tendinite di De Quervain, artrosi e artrite del polso e del pollice, rizartriosi, dopo rimozione di ingessature, postumi di frattura dello scafoide carpale e del pollice.

Misure **S, M, L, XL** Tab. misure pag. 138  
Codice **EU0602 DX**  
**EU0601 SX**

## LE SOLUZIONI IDEALI PER LA CURA DELLA MANO CON UNA LINEA COMPLETA DI PRODOTTI SPECIFICI.

Le mani sono, insieme alla vista, strumento principale di contatto con il mondo esterno e sono il nostro lasciapassare per la vita di tutti i giorni: grazie alle mani possiamo lavorare, giocare, creare, scrivere. Per questo è importante prendersene cura con dispositivi appositamente creati, flessibili, duttili, efficaci, sia quando sono del tutto efficienti e in salute che quando sono affaticate ad esempio da particolari stress lavorativi. Ma anche in caso di infortunio o di intervento. La cura della mano parte dalle attenzioni per la cute, con creme idratanti e nutritive, e passa per il trattamento delle cicatrici dopo interventi chirurgici dovuti alle patologie più comuni, e contempla anche la fase riabilitativa dell'immediato periodo post-operatorio.



**OLEO  
GEL**

### L'OLEO-GEL e i suoi benefici

Grazie alle sue proprietà chimico-fisiche, il nostro gel è la sostanza ideale per ricoprire e proteggere la cute di ogni parte del corpo. È in grado di adattarsi perfettamente alle forme e alle sporgenze. È un ottimo ammortizzatore delle pressioni e dissipatore degli attriti. Il microclima che si crea tra l'oleogel e la cute aiuta la stessa a mantenersi più morbida ed elastica, alleviando così il dolore dove screpolature e lesioni fossero già presenti.




interno in  
**OLEO  
GEL**

### CARPAL GEL SLEEVE Cuscinetto in Oleo-gel

Misure **S/M DX/SX, L DX/SX**  
Codice **S1012 SM - Donna**  
**S1012 L - Uomo**

Dettagli a pagina 88

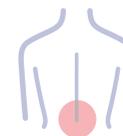

interno in  
**OLEO  
GEL**



## HAND DIGITUBE Tubolare con gel ritagliabile

Misure **S, L**  
Codice **EU047F**      Dettagli a pagina 88

interno in  
**OLEO  
GEL**



## HAND DIGITAL CAP Guaina digitale

Misure **S, L**  
Codice **EU048F**      Dettagli a pagina 88

**OLEO  
GEL**



## HAND EUCAP Cappuccio in oleo-gel per le dita

Misure **Unica**  
Codice **EU049F**      Dettagli a pagina 89

**OLEO  
GEL**



## HAND GEL SPREADER LOOP Divaricatore con doppio anello di fissaggio

Misure **Unica**  
Codice **EU050F**      Dettagli a pagina 89

**OLEO  
GEL**



## HAND MULTI PROTECTION Cuscinetto protettivo in gel autoaderente

Misure **Unica - 8 x 7 cm**  
Codice **EU051F**      Dettagli a pagina 89

## LA COLONNA VERTEBRALE A RAGIONE PUÒ ESSERE DEFINITA COME L'ALBERO DELLA NOSTRA VITA.

È una complessa struttura ossea, disco-legamentosa e muscolare che unisce in sé caratteristiche peculiari contrapposte come la **STABILITÀ** e la **MOBILITÀ**.

Sono due concetti che non troverebbero un comune denominatore, ma che invece nella colonna vertebrale coesistono. E ciò è reso possibile dalla sovrapposizione di elementi ossei (le vertebre) e strutture visco-elastiche (i dischi intervertebrali) amalgamati e controllati da legamenti e muscoli.



- 1** Cervicale 7 vertebre
- 2** Dorsale 12 vertebre
- 3** Lombare 5 vertebre
- 4** Sacrale 5 vertebre





## COLONNA VERTEBRALE

### TUTORE LOMBARE

Studiato per le attività lavorative. Costruito in tessuto elasticizzato, sostiene efficacemente la zona lombare e alleggerisce gli stress sugli ultimi dischi. Dotato di sistema "criss cross" e stecche posteriori. Chiusura in velcro anteriore regolabile.

**Indicazioni:** lombalgia, discopatia

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU034**

Tab. misure pag. 137



### TUTORE LOMBARE ORTHO NERO ZERO IMPACT

In tessuto elasticizzato morbido e altamente traspirante, è dotato di fasce elastiche aggiuntive che consentono una regolazione ottimale della compressione, e rinforzi di supporto verticali che lo rendono particolarmente efficace. Chiusura anteriore regolabile.

**Indicazioni:** destinato a chi svolge attività lavorative che sottopongono la regione lombare a particolari stress. Ideale come prevenzione per chi soffre di frequenti lombalgie o di lombalgia cronica.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU046N**

Tab. misure pag. 137



### TUTORE LOMBARE ORTHO SPORT

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU057**

Dettagli a pagina 117



## COLONNA VERTEBRALE

### Tutore lombare PUSH Care

Allevia dal dolore degli strappi muscolari nelle attività di tutti i giorni. Compressione uniformemente distribuita sui muscoli della regione lombare. Conformazione anatomica. Cuscinetto regolabile e chiusure in velcro con maniglie. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Adatto a ogni tipo di corporatura, maschile e femminile.

**Indicazioni:** disturbi cronici aspecifici della regione lombo-sacrale, sciatica, prevenzione degli strappi muscolari lombari.

Misure **1, 2, 3, 4, 5, 6**  
Codice **PC1401TL**

Tab. misure pag. 137



### Tutore lombare PUSH Med

Sostegno di grado elevato della colonna, dal tratto dorsale inferiore alle prime vertebre sacrali (D8-S2). Conformazione anatomica, non ostacola la posizione seduta. Compressione regolabile. Stecche metalliche preformate, regolabili. Correzione posturale della colonna lombare. Aderenza e vestibilità ottimali. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.

**Indicazioni:** spondilolisi e spondilolistesi, artrosi e discopatia, trattamento postoperatorio, fratture da compressione su base osteoporotica.



Misure **1, 2, 3, 4, 5, 6**  
Codice **PM2402TL**

Tab. misure pag. 137



## IL SISTEMA TIGGES

### TIGGES CORSETTO LOMBARE

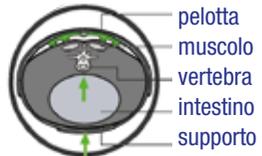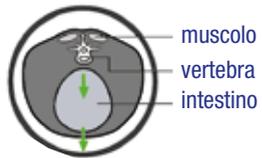

Il Sistema TIGGES allevia la contrattura muscolare ripristinando la normale pressione mediante il supporto elastico e sostenendo la colonna con la pelotta flessibile.

#### Supporti lombari funzionali dinamici

##### IL TUTORE LOMBARE CON PELOTTA SEGMENTATA FLESSIBILE MODULAZIONE DELLA TERAPIA CON TRAINING PROGRESSIVO IN 1 FASE

Nel campo dei disturbi della colonna lombare, i sostegni lombari TIGGES rappresentano un vero e proprio sistema di trattamento a sé.

La gamma dei prodotti è sufficientemente ampia da garantire la perfetta aderenza (e così il perfetto sostegno vertebrale) a ogni tipo di corporatura: femminile o maschile, normale, robusta o minuta.

Il rivoluzionario Sistema TIGGES si fonda sul principio del trattamento funzionale: **supporto dinamico**, riequilibrio delle forze in gioco sulla colonna vertebrale, spostamento attivo del baricentro del corpo mediante la compressione e l'elevazione dell'addome. In questo modo viene evitata ogni limitazione di movimento della colonna e il paziente avverte immediatamente i benefici della correzione attiva della postura.

Il sistema sfrutta l'azione sinergica della fascia elastica a elevata compressione e della pelotta a elementi flessibili articolati: il risultato è un sostegno dinamico, senza inutili e dannose limitazioni, con un costante massaggio della muscolatura paravertebrale.

#### Doppia pelotta in dotazione Uomo



#### Doppia pelotta in dotazione Donna



## CORSETTO LOMBARE

### TIGGES K/N UOMO

#### Modulazione della terapia in base alle fasi della sintomatologia



Misure XS, S, M, L, XL  
Codice TO100

Tab. misure pag. 137

Corsetto lombare funzionale con **doppia pelotta dinamica segmentata**. Oltre alla **pelotta standard** viene fornita una **pelotta più sottile** e utilizzata per le fasi di iniziale remissione dei sintomi (dopo un accesso acuto che si è giovato della pelotta più sostenuta), oppure nella prevenzione di recidive della lombalgia (nelle fasi di relativo benessere tra un accesso doloroso e l'altro). Apertura e chiusura a strappo. Le bande di chiusura in velcro permettono di regolare con precisione la compressione che si vuole esercitare. Modello basso, adatto ai soggetti particolarmente attivi.

**Indicazioni:** lombalgia e lombosciatalgia su base posturale, protrusione ed ernia discale, artrosi e discopatia lombo-sacrale.

### TIGGES K/N DONNA

#### Modulazione della terapia in base alle fasi della sintomatologia



Misure XS, S, M, L, XL  
Codice TO101

Tab. misure pag. 137

Corsetto lombare funzionale con **doppia pelotta dinamica segmentata**. Oltre alla pelotta standard viene fornita una pelotta più sottile e utilizzata per le fasi di iniziale remissione dei sintomi (dopo un accesso acuto che si è giovato della pelotta più sostenuta), oppure nella prevenzione di recidive della lombalgia (nelle fasi di relativo benessere tra un accesso doloroso e l'altro). Apertura e chiusura a strappo. Le bande di chiusura in velcro permettono di regolare con precisione la compressione che si vuole esercitare. Modello basso, adatto per i soggetti particolarmente attivi.

**Indicazioni:** lombalgia e lombosciatalgia su base posturale, protrusione ed ernia discale, artrosi e discopatia lombo-sacrale.

## CORSETTO LOMBARE

### TIGGES UNISEX

**Corsetto lombare dinamico con pelotta segmentata flessibile**

Corsetto lombare funzionale con pelotta dinamica segmentata più sottile e leggera. Apertura e chiusura a strappo. Le bande di chiusura in velcro permettono di regolare con precisione la compressione che si vuole esercitare. Modello universale.

**Indicazioni:** lombalgia da sforzo, attività lavorative pesanti, artrosi e discopatia lombo-sacrale.

Misure **XS, S, M, L, XL**  
Codice **TO103**

Tab. misure pag. 137



## L'ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO È FORMATA DA DUE OSSA, IL FEMORE E LA TIBIA.

**Partecipa all'articolazione anteriore anche la rotula. Un quarto osso sottile posto lateralmente alla tibia (perone) completa l'articolazione.**

Tutte le superfici articolari sono rivestite di cartilagine. Ulteriore protezione dai traumi e usura deriva dalla presenza di due menischi, che funzionano come cuscinetti ammortizzatori. Il ginocchio viene inoltre stabilizzato da quattro robusti legamenti: due laterali e due interni. Proprio per la presenza di numerose strutture anatomiche, i processi patologici a carico del ginocchio sono numerosi.



### SISTEMA TIGGES



STRUTTURA A SEGMENTI ARTICOLATI FRA LORO E DISPOSTI "A PONTE" DELLA COLONNA

## CORSETTO LOMBARE



## IL GINOCCHIO

### Ginocchiera PUSH Care

Rinnovata e migliorata:

- efficace supporto della rotula
- facile da aprire e da indossare
- gamma più ampia di misure per la coscia

Sollievo della cartilagine femoro-rotulea mediante il supporto stabilizzatore a ferro di cavallo, senza pressione indesiderata sul tendine rotuleo.

Materiali elasticizzati di alta qualità.

Facile da indossare e da allacciare.

Compressione uniforme e regolabile.

Aderenza anatomica e inserti in silicone anti-scivolamento.

**Indicazioni:** Distorsioni del ginocchio lievi e moderate, meniscopatie, sindrome femororotulea, artrosi e artrite del ginocchio, instabilità residua del ginocchio, dopo interventi sui menischi e sulla cartilagine del ginocchio (artroscopia).

Misure 1, 2, 3, 4, 5  
Versione Ambidestra  
Codice PC1302G

Tab. misure pag. 138



## IL GINOCCHIO

### Ginocchiera PUSH Med

Stabilizzazione mediante snodi speciali a balestra: accompagnano la naturale flessione-estensione del ginocchio senza limitarla, neutralizzano completamente le sollecitazioni medio-laterali. Gli inserti anti-scivolamento in silicone stimolano la propriocezione.

Due cinghie stabilizzatrici oblique controllano gli snodi e tengono in posizione la ginocchiera. Una sola cinghia circolare alla coscia, poplite completamente libero. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.

**Indicazioni:** artrosi e artrite reumatoide con sinovite, instabilità articolare, trattamento secondario dopo chirurgia dei legamenti del ginocchio.

Misure 1, 2, 3, 4, 5  
Versione Ambidestra  
Codice PM2301G

Tab. misure pag. 138



### Supporto rotuleo PUSH Med

Sostiene la rotula e riduce le forze di trazione sul tendine. Stimola la propriocezione attraverso una pressione localizzata. Cuscinetto viscoelastico anti-scivolamento, anatomico. Copertura rigida per distribuire le forze esercitate dalla cinghia anelastica. Sottile, con tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.

**Indicazioni:** sindrome femoro-rotulea, "Jumper's knee" (ginocchio del saltatore), tendinite rotulea, morbo di Osgood-Schlatter, sublussazione/ipermobilità della sindesmosi tibio-peroneale prossimale.

Misure Unica  
Versione Ambidestra  
Codice PM2302PA

## IL GINOCCHIO

### Ginocchiera EUSPLINT

Stecca immobilizzatrice per ginocchio in tessuto stratificato soffice e confortevole. Apertura anteriore, chiusure regolabili in velcro. Per la tutela del ginocchio, in sostituzione del gesso. Munita di due stecche laterali e una posteriore.

**Indicazioni:** trattamento postoperatorio - immobilizzazione temporanea.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU 00650** (lunghezza cm 60)



## IL GINOCCHIO

### Ginocchiera TELESCOPICA POSTOPERATORIA Zero Impact

La ginocchiera postoperatoria Zero Impact contribuisce al ripristino della normale funzionalità del ginocchio o consente un prolungato periodo di riabilitazione.

La struttura in lega di alluminio è resistente al carico ma anche duttile per essere adattata alle singole esigenze: è possibile regolare la lunghezza della stecca premendo l'apposito tasto per scegliere la lunghezza desiderata. La stabilizzazione del ginocchio è data dalle quattro fasce di fissaggio. Regolazione bilaterale della flessione-estensione: flessione 0°-120°, estensione 0°-90°. Una volta scelto il grado di flessione/estensione è possibile bloccare l'impostazione premendo il tasto giallo verso il basso.

#### Indicazioni:

1. Trattamento conservativo dell'instabilità conseguente a protesi di ginocchio
2. Lacerazione del legamento crociato anteriore e posteriore (LCA+LCP), lesione dei legamenti collaterali (LCM e LCL)
3. Trattamento riparativo a seguito di frattura del ginocchio, della rotula, lussazione, sublussazione, lesione del menisco, contrattura, artrosi, iperestensione del ginocchio, ecc.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU059**



### Ginocchiera Sportiva KFS

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU0800**

Dettagli a pagina 114



### Tutore ROTULEO

Misure **S, M, L**  
Codice **EU056**

Dettagli a pagina 115





## IL GINOCCHIO

### Ginocchiera EU-CONT®

Calza perfettamente grazie anche a un allungamento longitudinale che impedisce lo scivolamento della ginocchiera. La parte centrale elastica si adatta in modo anatomicamente ottimale quando si flette il ginocchio. Priva di cuciture, è ideata per esercitare una forte compressione.

**Indicazioni:**

distorsioni, contusioni, artrosi, artrosinovite.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU0400**

**EU-CONT**

Tab. misure pag. 138

### Ginocchiera RINFORZATA - EU-CONT®

Guaina di maglia elasticizzata ideata per esercitare una compressione; rinforzata da 2 stecche flessibili laterali.

**Indicazioni:** distorsioni, lesioni legamentose dei collaterali, strappi muscolari.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU0410**

**EU-CONT**

Tab. misure pag. 138

### Ginocchiera SYLICON - EU-CONT®

Guaina di maglia elasticizzata con inserto in silicone per il sostegno e la contenzione della rotula. L'anello integrato di silicone produce una compressione e un massaggio benefico delle parti molli dell'articolazione. È presente una stecca su ogni lato.

**Indicazioni:** condropatia femoro-rotulea, lievi versamenti articolari.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU0420**

**EU-CONT**

Tab. misure pag. 138



## LA CAVIGLIA È UNA STRUTTURA COMPLESSA, COSTITUITA DA OSSA, MUSCOLI, TENDINI E TESSUTO CONNETTIVO.

Essa è sottoposta a stress fisici rilevanti durante le attività quotidiane e ancor più durante le attività sportive, cosicché le lesioni traumatiche della caviglia sono molto comuni nei pazienti di ogni fascia di età e rappresentano il tipo più frequente di lesione muscolo-scheletrica osservabile in Pronto Soccorso. Grazie alla sua peculiare architettura, la caviglia (o articolazione tibiotarsica) è estremamente stabile nei confronti delle forze in eversione, che sospingono il piede verso l'esterno.

### Cavigliera EU-CONT®

Tessuto a maglia con elastomero intrecciato a trama alterna per impedire l'effetto laccio sopra ai malleoli. Offre grande elasticità in lunghezza e in altezza per un adattamento anatomico perfetto e senza pieghe.

**Indicazioni:** contusioni, stiramenti, distorsioni, edemi declivi, riabilitazione dopo rimozione di apparecchi gessati.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU0500**

**EU-CONT**

Tab. misure pag. 139

## LA CAVIGLIA

### PUSH Care

Migliora la sensazione di stabilità della caviglia, diminuisce il gonfiore e allevia il dolore. Compressione regolabile mediante la chiusura Powernet® e la cinghia extra-compressiva. Compatibile con ogni tipo di scarpa. Applicazione facilitata. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.

**Indicazioni:** lievi distorsioni e irritazioni capsulari, tendiniti, instabilità lieve della caviglia, artrosi senza instabilità.

Misure 1, 2, 3, 4, 5  
Codice PC12012C DX  
PC12011C SX

Tab. misure pag. 139



## LA CAVIGLIA

### PUSH Med

Base elasticizzata combinata con rinforzi anelastici laterali a U ("staffa"). Stabilizzazione con cinghie elastiche e anelastiche. Bloccaggio del tallone integrato. Chiusura a cerniera e regolazione con velcro. Zone di comfort sul tendine d'Achille e sul retro piede. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero, traspirante con inserti anti-scivolamento in silicone, per stimolare la propriocezione. Sottile, leggera e traspirante.

**Indicazioni:** lesioni acute dei legamenti (alternativa al taping), instabilità legamentosa moderata, trattamento delle fratture stabili della caviglia, trattamento secondario delle fratture della caviglia, infiammazioni capsulari e tendiniti, artrosi associata a instabilità, prevenzione secondaria delle lesioni dei legamenti della caviglia (recidive), caviglia del calciatore, sindrome da impingement.

Misure 1, 2, 3, 4, 5  
Codice PM22012C DX  
PM22011C SX

Tab. misure pag. 139



### PUSH Med Aequi Flex

Tutore funzionale per la caviglia costruito con materiali più leggeri ma con gli stessi criteri della ortesi Aequi PUSH Ortho. Espressamente progettata per il trattamento delle distorsioni della tibiotarsica. Applicabile immediatamente dopo il trauma, protegge i legamenti lesionati, stabilizza l'articolazione, assiste la riabilitazione precoce e consente una più rapida ripresa delle attività lavorative e sportive. Il guscio mediale, altamente protettivo nei confronti dell'apparato legamentoso, è molto flessibile e non ostacola la flessione dorsale e plantare del piede. Le fasce elastiche sono regolabili individualmente in base all'entità del gonfiore, che si modifica considerevolmente nelle diverse fasi della guarigione e del trattamento.

**Indicazioni:** distorsioni della caviglia di tutti i gradi (I-II-III grado), sia acute che croniche, trattamento funzionale delle lesioni dei legamenti della caviglia, trattamento secondario di frattura della tibiotarsica, riabilitazione dopo distorsione, prevenzione delle recidive di distorsione, instabilità della caviglia.

Misure 1, 2, 3  
Codice PM22022AC DX  
PM22021AC SX

Tab. misure pag. 139



### PUSH Aequi Ortho

Il tutore caviglia Push Aequi può essere definita uno stabilizzatore dinamico della caviglia. Contiene materiale rigido su un solo lato (quello mediale), per fornire il maggior grado possibile di stabilizzazione senza inibire la libertà di movimento. La rigidità decresce verso i bordi, dando sostegno solo nei punti dove esso è richiesto e possiede una depressione per alloggiare il malleolo mediale.

L'inibizione dell'inversione/eversione è altamente efficace, ma la zona plantare è flessibile, per consentire la flessione dorsale e plantare del piede. La stabilizzazione è completata da una robusta cinghia anelastica, disposta da laterale a mediale. Le cinghie elastiche esercitano la compressione attorno alla caviglia e sono regolabili.

**Indicazioni:** instabilità grave della caviglia, trattamento funzionale delle lesioni acute dei legamenti della caviglia, **trattamento secondario di fratture della tibiotarsica**, prevenzione secondaria delle lesioni dei legamenti della caviglia.

Misure 1, 2, 3  
Codice PO3201ACD DX  
PO3201ACS SX

Tab. misure pag. 139



# CAVIGLIERA BIVALVA MARATHON



**STEP\_1**  
Aprire completamente i lacci del tutore.



**STEP\_2**  
Applicare sulla caviglia i due gusci assicurandosi che la fascia di congiunzione degli stessi sia posizionata sotto il tallone.



**STEP\_3**  
Fissare i lacci con il velcro (regolare la tensione dei lacci a seconda delle proprie esigenze).

## LA CAVIGLIA



Inserto in schiuma sintetica a memoria di forma.

### MARATHON MEMORY a staffa

Modello con le imbottiture a memoria di forma, si adatta perfettamente al profilo della caviglia. Garantisce un'intima aderenza all'anatomia individuale e un perfetto sostegno articolare. L'imbottitura ha un suo spessore doppio in corrispondenza dei malleoli, ciò ne aumenta il comfort.

**Indicazioni:** distorsione recente di 1°-2° grado con versamento moderato (fase acuta), instabilità articolare (cronica) e prevenzione delle distorsioni durante lo sport.

Misure **Unica ambidestra**  
Codice **EU029**

### MARATHON AIR a staffa e MARATHON AIR LITE a staffa

Offre il più elevato comfort e il massimo grado di sostegno articolare. Gli inserti vengono forniti pregonfiati, la valvola di cui sono dotati consente la regolazione individuale della compressione.

**Indicazioni:** distorsione recente di 2°-3° grado con versamento marcato (fase acuta). In tutti i casi di importante gonfiore della caviglia. Frattura malleolare composta/stabile e postumi di intervento. Dopo rimozione di un gesso. Nella riabilitazione (fasi iniziali caratterizzate da gonfiore pronunciato).



Inserto gonfiabile, regolabile.

### MARATHON AIR

Misure **Unica ambidestra**  
Codice **EU029G**



Inserto gonfiabile, regolabile.

### MARATHON AIR LITE

Misure **Unica ambidestra**  
Codice **EU029GL**

## LA CAVIGLIA

### ASO - Ankle Stabilizer Orthosis

Tessuto di supporto in speciale tessuto di nylon rinforzato. Lacci stabilizzatori per sostenere i legamenti e bloccare il tallone. Chiusura a lacci. Linguetta in materiale a cellule chiuse, traforato. Stecche amovibili in materiale plastico.

**Indicazioni:** trattamento delle lesioni acute dei legamenti della caviglia, prevenzione delle distorsioni e delle recidive dopo una precedente distorsione; instabilità cronica della caviglia, alternativa al taping tradizionale nello sport.

Misure **XS, S, M, L, XL, XXL** Tab. misure pag. 139  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **MS200 (colore nero)**  
**MS200B (colore bianco)**



- 1** La chiusura in neoprene fornisce un ancoraggio sicuro ai lacci e alle stringhe.
- 2** La linguetta è fabbricata in Cool Flex™, traspirante e fresco da indossare. Lo stesso materiale è impiegato anche per rivestire la parte posteriore della scarpetta, per maggiore comfort della regione achillea.
- 3** Le stringhe in poliestere e cotone sono robuste e non si arricciano.
- 4** Le comode allacciature autoaderenti consentono di fissare con sicurezza i lacci stabilizzatori.
- 5** I lacci stabilizzatori in nylon rinforzato bloccano efficacemente il tallone, riproducendo l'effetto del taping.
- 6** La scarpetta in nylon rinforzato è molto resistente e non si deteriora a livello degli occhielli.

## LA CAVIGLIA

### PIN CAM WALKER Eumedica

Stivaletto deambulatorio con giunti articolari per mantenere bloccata, limitare selettivamente o concedere la flessione estensione del piede. Profilo ribassato della suola per mantenere la normale lunghezza dell'arto trattato rispetto al controlaterale. Suola monoscocca rivestita in gomma antisdrucchiolo con forma "rocker bottom". Imbottiture in morbido tessuto sintetico di schiuma. Bracci laterali e staffa in metallo. Giunti articolari a livello della tibiotarsica. Sistema di regolazione a perni mobili con carter trasparente di sicurezza (incrementi di 7,5°). Possibilità di scelta tra posizione fissa, 45° di flessione dorsale e 45° di flessione plantare. Sostituisce il gesso senza rinunciare al risultato clinico ottimale, alla contenzione, all'igiene, al confort e alla sicurezza nel passo.

**Indicazioni:** fratture e distorsioni del piede e della tibiotarsica, lesioni del tendine di Achille, trattamento secondario di fratture e osteotomie che consentono il carico, immobilizzazioni prolungate, ritardi di consolidazione e pseudoartrosi, riabilitazione postoperatoria.

Misure **S (35 - 37,5), M (38-42), L (43 - 46)**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU026**



### PUSH Ortho Aequi Junior

Il tutore offre il giusto equilibrio tra un efficace supporto meccanico e un ottimale comfort in tutti i casi di lesione della caviglia. L'ortesi è stata progettata per bambini dai 6 ai 12 anni d'età (numero scarpa tra 30 e 37). Il tutore **Aequi Junior** stabilizza l'articolazione tibiotarsica durante il movimento sia di inversione che di eversione e, indifferentemente, nelle posizioni di flessa e neutrale. Il funzionamento ottimale del tutore si ottiene indossandolo in una scarpa robusta con i lacci.

**Indicazioni:** lesioni acute dei legamenti della caviglia, causate da traumi sia in inversione che in eversione, stabilizzazione di fratture della caviglia trattate conservativamente o chirurgicamente, instabilità articolare residua (lassità cronica dei legamenti), prevenzione secondaria delle lesioni dei legamenti della caviglia.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **PO3202AJ**



# LA CAVIGLIA

## WALKER ZERO IMPACT

Il walker è provvisto di aste montanti sagomate che riducono la pressione sull'arto inferiore, assicurando contemporaneamente migliore stabilità e immobilizzazione.

Può contenere adeguatamente bendaggio e imbottiture di cui necessitano il piede e la caviglia.

La suola, dotata di un nuovo profilo ribassato e molto leggera, presenta una superficie antiscivolo. La chiusura con cinturini a velcro di facile presa e gli anelli a D che aiutano nell'applicazione/rimozione, contribuiscono alla compliance del paziente. Imbottiture confortevoli e rimovibili. La soletta interna rimovibile e ventilata riduce notevolmente la presenza di umidità nella zona del piede. La possibilità di rimozione ne consente il lavaggio.

**Indicazioni:** lesioni delle parte molli della parte distale della gamba, distorsioni della caviglia da moderate a gravi, lesioni delle sindesmosi tibio-peroneale distale, dolore e lesioni dell'avampiede, mesopiede e retropiede, fratture stabili del piede, della caviglia e della parte distale della gamba, fratture dei metatarsi, dopo interventi di riparazione dei tendini e dei legamenti, dopo altri interventi chirurgici (es. alluce valgo, artrodesi, ecc).

Misure **S (35 - 37,5), M (38 - 42), L (43 - 46)**  
 Versioni **Ambidestra**  
 Codice **EU060 - Modello alto**  
**EU060B - Modello basso**

## Rialzi per tallone (accessorio a parte)

Disponibile il set di rialzi per il tallone per il trattamento post-operatorio del tendine d'Achille. Fissando i rialzi tramite il supporto adesivo presente sugli stessi, è possibile ottenere diversi gradi di sollevamento del tallone:

**3 rialzi** = 22° di sollevamento del tallone  
**2 rialzi** = 16° di sollevamento del tallone  
**1 rialzo** = 10° di sollevamento del tallone

Codice **EU060RID - Dx**  
**EU060RIS - Sx**



Dettagli a pagina 91



Dettagli a pagina 94



Dettagli a pagina 92



Dettagli a pagina 92



## ANTIDECUBITO



### PRAFO® - Tutore caviglia e piede con funzione antidecubito

Misure **Unica ambidestra regolabile**  
 Codice **PR650APU**  
 (controllo piano sagittale, piede diabetico)  
**PR650D**  
 (controllo piano sagittale e frontale, piede neurologico)



## RIABILITAZIONE

### AFO PUSH ORTHO® Sistema funzionale per piede cadente

Misure **1, 2, 3**  
 Codice **PA32032AFO DX**  
**PA32031AFO SX**



## RIABILITAZIONE



### REHA STABIL

Misure **dal n°36 al n°48**  
 Codice **ORTORS** Tab. misure pag. 135



## RIABILITAZIONE



### STABIL II

Misure **dal n°36 al n°48**  
 Codice **ORTOS2** Tab. misure pag. 135



Integramente  
progettato e  
sviluppato in  
**ITALIA**

PATENT PENDING PCT/IB2016/050424



Senza Valgofix



Con Valgofix



## VALGOFIX®

### Tutore dinamico funzionale per l'alluce valgo

Tutore per il trattamento e la correzione dell'alluce valgo e dei disturbi correlati, munito di un innovativo sistema dinamico che guida e sostiene il movimento articolare del dito durante il passo, proteggendo la sporgenza ossea da sfregamenti ed eliminando la borsite reattiva. Studiata per un utilizzo sia diurno che notturno, Valgofix® esercita la sua azione protettiva e correttiva in modo invisibile all'interno di scarpe comode, consentendo di svolgere le normali attività e mantenendo l'alluce nel suo corretto allineamento. Lavabile a 30°C. Asciugare lontano da fonti di calore.

#### 3 FUNZIONI IN 1:

1. PREVENZIONE DI DEFORMITÀ MODERATE  
Aiuta a correggere la deviazione ed evita l'aggravamento della deformità dell'alluce valgo.
2. TRATTAMENTO CORRETTIVO POST-OPERATORIO  
Mantiene la correzione ottenuta con l'intervento chirurgico e protegge la zona operata.
3. RIABILITAZIONE POST-OPERATORIA  
Sostiene il dito operato durante la rieducazione e abbrevia il tempo di guarigione.


**Indicazioni:** alluce valgo, esostosi del primo metatarso, borsite metatarso-falangea, dolore articolare, sindrome pronatoria dell'avampiede associata all'alluce valgo.

- ① Sezione dinamica con funzione di stabilizzazione e di guida del movimento articolare dell'alluce.
- ② Stecca in poliuretano speciale Elastollan® stampato a iniezione.
- ③ Fascia metatarsale anatomica senza cuciture e regolabile con Velcro®.
- ④ Fascia digitale anatomica senza cuciture e regolabile con Velcro®.
- ⑤ Cuscinetto protettivo in gel rivestito.

Misure **Unica**  
Codice **EU24**

## IL PIEDE È UN DISTRETTO ANATOMICO MOLTO IMPORTANTE, SOGGETTO COM'È A CONTINUO CARICO E A FREQUENTI PATOLOGIE DA SOVRACCARICO FUNZIONALE.

Le deformità del piede, di varia entità, sono tra le cause più frequenti di consulto medico. Per alleviare i disturbi del piede è stata messa a punto la gamma che presentiamo nelle pagine seguenti, caratterizzata dal sostegno delle parti sofferenti del piede con un morbido gel protettivo. Fa inoltre parte della struttura del gel un purissimo olio minerale a effetto emolliente sulla cute.

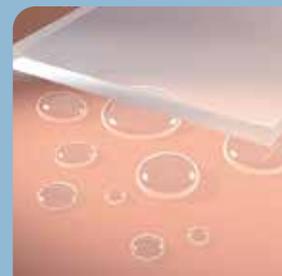

### L'OLEO-GEL e i suoi benefici

Grazie alle sue proprietà chimico-fisiche, il nostro gel è la sostanza ideale per ricoprire e proteggere la cute di ogni parte del corpo. È in grado di adattarsi perfettamente alle forme e alle sporgenze. È un ottimo ammortizzatore delle pressioni e dissipatore degli attriti. Il microclima che si crea tra l'oleogel e la cute aiuta la stessa a mantenersi più morbida ed elastica, alleviando così il dolore dove screpolature e lesioni fossero già presenti.





### EUSAVE® SPLINT ELASTICO PER ALLUCE VALGO

Tutore elastico per alluce valgo

Tutore espressamente studiato per il trattamento postoperatorio dell'alluce valgo. Composto da gambaleto elastocompressivo, presa avvolgente sull'alluce, bandelletta elastica con fissaggio a velcro. Contrasta l'edema e mantiene la correzione chirurgica.

**Indicazioni:** trattamento elettivo dopo correzione chirurgica dell'alluce valgo, previene l'insorgere dell'edema post-operatorio dopo chirurgia dell'avampiede, sindrome algodistrofica dopo intervento chirurgico sull'avampiede, trattamento adiuvante nei pazienti con deformità dell'alluce in attesa di intervento chirurgico. Trattamento conservativo dell'alluce valgo nei pazienti in cui vi è controindicazione assoluta all'intervento chirurgico.

Misure **S, M, L**  
Versioni **Destra e sinistra**  
Codice **EU037**

Tab. misure pag. 139

### ZERO SPLINT

Splint elastico per alluce valgo

Fascia elastica studiata per il trattamento dell'alluce valgo. Favorisce la corretta posizione dell'alluce, alleviando il dolore. Grande adattabilità ed elevato comfort della fascia grazie al tessuto elastico. Tutore invisibile in quanto poco invasivo grazie ad una fascia elastica morbida e sottile. Può essere utilizzato sia di giorno sia di notte.

**Indicazioni:** alluce valgo, trattamento conservativo dell'alluce valgo.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU061**



### EU-GEL UNIVERSAL BUNION

Protezione per alluce valgo

Protezione dell'esostosi del primo metatarso e della sovrastante borsite (alluce valgo). Cuscinetto morbido di gel sottile (3 mm) inserito su una leggerissima guaina di tessuto elasticizzato. Il gel va a contatto della pelle, alla quale diffonde il suo olio medicale per proteggerla e ammorbidirla. Assorbe tutte le forze di pressione e di sfregamento, dando sollievo dal dolore e dall'infiammazione. Entra comodamente in tutti i tipi di scarpa e resta sempre perfettamente posizionato. Ipoallergenico, dermatologicamente testato. Lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** alluce valgo, protezione dell'esostosi del primo metatarso, borsite.

Misure **S, L - Modello ambidestro**  
Codice **S025SF**  
**S025LF**

### EU-GEL COMFORT BUNION

Protezione per l'alluce valgo con cuscinetto cavo

Il cuscinetto di gel polimerico inserito nella manichetta di tessuto elasticizzato assorbe gli urti e riduce la pressione in ogni modello di scarpa, alleviando così il dolore e i fastidi causati dall'alluce valgo. La guaina soffice e liscia come seta, ideata da stimati specialisti del piede, tiene confortevolmente in posizione il cuscinetto di gel aperto al centro, progettato anatomicamente sulla deformità dolorosa e non scivola durante il cammino. Si indossa sotto la calza. È lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** alluce valgo, protezione dell'esostosi del primo metatarso, riduce le pressioni e gli sfregamenti sopra e intorno all'area della deformità alleviando il dolore.

Misure **S, L - Modello ambidestro**  
Codice **S044SF**  
**S044LF**



interno in  
**OLEO  
GEL**



### ACHILLE's Heel Pad

Supporto per il trattamento della tendinite dell'achilleo, sia su base degenerativa che microtraumatica. Sostiene ed esercita un continuo massaggio della zona mediante l'inserto di gel polimerico.

**Indicazioni:** tendiniti ed estesopatie del tendine di Achille.

Misure **S1010F piccolo/ medio**  
Codice **S1010LF grande/ extra grande**  
Versione **Ambidestra**

interno in  
**OLEO  
GEL**



### Malleo GEL

Protezione anti-edema dei malleoli. Due cuscinetti protettivi per le regioni perimalleolari mediale e laterale sul supporto di una guaina leggera e sottilissima. Massimo confort e protezione effetto antiedemigeno. Sollievo garantito delle caviglie gonfie e affaticate.

**Indicazioni:** trattamento post-operatorio - edemi perimalleolari di diversa natura post-traumatica, circolatoria, protezione dei malleoli.

Misure **Unica**  
Codice **S1015**



### GEL TOE SPREADER W/TOE LOOP Divaricatore con anello di fissaggio al primo o secondo dito

L'anello in gel morbido e flessibile mantiene il dito nel corretto allineamento. Riduce l'attrito e l'irritazione della pelle, dà sollievo all'articolazione deformata. Lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** alluce valgo, sovrapposizione dita adiacenti.

Codice **S027 MF Medio**  
**S027 LF Grande**  
Versione **Ambidestra**

**OLEO  
GEL**



### CUSTOM COMFORT TOE ALIGNER Divaricatore per alluce in gel polimerico

Questo divaricatore è l'unico sul mercato capace di graduare la contropressione sull'alluce. Il paziente può regolare la durezza del dispositivo in 3 modi:

1. Leggera senza inserto
2. Media inserto arancione
3. Rigida inserto verde

Inserendo uno dei due spessori all'interno, si garantisce la spinta di allineamento perfetta per una correzione ottimale dell'alluce valgo, oppure avere una delicata separazione senza inserti. Un prodotto confortevole, che contrasta anche la possibile deformazione del secondo dito.

**Indicazioni:** alluce valgo, sovrapposizione dita adiacenti.

Codice **S049 SF Piccolo**  
**S049 LF Grande**  
Versione **Ambidestra**

**OLEO  
GEL**





### GEL BUNION TOE SPREADER

Protezione per alluce valgo con divaricatore

Allevia il dolore e fornisce il corretto allineamento all'alluce. Riduce la pressione sull'articolazione metatarsofalangea. Il design brevettato garantisce la protezione tra l'alluce e la scarpa. Il dispositivo scorre facilmente sull'alluce ed è molto pratico da indossare. Lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** alluce valgo, protezione universale per la prominenza ossea.

Misura **Unica**  
Codice **S028F**  
Versione **Ambidestra**

OLEO  
GEL



### GEL BUNION TOE SPREADER RINFORZATO

Protezione per alluce valgo con divaricatore

Allevia il dolore e fornisce il corretto allineamento dell'alluce valgo di grado più accentuato. È un supporto morbido in silicone, ma allo stesso tempo molto resistente. Riduce la pressione sull'articolazione metatarsofalangea. Il design brevettato fornisce la protezione tra l'alluce e la scarpa. Il dispositivo scorre facilmente sull'alluce ed è molto pratico da indossare. Lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** alluce valgo più accentuato, protezione universale per la prominenza ossea.

Misura **Unica**  
Codice **S048F**  
Versione **Ambidestra**

SILICONE



### DOUBLE LOOP BUNION SPREADER

Divaricatore a doppio anello per alluce valgo e 2° dito a martello

Allevia il dolore e corregge l'allineamento delle prime due dita. Riduce la pressione sull'articolazione metatarsofalangea dell'alluce. Il doppio anello assicura che il divaricatore resti in sede, fornendo protezione tra l'alluce e la scarpa.

Il morbido gel si adatta alle dita, minimizzando le aree di pressione. Adatto nella maggior parte delle calzature.

**Indicazioni:** alluce valgo, protezione universale per la prominenza ossea, 2° dito a martello, 2° dito sovrapposto.

Misura **Unica**  
Codice **S039F**  
Versione **Ambidestra**

OLEO  
GEL



### CUSTOM BUNION TOE SPREADER

Protezione per alluce valgo con divaricatore

Protezione in gel polimerico. Allevia il dolore sull'articolazione metatarsofalangea e fornisce il corretto allineamento all'alluce. Il paziente può regolare la durezza del dispositivo in 3 modi:

1. Leggera senza inserto
2. Media inserto arancione
3. Rigida inserto verde

Inserendo uno dei due spessori all'interno, si garantisce la spinta di allineamento per una correzione ottimale dell'alluce valgo, oppure avere una delicata separazione senza inserti. Adatto a quasi tutte le calzature.

**Indicazioni:** alluce valgo, protezione universale per la prominenza ossea, 2° dito a martello, 2° dito sovrapposto.

Misura **Unica**  
Codice **S050F**  
Versione **Ambidestra**

KIT  
HARD SOFT



OLEO  
GEL





### DOUBLE LOOPED BIG TOE CORRECTOR

Separatore a doppio anello  
per alluce e 2° dito

**Allinea le dita deviate e sovrapposte.** I due anelli in gel mantengono il dispositivo in perfetta posizione, correggendo contemporaneamente la deformità. Separa l'alluce e il 2° dito senza creare alcuna pressione. Il morbido gel si adatta alle dita, esercitando le sue proprietà protettive. Adatto nella maggior parte delle calzature.

**Indicazioni:** alluce valgo, 2° dito a martello, 2° dito sovrapposto.

Misura **Unica**  
Codice **S041F**  
Versione **Ambidestra**



OLEO  
GEL



### GEL TOE SPREADER

Distanziatore per dita

**Distanziatore in gel polimerico a legami incrociati** (tridimensionali), espressamente studiato per le dita dei piedi. Grazie all'olio minerale contenuto, protegge dalle irritazioni e desquamazioni interdigitali e dà sollievo alle callosità che si formano tra le dita.

**Indicazioni:** deviazioni delle dita dei piedi, sfregamenti, callosità.

Codice **S017SF Piccolo**  
**S017LF Grande**  
Versione **Ambidestra**



OLEO  
GEL



### GEL TOE SPREADER W/RIBBED FABRIC

Divaricatore con base di tessuto elastico

**Riduce l'irritazione tra le dita.** La maglia tubolare morbida ed elastica si applica facilmente sulle dita permettendo una corretta applicazione del tutore. Il divaricatore in morbido gel polimerico idrata e ammorbidisce la pelle. Non si schiaccia e non perde la sua forma nemmeno con uso prolungato. Lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** alluce valgo, sovrapposizione dita adiacenti.

Codice **S030MF Medio**  
**S030LF Grande**  
Versione **Ambidestra**



OLEO  
GEL



### GEL TOE SEPARATOR

Divaricatore per dita

**Divaricatore per le dita dei piedi** in morbido gel polimerico contenente olio minerale che viene rilasciato gradualmente. Non si schiaccia e non perde la sua forma, nemmeno con l'uso prolungato. Indispensabile per mantenere il corretto allineamento delle dita dei piedi, anche dopo interventi chirurgici. Il prodotto è riutilizzabile.

**Indicazioni:** alluce valgo, casi di sovrapposizione delle dita adiacenti.

Codice **S016SF Piccolo**  
**S016MF Medio**  
**S016LF Grande**  
Versione **Ambidestra**



OLEO  
GEL



### DIGITUBE

Tubolare con gel ritagliabile

È un supporto tubolare in tessuto di maglia elasticizzata, rivestita internamente di gel polimerico. Si adatta con uniformità alle sporgenze del dito e ammorbidisce la pelle irritata con l'effetto lenitivo dell'olio minerale.

**Indicazioni:** callosità, ipercheratosi, lesioni da sfregamento o da eccessiva pressione delle scarpe.

Misura **S, L**  
Codice **S109ASF Piccolo**  
**S109ALF Grande**



### DIGITAL PADS

Cuscinetto digitale

Il cuscinetto in morbido gel polimerico contenente olio minerale, grazie alla sua natura elastica, si adatta alle esigenze del caso durante l'uso per ritornare poi alla sua forma originaria. È incompressibile e non si lacera. L'olio minerale naturale presente nel cuscinetto serve ad ammorbidire la lesione cheratosica.

**Indicazioni:** calli, duroni, occhi di pernice, dita a martello, ecc.

Codice **S001XSF Piccolo**  
**S001SMF Medio**  
**S001LXLF Grande/Extra Grande**



### DIGI - STRIP

Guaina tubolare ritagliabile

Protezione tubolare per le dita delle mani e dei piedi, parzialmente rivestita in morbido gel polimerico contenente olio minerale. Maglia elasticizzata all'esterno, gel polimerico all'interno. Può essere tagliata nella lunghezza desiderata.

**Indicazioni:** adatta a lenire i fastidi derivati da dita a martello, callosità, vesciche, ecc.

Codice **S109SF Piccolo**  
**S109MF Medio**  
**S109LF Grande**



### DIGITAL CAP

Guaina digitale

Questa guaina digitale è adatta alla protezione delle dita del piede. L'oleo-gel polimerico, che la riveste internamente, assorbe totalmente gli sfregamenti e si adatta alle deformità anatomiche. Per modificare il diametro del DIGITAL CAP è sufficiente trazionare la guaina orizzontalmente o verticalmente. Può essere tagliata nella lunghezza desiderata.

**Indicazioni:** lesioni da sovraccarico e da sfregamento, callosità, ragadi.

Codice **S004SF Piccolo**  
**S004LF Grande**





interno in  
**OLEO  
GEL**

### UNIVERSAL GEL STRAP Cuscinetto per metatarsalgie

Cuscinetto per l'avampiede in morbido gel polimerico contenente olio minerale. Sostiene delicatamente le teste dei metatarsi, eliminando il dolore alla base delle dita. Agisce come un ammortizzatore durante il cammino. Ammorbidisce le lesioni ipercheratosiche (calli, duroni, fittoni). La maglia di supporto è elasticizzata nei due sensi.

**Indicazioni:** metatarsalgie meccaniche.

Versioni **Destra e sinistra**  
Codice **S003SMF Piccolo, Medio**  
**S003LXLF Grande, Extra grande**



**OLEO  
GEL**

### 4 IN 1 UNIVERSAL PROTECTOR WITH SEPARATOR Protezione metatarsale con divaricatore

La protezione metatarsale in gel polimerico con divaricatore, grazie al morbido gel, funge da ammortizzatore per la parte anteriore del piede e contemporaneamente ha un'azione di divaricazione. Dona sollievo alla zona metatarsale assorbendo traumi e pressioni, contribuisce all'allineamento dell'alluce, riducendo l'infiammazione e l'accavallamento delle dita.

**Indicazioni:** alluce valgo, protezione universale per la prominenza ossea. Callo, borsite del 5° dito del piede. Metatarsalgia.

Codice **S052SF Misura S piede sinistro**  
**S052LSF Misura L piede sinistro**

**S052DF Misura S piede destro**  
**S052LDF Misura L piede destro**



### DUO METATARSAL Supporto metatarsale

Cuscinetto metatarsale in oleogel polimerico, ricoperto di tessuto morbido e sottile. Assorbe la pressione e l'attrito e riduce il dolore. Rallenta la formazione della callosità (durone) alla pianta del piede sotto le dita. Si applica sotto le calze, inserendo il 2° dito del piede nell'apposito occhiello. Facile da indossare.

**Indicazioni:** metatarsalgie da sovraccarico.

Codice **S018SF Piccolo**  
**S018LF Grande**



Interno in  
**OLEO  
GEL**





## Morbido sollievo a ogni passo

Regola la durezza del dispositivo in 3 modi:

- LEGGERA senza inserto
- MEDIA inserto arancione
- RIGIDA inserto verde

### CUSTOM BUNION TOE SPREADER Protezione per alluce valgo con divaricatore



Dettagli a pagina 63

### CUSTOM COMFORT TOE ALIGNER Divaricatore per alluce in gel polimerico



Dettagli a pagina 61

### CUSTOM DOUBLE LOOPED BIG TOE CORRECTOR Separatore a doppio anello per alluce e 2° dito



Dettagli a pagina 71

### CUSTOM DOUBLE LOOPED SMALL TOE CORRECTOR Separatore a doppio anello per 3°, 4° e 5° dito



Dettagli a pagina 71



### CUSTOM DOUBLE LOOPED BIG TOE CORRECTOR

**Separatore a doppio anello per alluce e 2° dito**  
Allinea le dita deviate e sovrapposte. I due anelli in gel mantengono il dispositivo in perfetta posizione, correggendo contemporaneamente la deformità. Separa l'alluce e il 2° dito senza creare alcuna pressione:

1. Leggera senza inserto
2. Media inserto arancione
3. Rigida inserto verde

Inserendo uno dei due spessori all'interno, si garantisce la spinta di allineamento per una corretta separazione tra alluce e 2° dito, oppure avere una delicata separazione senza inserti. Adatto a quasi tutte le calzature.

**Indicazioni:** alluce valgo, 2° dito a martello, 2° dito sovrapposto.

Misura **Unica**  
Codice **S053F - Ambidestra**



### CUSTOM DOUBLE LOOPED SMALL TOE CORRECTOR

**Separatore a doppio anello per 3°, 4° e 5° dito**  
Allinea le dita deviate e sovrapposte. I due anelli in gel mantengono il dispositivo in perfetta posizione, correggendo contemporaneamente la deformità. Separa il 3°, 4° e 5° dito senza creare alcuna pressione.

Il paziente può regolare la durezza del dispositivo in 3 modi:

1. Leggera senza inserto
2. Media inserto arancione
3. Rigida inserto verde

Inserendo uno dei due spessori all'interno, si garantisce la spinta di allineamento per una corretta separazione tra 3°, 4° e 5° dito, oppure avere una delicata separazione senza inserti. Adatto a quasi tutte le calzature.

**Indicazioni:** callosità sotto al 5° dito, varismo del 5° dito. Separa il 3°, 4° e 5° dito.

Misura **Unica**  
Codice **S054F - Ambidestra**






### EUCAP

**Cappuccio di oleo-gel per le dita del piede o della mano**

Il gel ammorbidisce la pelle, lenisce il fastidio e protegge il dito. Imbottitura, protezione e sollievo per calli, occhi di pernice, unghie incarnite, cuticole. Ricopre completamente il dito. Ritagliabile, lavabile e riutilizzabile. Foro di ventilazione apicale, per agevolare la naturale traspirazione della pelle del dito. Utilizzabile anche sulle dita della mano.

**Indicazioni:** protezione e sollievo per calli, unghia incarnita, occhi di pernice, cuticole.

Misure **Unica**  
Codice **S029F**

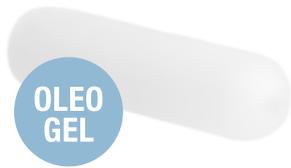

OLEO GEL



### EUCREST - Cresta di Oleo-gel universale per le dita a martello

Allevia i fastidi delle dita a martello e ad artiglio. È un supporto morbido conformato anatomicamente per adattarsi alla radice delle dita del piede. L'anello flessibile ed elastico si adatta al dito con facilità e resta sempre in posizione. Aiuta a riallineare le dita. Lavabile, riutilizzabile. È utilizzabile indifferentemente sia sul piede destro che sul piede sinistro.

**Indicazioni:** dito a martello, dito ad artiglio.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **S031F**



OLEO GEL



### EUCREST RINFORZATO

**Cresta universale per le dita del piede**

Allevia i fastidi delle dita a martello e ad artiglio più accentuate. È un supporto morbido in silicone ma allo stesso tempo molto resistente, conformato anatomicamente per adattarsi alla radice delle dita del piede. L'anello flessibile ed elastico è confortevole e resta sempre in posizione. Aiuta a riallineare le dita. Facile da applicare e rimuovere. Non si sposta. Lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** dito a martello, dito ad artiglio.

Misure **Unica**  
Versioni **Destra e Sinistra**  
Codice **S047**



SILICONE



### EUCREST 3 - Cresta universale per le dita a martello a tre anelli

Corregge simultaneamente la deformità a martello delle tre dita centrali e ne allevia i fastidi. Supporto morbido, anatomicamente conformato. Il triplo anello flessibile ed elastico si adatta alle dita con facilità e resta sempre in posizione. Materiale trasparente, igienico, lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** dita a martello multiple (2°-3°-4° dito), in associazione all'alluce valgo, nel piede cavo e nel piede reumatico.

Versioni **Destra e Sinistra**  
Codice **S046SMF - Piccolo, Medio**  
**S046LXLF - Grande, Extragrande**



OLEO GEL





**EUVAL**  
Protezione anatomica  
in oleo-gel per l'alluce valgo

Gel morbido e flessibile per imbottire e proteggere l'esostosi dell'alluce valgo. Il gel ammorbidisce la pelle, lenisce il fastidio e protegge il dito. Design anatomico ultra-sottile per essere indossato nella maggior parte delle calzature.

**Indicazioni:** protezione della sporgenza dell'alluce valgo da ogni forma di pressione o sfregamento.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **S032F**



OLEO  
GEL



**EUPINKIEFINGER®**  
Protezione anatomica  
in oleo-gel per il 5° dito

Gel morbido e flessibile per la protezione della sporgenza del 5° dito del piede da pressioni o sfregamento. Il gel ammorbidisce la pelle, lenisce il fastidio e protegge il dito. Il confortevole anello avvolge la base del 5° dito e mantiene il prodotto in posizione. Design anatomico ultra-sottile per essere indossato nella maggior parte delle calzature.

**Indicazioni:** callo e borsite del 5° dito del piede.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **S033F**



OLEO  
GEL



**EUPINKIEFINGER® DOUBLE LOOP**  
Divaricatore per il 5° dito  
con doppio anello

Allevia il dolore localizzato alla sporgenza sotto al mignolo e garantisce il corretto allineamento del dito. Il suo design brevettato riduce la pressione sull'articolazione metatarso-falangea e protegge il 5° dito dalla scarpa. Il prodotto si infila facilmente sul 4° e 5° dito. È lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** protezione della sporgenza ossea del 5° dito da pressione o sfregamento, riduzione del dolore sull'articolazione metatarso-falangea, aiuta a riallineare le dita esterne.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **S045F**



OLEO  
GEL



**DOUBLE LOOPED  
SMALL TOE CORRECTOR**  
Separatore a doppio anello  
per 3°, 4° e 5° dito

Allinea le dita deviate e sovrapposte. I due anelli in gel mantengono il dispositivo in perfetta posizione, correggendo contemporaneamente la deformità. Separa il 3°, 4° e 5° dito senza creare alcuna pressione. Il morbido gel si adatta alle dita, esercitando le sue proprietà protettive. Adatto nella maggior parte delle calzature.

**Indicazioni:** callosità sotto al 5° dito, varismo del 5° dito. Separa il 3°, 4°, 5° dito.

Misure **Unica**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **S040F**



OLEO  
GEL



### EUDUPLEX® - Imbottitura in oleo-gel sottile per le teste dei metatarsi

Costruito con gel dello spessore di soli 2 mm, ricoperto da un leggerissimo tessuto elasticizzato. Allevia la sensazione di bruciore, tipica delle condizioni di sovraccarico delle teste metatarsali. Ridistribuisce le forze che si generano durante il cammino o la corsa, ammortizzando l'impatto al suolo dell'avampiede. Si indossa comodamente nella maggior parte delle calzature e si può calzare sia sul piede destro che sul piede sinistro, semplicemente rovesciandolo su sé stesso.

**Indicazioni:** metatarsalgia, neuroma di Morton, callosità dell'avampiede.

Misure **S/M, L/XL**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **S034SMF Piccolo / Medio**  
**S034LXLF Grande / Extra grande**



interno in  
**OLEO  
GEL**



### MULTI PROTECTION Cuscinetto protettivo in gel autoaderente

Dispositivo in oleo-gel autoaderente, rivestito sul lato esterno da uno strato di tessuto elasticizzato sottile e morbido. Protegge da pressione localizzata e attrito le zone di cute più esposte. Previene gli arrossamenti e le vesciche. Ritagliabile nella forma e nella misura desiderata. Elastico in tutte le direzioni, si adatta perfettamente ad ogni area di applicazione. Anallergico. Lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** protezione delle aree di pelle esposte a pressione e attrito, prevenzione degli arrossamenti cutanei e delle vesciche.

Misure **Unica - 8 x 7 cm**  
Codice **S038F**



Allungabile nelle 4 direzioni

**OLEO  
GEL**



### SUPPORTO PER ARCO PLANTARE

Nuovo dispositivo per la cura della fascite plantare e delle plantalgie in generale. Riduce il dolore e migliora la mobilità. Supporto confortevole facile da indossare. Gel massaggiante: comfort e sostegno.

**Indicazioni:** fascite plantare, sperone calcaneare, tendinite, sindrome del tunnel tarsale, sindrome del cuboide.

Misure **Unica**  
Versioni **Destra e sinistra**  
Codice **S035F**

interno in  
**OLEO  
GEL**



### PRESSURE SENSITIVE SHEET Cuscinetto in Oleo-gel con supporto telato



Misure **10 x 10 cm**  
Codice **S006F**

interno in  
**OLEO  
GEL**

Dettagli a pagine 91



### EUSTATIC Gambaletto per piedi delicati o diabetici



Misure **L, XL**  
Codice **EU038**

Tab. misure pag. 139



La nuova fibra  
**SILVER**

Dettagli a pagina 97





## I SILICONI SONO POLIMERI INORGANICI BASATI SU UNA CATENA SILICIO-OSSIGENO E GRUPPI FUNZIONALI ORGANICI LEGATI AGLI ATOMI DI SILICIO.

Nei nostri prodotti viene usato un silicone estremamente raffinato molto morbido o, quando serve, a densità differenziata. Il nostro silicone è ipoallergenico, dotato di alta tollerabilità, assorbe ottimamente i colpi, ritorna subito alla forma originale dopo essere stato sottoposto a pressioni, ha una lunga durata ed è gradevole sulla pelle e facilmente lavabile.



### PLANTARE GEL-AIR

Plantare femminile antitraumatico. Adatto a ogni tipo di scarpa, elegante o sportiva. Ammortizza il carico dell'arto inferiore durante il cammino. Massimo comfort. Particolarmente indicato nell'uso di scarpe a tacco alto.

**Indicazioni:** metatarsalgie, plantalgie, dolori da sovraccarico e su base circolatoria.

Misure **Unica**  
Codice **S081**



### GEL-AIR MINI PLANTARE Supporto per le teste metatarsali

Sostegno delle teste metatarsali in morbido silicone. Allevia i dolori localizzati alla base delle dita dei piedi sotto le teste metatarsali sostenendole e proteggendole dalle pressioni. Esercita un massaggio dell'area dolorante a ogni ciclo del passo. Speciale disegno di superficie, costituito da un'alternanza di salienze e depressioni romboidali.

**Indicazioni:** metatarsalgie meccaniche, secondarie, miste, neuroma di Morton, ipercheratosi plantare. Ideale per tacchi alti.

Misure **Unica**  
Codice **EU087F**

*Gel-Air*



### GEL-AIR Protezione retro tallone

Dispositivo in gel autoaderente. Applicato internamente alla parte posteriore della scarpa, protegge il tallone da pressione localizzata e attrito. Previene il dolore e le vesciche della parte posteriore del tallone, provocati dallo sfregamento del bordo della scarpa. Utilizzabile anche senza le calze, a diretto contatto della pelle. Anallergico. Lavabile e riutilizzabile, mantiene a lungo l'adesività.

**Indicazioni:** protezione del tallone da pressione e attrito contro la scarpa, prevenzione del dolore e delle vesciche sulla parte posteriore del tallone.

Misure **Unica**  
Codice **S037F**

*Gel-Air*

OLEO  
GEL



### ALL GEL TOE protezione per le dita dei piedi

La protezione in gel per le dita del piede evita i fastidi derivanti dalla frizione e dalla pressione che si creano all'interno della calzatura. Si adatta alla maggior parte delle calzature, lavabile e riutilizzabile, fori traspiranti.

**Indicazioni:** protezione delle dita del piede, prevenzione degli arrossamenti cutanei e delle vesciche, prevenzione della lesione da sfregamento o da eccessiva pressione delle scarpe.

Misure **S, L**  
Codice **S051SF Piccola**  
**S051LF Grande**

### DUO EU-INSOLE Supporto metatarsale con divaricatore

Ha una doppia funzione: infatti al plantare anteriore si aggiunge un divaricatore delle dita. Il morbido silicone del plantare allevia il dolore e il bruciore alla base delle dita. È resistente allo sfaldamento.

**Indicazioni:** alluce valgo associato a metatarsalgia, disallineamento funzionale delle teste dei metatarsi.

Misure **Unica**  
Codice **S023 DRF Dx**  
**S023 SRF Sx**



SILICONE

DIVARICATORE



SILICONE

### EU-INSOLE Supporto metatarsale con anello

Cuscinetto in morbido silicone per il sostegno e la protezione delle teste dei metatarsi. Design anatomico. Con anello che serve per mantenere il dispositivo sempre nella corretta posizione, agganciandolo al primo o secondo dito. Allevia il dolore da sovraccarico.

**Indicazioni:** disallineamento funzionale della testa dei metatarsi, atrofia del cuscinetto adiposo dell'avampiede, metatarsalgia, neuroma di Morton.

Misure **Unica**  
Codice **S021 DRF - Dx**  
**S021 SRF - Sx**

### Plantare EU-SHOCK ABSORBER 4/4

Soletta in morbido silicone con forellini per una maggiore traspirabilità, con proprietà biomeccaniche sovrapponibili a quelle dei tessuti molli del piede. Massimo sostegno e massima capacità ammortizzante. Inserti in gel siliconico colorato di minore densità per alleviare i sovraccarichi.

**Indicazioni:** algie plantari meccaniche.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU086**

Tab. misure pag. 140

### Plantare EU-SHOCK ABSORBER MICROBIAL PROTECTION 4/4

Supporto plantare 4/4 in morbido silicone con copertura antimicrobica che diminuisce la proliferazione batterica prevenendo la formazione di cattivi odori. Inserti colorati a densità minore per alleviare i sovraccarichi nelle zone più sensibili.

**Indicazioni:** tallonite, metatarsalgia, plantalgie del piede piatto e del piede cavo.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU086MP**

Tab. misure pag. 140



### Talloniera EU-SHOCK RED

Tallonetta calcaneale in morbido silicone con parete stabilizzante e scarico centrale in gel siliconico colorato di minore densità per alleviare i sovraccarichi. Particolarmente indicata per talalgie.

**Indicazioni:** fascite plantare, talalgie.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU083**

Tab. misure pag. 140



SILICONE



SILICONE

### Talloniera TALUS

Supporto calcaneale in morbido silicone, a profilo ribassato. Comfort ottimizzato, efficacia assicurata: sia come cura che come prevenzione. Per trattare con successo un'ampia gamma di disturbi dei piedi e della schiena.

**Indicazioni:** fascite plantare, tallonite, spina calcaneale, infiammazione del tendine d'Achille, borsite del calcagno, ragadi e fissurazione del tallone, lombalgia, rachialgie (meccaniche, posturali e degenerative lombari).

Misure **Unica**  
Codice **S080**

### Talloniera EU-SHOCK standard

Supporto calcaneale in morbido silicone, a profilo ribassato. Comfort ottimizzato, efficacia assicurata: sia come cura che come prevenzione. Per trattare con successo un'ampia gamma di disturbi dei piedi e della schiena.

**Indicazioni:** fascite plantare, tallonite, spina calcaneale, infiammazione del tendine d'Achille, borsite del calcagno, ragadi e fissurazione del tallone, lombalgia, rachialgie meccaniche, posturali e degenerative lombari.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU084**

Tab. misure pag. 140



SILICONE



### Talloniera EU-SHOCK BLUE

Tallonetta calcaneale in morbido silicone con parete stabilizzante con scarico obliquo in gel siliconico colorato di minore densità per "spina calcaneale".

**Indicazioni:** talalgia da "spina calcaneale".

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU082**

Tab. misure pag. 140



SILICONE



SILICONE

### Talloniera EU-SHOCK con inserto rimovibile

Talloniera specifica per la cura dello sperone calcaneale. Rimuovendo l'inserto centrale si crea un'area di scarico selettivo che elimina completamente la pressione localizzata sotto lo sperone. Lasciando l'inserto in sede, la talloniera diventa un supporto che ammortizza le pressioni su tutta l'area del tallone.

**Indicazioni:** sperone calcaneale, fascite plantare, tallonite.

Misure **S, M, L**  
Codice **EU085**

Tab. misure pag. 140



Copertura del plantare in tessuto con FILI D'ARGENTO



Plantari di ultimissima generazione con soletta AMMORTIZZANTE e TRASPIRANTE



L'invaso profondo per il calcagno e il supporto dell'arcata plantare con 2 diversi gradi di consistenza permettono PROPRIETÀ DI SOSTEGNO E CONTENZIONE DIFFERENZIATE



## PLANTARI AG-TECH® Plantari di ultima generazione con effetto antibatterico e antifungino

Materiali di rivestimento di ultima generazione con effetto antibatterico e antifungino. Strato interno assolutamente innovativo in EVA traspirante con struttura a celle aperte ingegnerizzate a nido d'ape. Traspirante, ammortizzante, confortevole. Possibilità di scelta del grado di sostegno e contenzione. Design sottile per calzature casual e sportive. Proprietà antistatiche. Modellatura dinamica. Rivestimento di tessuto con fili d'argento, proprietà antibatteriche e antifungine. Invaso profondo per il calcagno e supporto dell'arcata plantare con due diversi gradi di consistenza: proprietà di sostegno e contenzione differenziate (Star1 e Star3). Plantari a modellatura dinamica.

### STAR 1

Il più morbido dei plantari con conchiglia di sostegno addizionale. Leggero, contenzione moderata, inserto calcaneale ammortizzante. Adatto alla maggior parte delle calzature. Termoformabile e ritagliabile.

**Indicazioni:** talalgia da spina calcaneale, leggera pronazione del retro piede, adatto per il piede diabetico, micosi (piede d'atleta), sostegno dell'arcata plantare longitudinale, piedi affaticati, dolori alla pianta dei piedi.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **Star 1**

Tab. misure pag. 140




### STAR 3

Il plantare che offre maggior sostegno. Massimo controllo del mesopiede e del retro piede. La speciale struttura scarica il peso e minimizza l'ingombro. Adatto alla maggior parte delle calzature. Ideale per un utilizzo continuo e per le attività sportive. Termoformabile e ritagliabile.

**Indicazioni:** allineamento del calcagno, tendiniti, correzione valgismo, micosi (piede d'atleta), pronazione, plantalgia, talalgia.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **Star 3**

Tab. misure pag. 140

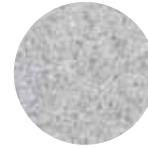

FELTRO: elastico, isolante, assorbente, resistente.



MEMORY FOAM: attutente, a memoria di forma, leggero, antibatterico.



TESSUTO A NIDO D'APE: struttura tridimensionale, favorisce l'assorbimento del sudore.

## PLANTARE MEMORY 4G® Plantare con azione traspirante e massaggiante, che soddisfa i criteri della riflessologia

La base è di feltro preformato, lo strato intermedio di memory foam, il rivestimento superiore di uno speciale tessuto a nido d'ape in doppio strato. La funzione integrata delle tre componenti e la sinergia delle caratteristiche dei tre diversi materiali permettono di raggiungere un grado di comfort molto elevato, e di alleviare la maggior parte dei disturbi dei piedi.



AMMORTIZZANTE



I plantari MEMORY 4G® sono il risultato di un'approfondita ricerca dei materiali e dell'applicazione delle tecnologie più avanzate.

I plantari MEMORY 4G® offrono molti vantaggi:

ANATOMICI	AMMORTIZZANTI
LEGGERI	TRASPIRANTI
ADATTI NELLA MAGGIOR PARTE DELLE SCARPE	MASSAGGIANTI
RITAGLIABILI IN PUNTA	CONFORTEVOLI
	DURATURI

**Indicazioni:** plantalgia, talalgia, congestione venosa e linfatica, crampi, pesantezza dei piedi e delle gambe, protezione del piede durante il cammino e l'attività fisica.

Misura **S, M, L, XL**  
Codice **EU088**

Tab. misure pag. 140

## CICATRICI IPERTROFICHE LA NATURA RIMARGINA LE FERITE, EUSCAR AIUTA LA NATURA A FARLO NEL MODO MIGLIORE

La riparazione di una perdita di sostanza si attua mediante una complessa interazione fra mediatori chimici, cellule e proteine strutturali che cooperano affinché i tessuti lesionati possano recuperare la loro integrità e funzione.

L'alterazione di questo equilibrio, a livello cutaneo, può procurare l'insorgere di cicatrici atrofiche, ipertrofiche fino alla formazione di cheloidi.

La sola terapia chirurgica per queste lesioni si è dimostrata inefficace, dando luogo a numerose recidive. Da più di 15 anni l'uso del silicone ha sovvertito i normali protocolli terapeutici, dimostrandosi un metodo efficace non solo nel trattamento, ma anche nella prevenzione degli inestetismi cicatriziali.

Partendo dal sinergismo occlusione, compressione e uso di silicone si è creato un dispositivo medico specifico per ogni distretto corporeo.



IL "MICROCLIMA" CHE SI CREA TRA PATCH E CUTE FAVORISCE LA RIDUZIONE DELLA CICATRICE



### EUSCAR Patch

EUSCAR è un prodotto EUMEDICA studiato e sperimentato per rendere meno visibili le cicatrici cutanee di ogni tipo, quelle in via di formazione come quelle presenti da anni. È particolarmente indicato per le ferite post chirurgiche e dà ottimi risultati anche su cicatrici ipertrofiche.



Codice **EUS1C cm 2,5 x 10**



### EUSCAR Pomata

EUSCAR nella formulazione in pomata va applicato con un leggero massaggio sulla cicatrice fino a completo assorbimento una o più volte al giorno. Ha un'azione emolliente e idratante che contribuisce, grazie alle particolari sostanze contenute, a modellare i tessuti induriti, levigando lo spessore della cicatrice.



Codice **EUS1P 30 ml**



WONDERSCAR

### WONDERSCAR - Silicone Gel Sheet

Foglio in silicone per il trattamento di cheloidi e cicatrici ipertrofiche di tutte le superfici corporee. Il foglio è anallergico, atossico. Può essere tagliato nella misura desiderata.

Codice **S1045W219 cm 19,5 x 9,5 - 2 mm**

## E CICATRICI IPERTROFICHE



interno in  
**OLEO  
GEL**

### CARPAL GEL SLEEVE Cuscinetto in oleo-gel

Il supporto per compressione Carpal Gel Sleeve è un cuscinetto in tessuto provvisto di un pad in gel dalla forma anatomica dello spessore di circa 6 mm che previene e riduce i traumi, gli impatti, la pressione. Ideale per cheloidi e cicatrici ipertrofiche risultanti da chirurgia plastica e ricostruttiva, traumi, ustioni e per il trattamento post-operatorio del tunnel carpale. Il gel rilascia olio minerale, che previene e riduce la comparsa di tessuto cicatriziale. Il tessuto elastico in 4 direzioni consente una mobilità ottimale del polso.

Misure **S/M, L**  
Versioni **Destra e sinistra**  
Codice **S1012 SM**  
**S1012 L**

### HAND DIGITUBE Tubolare con gel ritagliabile

La maglia tubolare elasticizzata interamente rivestita in oleo-gel polimerico, contribuisce al rimodellamento di cicatrici dovute a interventi chirurgici o traumi. Ritagliabile a misura, lavabile e riutilizzabile.



Misure **S, L**  
Codice **EU047F**

### HAND DIGITAL CAP Guaina digitale

Con l'azione compressiva della maglia tubolare e l'azione emolliente dell'oleo-gel polimerico di cui è interamente rivestito, HAND DIGITAL CAP dona sollievo dal dolore in caso di artrite, esito di chirurgia, esito di trauma. Protegge il letto dell'unghia in caso di trauma e protegge la cute disidratata in caso di amputazione. Può ridurre l'ipersensibilità, aumentare l'elasticità cutanea e l'aspetto della cicatrice. Lavabile e riutilizzabile.

Misure **S, L**  
Codice **EU048F**

## E CICATRICI IPERTROFICHE



**OLEO  
GEL**

### HAND EUCAP Cappuccio in oleo-gel per le dita

Cappuccio in oleogel polimerico molto morbido ed elastico, diventa una seconda pelle protettiva, mentre il continuo massaggio contribuisce al rimodellamento delle cicatrici. Il foro apicale agevola la traspirazione cutanea. Lavabile e riutilizzabile.



Misure **Unica**  
Codice **EU049F**



**OLEO  
GEL**

### HAND GEL SPREADER LOOP Divaricatore con doppio anello di fissaggio

Divaricatore in oleo-gel polimerico morbido ed elastico, indicato per il trattamento di cicatrici posizionate nelle commessure interdigitali. Provvisto di due pratici anelli di fissaggio alle dita, è lavabile e riutilizzabile.

Misure **Unica**  
Codice **EU050F**



**OLEO  
GEL**

### HAND MULTI PROTECTION Cuscinetto protettivo in gel autoaderente

Dispositivo in oleo-gel autoaderente, rivestito sul lato esterno da uno strato di tessuto elasticizzato sottile e morbido. La sua applicazione favorisce la riduzione delle cicatrici. Lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** protezione delle aree di pelle esposte a pressione e attrito, prevenzione degli arrossamenti cutanei e delle vesciche.



Ritagliabile nella forma e nella misura desiderata.

Elastico in tutte le direzioni, si adatta perfettamente a ogni area di applicazione.

Misure **Unica - 8 x 7 cm**  
Codice **EU051F**



## ANTIDECUBITO



### I PRODOTTI DELLA LINEA ANTIDECUBITO PREVENGONO LE ULCERE DA DECUBITO MEDIANTE LA DISSIPAZIONE DELLE FORZE PRESSORIE, SIA PERPENDICOLARI CHE TANGENZIALI.

Essi sono costituiti da un gel polimerico applicato su un supporto di tessuto. Il gel polimerico possiede le caratteristiche di essere atossico, anallergico, trazioneabile in ogni direzione, incomprimibile come l'acqua, elastico, a memoria di forma totale. Inoltre, il gel polimerico contiene all'interno della sua struttura chimico-fisica un olio minerale di elevatissima purezza. Ne sono state sperimentalmente studiate anche le proprietà cicatrizzanti ed eutrofiche in caso di perdita di sostanza cutanea e ustioni. Questi prodotti sono diretti in particolare ai pazienti anziani, a quelli costretti a lunghe degenze a letto, ai paraplegici e tetraplegici, ai disabili in generale.



#### Lenzuoletto Antidecubito

Studiato per le regioni sacro-coccigea, dorsale e scapolare. Uno strato di gel polimerico è applicato su un supporto di tessuto elasticizzato. Il gel va posizionato a diretto contatto della cute da proteggere. Spessore 0,5 cm.

Codice **S1042 cm 20 x 20**  
**S1043 cm 28 x 38**  
**S1044 cm 40 x 50**



#### Lenzuoletto Antidecubito - Ricoperto

Simile al precedente, ricoperto con tessuto elasticizzato da entrambi i lati.

Codice **S1042C cm 20 x 20**  
**S1043C cm 28 x 38**  
**S1044C cm 40 x 50**



Modello chiuso

#### Protezione per il Gomito in Oleo-gel

Maglia elasticizzata tubolare leggera e anti-arriccimento, con disco di gel polimerico per proteggere il gomito.

Misura **S/M donna, L uomo**  
Codice **S107**



Modello chiuso

#### Protezione per il Tallone in Oleo-gel

Maglia elasticizzata tubolare leggera e anti-arriccimento, con protezione calcaneale in gel polimerico.

Misura **S/M donna, L uomo**  
Codice **S107**



## ANTIDECUBITO



#### PRAFO® Tutore caviglia e piede con funzione antidecubito

Presidio per la terapia, la riabilitazione e la prevenzione del paziente neuroleso. Doppia funzione:

- PR-Pressure Relief: antidecubito.
- AFO-Ankle Foot Orthosis: tutore caviglia e piede.

Regolazione sia dell'altezza che della lunghezza per adattarlo a tutti i pazienti. Regolazione della flessione plantare per correggere l'equinismo del piede. Funzione di molla per facilitare la deambulazione. Barra antitrotatoria per posizionare correttamente l'arto. Scarico completo del calcagno per prevenire le lesioni da decubito.

**Indicazioni:** paziente emiplegico, sia allettato che in fase di recupero, riabilitazione neuromotoria, prevenzione e correzione degli atteggiamenti posturali, prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee da decubito nel paziente neuroleso.

Misure **Unica**  
Versione **Ambidestra regolabile**  
Codice **PR650APU** (controllo piano sagittale, piede diabetico)  
**PR650D** (controllo piano sagittale e frontale, piede neurologico)



**DIABETOLOGIA**



**RIABILITAZIONE**



#### PRESSURE SENSITIVE SHEET Cuscinetto in Oleo-gel con supporto telato

Cuscinetto di gel polimerico ritagliabile nelle forme e misure desiderate, in modo da adattarsi e aderire a tutte le salienze anatomiche. Su un lato è disposto un supporto telato, per facilitarne l'applicazione e la rimozione.

**Indicazioni:** protezione da attriti e pressione localizzata.

Misura **cm 10 x 10**  
Codice **S006F con supporto telato**  
**S010QF senza supporto telato**



## RIABILITAZIONE



### SCARPE TERAPEUTICHE SPECIALI ORTHOTECH®

Persone di tutte le età, affette da problemi ereditari o causati da incidenti o malattie, hanno bisogno di calzature speciali in grado di alleviare il dolore e di ripristinare almeno in parte la mobilità. **OrthoTECH®** è la linea di scarpe terapeutiche costruite con materiali hi-tech, conformi ai più elevati standard di qualità, belle nell'aspetto, comode e funzionali. Sono stati conservati tutti i benefici delle scarpe su misura, eliminando però la necessità di laboriose misurazioni e modifiche. **Un concetto superiore di terapia: il trattamento funzionale** delle lesioni dell'arto inferiore. Questo trattamento contribuisce con successo a migliorare i risultati e ad accorciare il tempo di riabilitazione. Le scarpe terapeutiche **OrthoTECH®** attuano una limitazione selettiva dei movimenti articolari, consentono una deambulazione sicura e favoriscono la concessione del carico.



#### Reha Stabil

##### Scarpa di riabilitazione neuro-ortopedica.

Tomaia in cuoio rigido, allacciatura anteriore a strappo (gestibile con una sola mano), controtallone più alto e rinforzato, alloggiamenti laterali per inserire cuscinetti in poliammide, solette in polietilene preformato, imbottitura interna, suola antisdrucchiolo larga e stabile con punta in materiale morbido per prevenire l'inciampo, area flessibile alla suola per consentire un'andatura elastica, apertura anteriore per il controllo e il corretto posizionamento delle dita. Abbinabile ad altri supporti ortopedici (talloniere, plantari, ecc.).

**Indicazioni:** instabilità della tibiotarsica, difficoltà della deambulazione in esiti di paralisi, piede emiplegico, piede spastico.

Misure dal n° 36 al n° 48  
Codice ORTORS

Tab. misure pag. 135



#### Stabil II

##### Scarpa terapeutica di seconda generazione.

Tomaia in cuoio rigido, allacciatura laterale senza asole, controtallone più alto e rinforzato, alloggiamenti laterali per inserire cuscinetti in poliammide, solette in polietilene preformato, imbottitura interna, suola antisdrucchiolo larga e stabile, collare alla caviglia per proteggere il tendine d'Achille. Abbinabile ad altri supporti ortopedici (talloniere, plantari, ecc.).

**Indicazioni:** prevenzione nei pazienti soggetti a frequenti lesioni dei legamenti, terapie supplementari delle lesioni dei legamenti, lesioni degenerative del tendine tibiale posteriore, ritardo di consolidazione o pseudoartrosi di fratture della caviglia, artrosi/artrite della tibiotarsica e/o della sottoastragalica, esiti di artrodesi tibiotarsica/sottoastragalica, esiti di fratture del calcagno e dell'astragalo, esiti di osteotomia correttiva distale di tibia/perone.

Misure dal n° 36 al n° 48  
Codice ORTOS2

Tab. misure pag. 135



## RIABILITAZIONE



#### EUEMI - SLING

##### Fionda per pazienti emiplegici HIP - KNEE - ANKLE - FOOT SLING

La fionda custom-made è costituita da strisce di tessuto inestensibile a due colori (Cod. colore: grigio per la spalla e nero per la gamba). Tutte le parti della fionda sono regolabili tramite la fibbia per adattarsi alla corporatura del paziente. **Ortesi per la deambulazione del paziente emiplegico.** Corregge la cinematica della caviglia, ripristina la sequenza del passo normale e produce un incremento della velocità del cammino. Economica e meglio tollerata della comune Ankle-Foot Orthosis (AFO).

Misure Unica (regolabile)  
Codice EU036D Dx  
EU036S Sx

#### PRAFO® Tutore caviglia e piede con funzione antidecubito

Presidio per la terapia, la riabilitazione e la prevenzione del paziente neuroleso.  
**Doppia funzione:**

- PR-Pressure Relief: antidecubito.
- AFO-Ankle Foot Orthosis: tutore caviglia e piede.

Regolazione sia dell'altezza che della lunghezza per adattarlo a tutti i pazienti. Regolazione della flessione plantare per correggere l'equinismo del piede. Funzione di molla per facilitare la deambulazione. Barra antitoratoria per posizionare correttamente l'arto. Scarico completo del calcagno per prevenire le lesioni da decubito.

**Indicazioni:** paziente emiplegico, sia allettato che in fase di recupero, riabilitazione neuromotoria, prevenzione e correzione degli atteggiamenti posturali, prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee da decubito nel paziente neuroleso.



Misure Unica  
Versione Ambidestra regolabile  
Codice PR650APU  
(controllo piano sagittale, piede diabetico)  
PR650D  
(controllo piano sagittale e frontale, piede neurologico)



#### DIABETOLOGIA



#### RIABILITAZIONE



## RIABILITAZIONE



REALIZZAZIONE  
SU MISURA



FISSAGGIO  
ANTERIORE



REGOLAZIONE  
PERSONALIZZATA



### AFO PUSH ORTHO® Sistema funzionale Per piede cadente

- DESIGN INNOVATIVO
- SOSTEGNO ECCELLENTE
- STABILITÀ LATERALE

L'Ortesi Push Afo offre un eccellente sostegno in caso di disturbo al sollevamento del piede durante la deambulazione. Il suo innovativo design consente un'andatura naturale e permette di camminare di nuovo in modo sicuro ed efficiente.

Push AFO è un'ortesi caviglia-piede che, combinando diverse funzioni in modo esclusivo, solleva il piede durante la fase di swing (o di oscillazione), sostiene la flessione plantare dopo l'appoggio del tallone e permette, successivamente, la distensione del piede. L'ortesi, inoltre, offre stabilità laterale all'articolazione della caviglia.

Le fasce elastiche di Push AFO sono regolabili. In questo modo è possibile determinare il grado di sollevamento dinamico del piede nella fase di swing, in base alle esigenze personali di chi l'utilizza. All'appoggio del tallone, la funzione di contenimento delle fasce elastiche consente un efficace controllo della flessione plantare. Durante la fase di stance (appoggio), l'ortesi Push AFO consente all'articolazione della caviglia di flettersi e di estendersi liberamente e, durante la fase di distensione dell'avampiede, permette la funzione (residua) dei muscoli del polpaccio, contribuendo a un'andatura efficiente e naturale.

Di norma, è la calzatura indossata a consentire di fissare l'ortesi attorno al piede; Push AFO, invece, è dotata di un proprio sistema di fasce elastiche di fissaggio. Questo innovativo design consente d'indossare l'ortesi AFO anche con una calzatura leggera, per esempio una pantofola, stando in casa.

**Indicazioni:** ridotto controllo dei muscoli elevatori del piede durante la fase di swing e di risposta al carico (appoggio del piede / foot flat), eventualmente in combinazione con instabilità della caviglia. Patologie in cui può verificarsi una perdita di funzione dei muscoli elevatori del piede: ictus, ernia, sclerosi multipla, sindrome post-polio, distrofia muscolare, lesioni del midollo spinale.

Misure 1, 2, 3  
Codice PA32032AFO Dx  
PA32031AFO Sx

Tab. misure pag 139



## RIABILITAZIONE



### DORSAL NIGHT SPLINT Tutore notturno per lo stretching della pianta del piede

**Doccia per il piede da indossare di notte.**

Esercita lo stretching della fascia plantare e del tendine d'Achille, mantenendo il piede in posizione costante a 90°. Struttura anteriore a guscio con due semplici fasce di fissaggio al piede e alla gamba in morbido tessuto traspirante. Leditaetutta l'area della caviglia e del retro piede restano libere. Semplice, confortevole ed efficace.

**Indicazioni:** fascite plantare, tendinite dell'Achilleo, piede cadente neurologico, dolore post-statico

Misure **SM, LXL**  
Codice **EU052 SM**  
**EU052L XL**

Tab. misure pag 139



Dettagli a pagina 28

### Tutore di spalla per emiplegici

Misure **XS, S/M, L/XL**  
Codice **EU 013**

Tab. misure pag. 136



**LA SPALLA**

### EUCARD - Fascia compressiva toracica

Presidio contenitivo postoperatorio di interventi al torace per evitare la comparsa dell'ematoma e contrastare l'edema. EUCARD è composto da una cintura e da una placca. Entrambe sono fabbricate in tessuto felpato con imbottitura di poliuretano, bordatura in cotone, chiusure in Velcro® Facile e rapida da rimuovere e riapplicare per consentire l'ispezione e le medicazioni della ferita chirurgica. Presidio monouso/monopaziente.

**Indicazioni:** trattamento postoperatorio dopo interventi di cardiocirurgia a torace aperto (sternotomia e osteosintesi dello sterno con cerchiaggi metallici)

Misure **Unica**  
Codice **EU 039**



**BENDAGGIO E TAPING**



# RIABILITAZIONE



## ISTRUZIONI PER IL RILEVAMENTO TAGLIA



## EUTROMBOFIX®

### Calza per la profilassi della trombosi

Maglia elasticizzata con fili rivestiti. La calza veste perfettamente ed è ben tollerata dalla pelle. Resistente alla traspirazione e agli unguenti. Lavorata a maglia secondo la forma anatomica, a compressione graduale da 18 mm Hg (caviglia) a 8 mm Hg (coscia). Apertura di ispezione sotto le dita dei piedi. Bordo prossimale con inserto in silicone. Lavabile e sterilizzabile (121° autoclave).

#### Indicazioni:

- Profilassi della trombosi nel trattamento dei degeniti, prima, durante e dopo interventi chirurgici.

#### Controindicazioni:

- Se ne sconsiglia l'uso in presenza di grave arteriosclerosi, dermatiti, gravi edemi delle gambe anche di origine cardiaca, ulcere aperte.

## COME INDOSSARE CORRETTAMENTE LA CALZA



## TABELLA TAGLIE

	SMALL FASCIA GIALLA	MEDIUM FASCIA VERDE	LARGE FASCIA ROSSA
<b>SHORT</b> FASCIA SOTTILE	<b>SHORT / SMALL</b> STATURA PICCOLA (mt 1,60 ca.) CORPORATURA ESILE FASCIA SOTTILE GIALLA Cod. <b>EU 163 AG C S</b>	<b>SHORT / MEDIUM</b> STATURA PICCOLA (mt 1,60 ca.) CORPORATURA MEDIA FASCIA SOTTILE VERDE Cod. <b>EU 163 AG C M</b>	<b>SHORT / LARGE</b> STATURA PICCOLA (mt 1,60 ca.) CORPORATURA ROBUSTA FASCIA SOTTILE ROSSA Cod. <b>EU 163 AG C L</b>
<b>REGULAR</b> FASCIA MEDIA	<b>REGULAR / SMALL</b> STATURA MEDIA (mt 1,70 ca.) CORPORATURA ESILE FASCIA MEDIA GIALLA Cod. <b>EU 163 AG R S</b>	<b>REGULAR / MEDIUM</b> STATURA MEDIA (mt 1,70 ca.) CORPORATURA MEDIA FASCIA MEDIA VERDE Cod. <b>EU 163 AG R M</b>	<b>REGULAR / LARGE</b> STATURA MEDIA (mt 1,70 ca.) CORPORATURA ROBUSTA FASCIA MEDIA ROSSA Cod. <b>EU 163 AG R L</b>

È disponibile anche la misura EXTRA LARGE con tassello: Cod. **EU 163 AG XLT**  
 Ø Polpaccio superiore cm 46, Ø Caviglia superiore cm 28



# DIABETOLOGIA



## PRAFO® Tutore caviglia e piede con funzione antidecubito

Nuovo presidio per la terapia, la riabilitazione e la prevenzione del paziente neuroleso.  
**Doppia funzione:**

- PR-Pressure Relief: antidecubito.
- AFO-Ankle Foot Orthosis: tutore caviglia e piede.

Regolazione sia dell'altezza che della lunghezza per adattarlo a tutti i pazienti. Regolazione della flessione plantare per correggere l'equinismo del piede. Funzione di molla per facilitare la deambulazione. Barra antirotatoria per posizionare correttamente l'arto. Scarico completo del calcagno per prevenire le lesioni da decubito.

**Indicazioni:** paziente emiplegico, sia allettato che in fase di recupero, riabilitazione neuromotoria, prevenzione e correzione degli atteggiamenti posturali, prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee da decubito nel paziente neuroleso.



Misure **Unica**  
 Versione **Ambidestra regolabile**  
 Codice **PR650APU** (controllo piano sagittale, piede diabetico)  
**PR650D** (controllo piano sagittale e frontale, piede neurologico)



## ANTIDECUBITO



## RIABILITAZIONE

## EUSTATIC Gambaletto per piedi delicati o diabetici

La sua particolare tessitura, con cuciture appiattite, evita qualsiasi abrasione o sfregamento e garantisce una compressione graduata sul piede per favorire la circolazione sanguigna. Nella realizzazione del tessuto, dove il cotone è prevalente, è stata inserita la fibra Silver, ottenuta unendo uno strato di argento puro alla superficie di un filamento continuo in modo permanente, avente proprietà antimicrobica, antistatica, naturale, termoregolante, schermante. Tali fibre, oltre a eliminare i cattivi odori, mantengono il piede fresco e asciutto. Il gambaletto non va indossato su ferite aperte.

**Indicazioni:** piede delicato/diabetico, piede amputato o con ulcere.



Misure **L, XL**  
 Codice **EU038**

Tab. misure pag. 139



Il piede della persona con diabete necessita di più cure, perché la perdita di sensibilità e la cicatrizzazione più lenta, che sono generalmente associate al diabete, provocano la comparsa di piccole lacerazioni e ferite nonché leggere callosità che protraendosi nel tempo, potrebbero peggiorare. È buona norma usare quotidianamente prodotti adatti all'igiene e al lavaggio della pelle delicata del piede, e provvedere con sollecitudine alla cura di eventuali piccole ferite con l'applicazione di prodotti adatti.



## Sistema SECURA® con plantare ADEGUA®

### Indicazioni:

- Trattamento del post-operatorio
- Trattamento per lo scarico delle ulcere nel piede diabetico (avampiede)

Misure **dal n° 35/6 al 45/6 (ogni 2 numeri)**  
 Vendita al pezzo  
 Versione **Ambidestra**  
 Codice **SC200N**

## SISTEMA ADEGUA® PLANTARE ANTI SQUILIBRIO

- Grazie alla pre-incisione del sottopiede di gomma microporosa, consente lo scarico immediato delle pressioni nel trattamento delle ulcere plantari
- Permette di creare un'area di scarico della dimensione necessaria, nel punto preciso per evitare la pressione nella zona ulcerata o a rischio di ulcerazione
- Consente il reinserimento dei tasselli tolti per ripristinare un fondo pari, a ulcerazione risolta, o variare la zona di scarico a seconda delle necessità del momento
- La media densità della gomma microporosa riduce le forze esercitate dai bordi dell'area posta in scarico sulla zona plantare, e distribuisce il peso corporeo su una superficie più ampia, evitando così i picchi di pressione



..... Ulcera plantare  
 ..... Bordi dell'ulcera

La migliore soluzione per un trattamento efficace delle ulcere diabetiche del piede e altre patologie plantari.



Fascione anti squilibrio in microporosa



## SISTEMA SECURA® SUOLA ANTI SQUILIBRIO

- Suola costruita in gomma microporosa a densità differenziata, con una inclinazione per scaricare la pressione dall'avampiede e trasferirla sul retro piede
- Retro piede (tacco) costituito da una mescola di densità più consistente per una maggiore stabilità e robustezza
- Fascione centrale anti squilibrio posto sotto l'avampiede costituito da una mescola morbida che assorbe il carico di pressione nel caso di uno sbilanciamento del peso in avanti durante la deambulazione



## Sistema SECURA®

### Caratteristiche:

- Tomaia in speciale tessuto forato per garantire la massima circolazione dell'aria. Ottima resistenza all'abrasione, alla tensione, alla lacerazione e al lavaggio
- Tomaia regolabile per contenere qualsiasi piede
- Suola in microporosa a bidensità con fascione centrale antisbilanciamento in avanti
- Contrafforte esterno per un maggior sostegno alla caviglia
- Peso estremamente leggero

### Indicazioni:

- Trattamento del post-operatorio.

Misure **dal n° 35/6 al 45/6 (ogni due numeri)**  
 Vendita al pezzo  
 Versione **Ambidestra**  
 Codice **SC100N**



## Sistema SECURA® con plantare ADEGUA®

Come cod. SC100N ma con soletta preincisa Adegua

- Peso estremamente leggero
- Trattamento per lo scarico delle ulcere nel piede diabetico (avampiede)

Misure **dal n° 35/6 al 45/6 (ogni due numeri)**  
 Vendita al pezzo  
 Versione **Ambidestra**  
 Codice **SC200N**

Plantare Preinciso ADEGUA®





## Sistema SECURA® Flat

### Caratteristiche:

Calzatura post-operatoria con suola semirigida sagomata in modo da favorire la naturale camminata. Tomaia in tessuto forato per facilitare la traspirazione. Fascia di chiusura che consente la regolazione della parte anteriore della calzatura e del volume interno; facilita l'alloggiamento di piedi edematosi, gonfi o bendati. Contrafforte esterno per un maggior sostegno della caviglia.

### Indicazioni:

- Trattamento post-operatorio.



Misure **dal n° 35/6 al 45/6**  
(ogni due numeri)  
**Vendita al pezzo**

Versioni **Ambidestra**

Codice **SC300N**



## SCARPE TERAPEUTICHE SPECIALI ORTHOTECH®

### Reha Stabil

#### Scarpa di riabilitazione neuro-ortopedica.

Tomaia in cuoio rigido, allacciatura anteriore a strappo (gestibile con una sola mano), controtallone più alto e rinforzato, alloggiamenti laterali per inserire cuscinetti in poliammide, solette in polietilene preformato, imbottitura interna, suola antidrucciolo larga e stabile con punta in materiale morbido per prevenire l'inciampo, area flessibile alla suola per consentire un'andatura elastica, apertura anteriore per il controllo e il corretto posizionamento delle dita. Abbinabile ad altri supporti ortopedici (talloniere, plantari, ecc.).



Dettagli a pagina 92

**Indicazioni:** instabilità della tibiotarsica, difficoltà della deambulazione in esiti di paralisi, piede emiplegico, piede spastico.

Misure **dal n° 36 al n° 48**

Codice **ORTORS**

Tab. misure pag. 135

### Stabil II

#### Scarpa terapeutica di seconda generazione.

Tomaia in cuoio rigido, allacciatura laterale senza asole, controtallone più alto e rinforzato, alloggiamenti laterali per inserire cuscinetti in poliammide, solette in polietilene preformato, imbottitura interna, suola antidrucciolo larga e stabile, collare alla caviglia per proteggere il tendine d'Achille. Abbinabile ad altri supporti ortopedici (talloniere, plantari, ecc.).



Dettagli a pagina 92

**Indicazioni:** prevenzione nei pazienti soggetti a frequenti lesioni dei legamenti, terapie supplementari delle lesioni dei legamenti, lesioni degenerative del tendine tibiale posteriore, ritardo di consolidazione o pseudoartrosi di fratture della caviglia, artrosi/artrite della tibiotarsica e/o della sottoastragalica, esiti di artrodesi tibiotarsica/sottoastragalica, esiti di fratture del calcagno e dell'astragalo, esiti di osteotomia correttiva distale di tibia/perone.

Misure **dal n° 36 al n° 48**

Codice **ORTOS2**

Tab. misure pag. 135



## MATERIALE PER PROTESI



### PRESSURE RELIEF PADDING Imbottitura per ridurre le pressioni

Foglio di gel adesivo su un lato dello spessore di circa 3 mm, con rivestimento di tessuto di nylon, ideale per un'efficace riduzione di frizioni, attriti e pressioni. Si impiega come imbottitura per tutori e ortesi di ogni tipo.

Codice **S1120 cm 10 x 91**  
**S1121 cm 20 x 91**



### GEL E ROLL Benda elastica con Oleogel

Benda elastica impregnata di gel polimerico.

**Indicazioni:** diminuzione volumetrica di moncone d'amputazione, stasi venosa, edema del moncone.

Misure **cm 10 x mt 3**  
Codice **S101**



### PRESSURE SENSITIVE SHEET Cuscinetto in Oleogel con o senza supporto adesivo telato

Misure **cm 10 x 10**  
Codice **S006F con supporto telato**  
**S010QF senza supporto telato**



**ANTIDECUBITO**

Dettagli a pagina 91



La nuova fibra **SILVER**

### EUSTATIC Gambaletto per piedi delicati o diabetici

Misure **L, XL**  
Codice **EU038**

Tab. misure pag. 139



**DIABETOLOGIA**

Dettagli a pagina 97



## MATERIALE PER PROTESI



### PARTIAL FOOT SOCK Calza per amputazione parziale del piede

Indicato per amputazioni transmetatarsali. La calza è costituita da due strati di tessuto di Lycra e Spandex senza cuciture. La parte distale è rivestita di Oleo-gel che protegge da urti e pressioni.

Misure **Regular (altezza caviglia),**  
**X-Long (altezza polpaccio)**  
Codice **S104**



### SILOSHEATH Coprimoncone con Oleo-gel

Cappuccio per ricopertura di moncone d'amputazione impregnato di gel polimerico. Agisce come un comune cappuccio copri-moncone elasticizzato, inoltre disperde urti, vibrazioni e attrito tra protesi e moncone, elimina le abrasioni cutanee e si adatta ad ogni situazione locale (grandezza dell'arto residuo, edema, ecc.)

Misure **1 ÷ 8**  
Codice **S102**

Tab. misure pag. 141

### MOLDING DISTAL ROLL - ON Tubolare Anatomico Distale



Roll-on, tubolare anatomico distale è un prodotto morbido, modellabile, totalmente in oleogel, ha un effetto lenitivo e idratante, protegge da pressioni e attriti.

**Indicazioni:** posizionato sull'apice del moncone protegge da attriti e sfregamenti. Circonferenza all'apice del moncone.

Misure **S, M, L**  
Codice **S110**

Tab. misure pag. 141



**BENDAGGIO  
E TAPING**



### Eupress Grip

Maglia tubolare elasticizzata. Conferisce sostegno e compressione graduata ai muscoli e alle strutture articolari. Coadiuvata la riabilitazione dopo la rimozione di splints e apparecchi gessati. Contrasta l'edema e aiuta la circolazione sanguigna. Mantiene in sito le medicazioni sia agli arti che al tronco. Traspirante.

**Indicazioni:** riabilitazione, bendaggio su medicazioni, edema da stasi venosa e linfatica, varici degli arti inferiori, prevenzione dei fenomeni tromboembolici.

- Codice **RD11B** Ø cm 6,25  
Mano o arto piccolo
- RD11C** Ø cm 6,75  
Braccio medio, caviglia piccola
- RD11D** Ø cm 7,50  
Braccio grande, caviglia media, ginocchio piccolo
- RD11E** Ø cm 8,45  
Caviglia grossa, ginocchio medio, coscia sottile
- RD11F** Ø cm 10,00  
Coscia media, ginocchio grande
- RD11G** Ø cm 12,00  
Coscia grande

### Eupress Tape

Nastro adesivo anelastico in tessuto di cotone 100%. Adesivo all'ossido di zinco. Per eseguire rinforzi ai bendaggi di base, a protezione di strutture legamentose articolari (in prevenzione e cura). Taglio a zig zag - Anima da 1".

**Indicazioni:** taping e bendaggio funzionale. Ottimo per il fissaggio di tutori a prevenzione delle retrazioni cicatriziali nella chirurgia del paziente ustionato.

- Codice **CP1025**  
cm 2,5 x 10 mt
- CP1030**  
cm 3,8 x 10 mt
- CP1050**  
cm 5 x 10 mt



### EUCARD Fascia compressiva toracica



Misure **Unica**  
Codice **EU 039**

Dettagli a pag. 95



**alevia®**



## IL NATURALE BENESSERE DI MANI E PIEDI

CREME ED EMULSIONI A BASE DI  
SOSTANZE NATURALI FUNZIONALI  
ED ESTRATTI VEGETALI

UNA LINEA COMPLETA  
per dare sollievo e idratazione

Alevia è la linea di creme ed emulsioni studiate per la cura e il benessere di mani e piedi sensibili, secchi, screpolati e disidratati. Prodotti specifici formulati per prevenire fastidi e disturbi, e offrire all'epidermide massimo comfort, grazie a sostanze funzionali naturali ricche di preziose virtù.





### CREMA GAMBE E PIEDI STANCHI

**Indicazioni:** ideale per proteggere e mantenere giovane la pelle. Indicata per donare sollievo a gambe e piedi stanchi e con sensazione di pesantezza. Adatta per decongestionare piedi e gambe gonfie e doloranti, dopo essere stati a lungo in piedi.

**Proprietà:** crema leggera, non untuosa, che si applica con facilità e si assorbe rapidamente. Ricca di principi attivi vegetali, quali gli estratti di ippocastano, meliloto e ruscus. Ha azione riposante e rinfrescante, e contiene inoltre vitamina E.

Codice **AL1ST**



### CREMA MANI E PIEDI SCREPOLATI

**Indicazioni:** la pelle ha un naturale film idrolipidico di protezione il cui giusto equilibrio è garanzia di morbida elasticità per l'epidermide. Quando si rompe l'equilibrio la pelle si secca o, peggio, si screpola ed è necessario riportarla al più presto alla sua normale idratazione con l'apporto dei necessari principi nutritivi.

**Proprietà:** questa delicata crema riesce a ripristinare applicazione dopo applicazione il giusto grado di umidità dell'epitelio grazie a polimeri a bassa tensione superficiale e alto potere lubrificante, senza per altro ungere minimamente. Impedisce l'occlusione dei pori e consente una normale traspirazione.

Codice **AL7SC**



### CREMA PIEDI SECCHI

**Indicazioni:** consigliata per piedi secchi, disidratati e screpolati. Per ammorbidire la cute o in caso di rugosità, ipercheratosi e talloni disidratati.

**Proprietà:** crema che sfrutta l'azione combinata di più ingredienti: il burro di karitè, la vitamina E, e l'urea. Quest'ultima sostanza idrata profondamente la pelle e ammorbidisce le callosità e rugosità del piede.

Profumata con olio essenziale naturale di lavanda.

Codice **AL2SE**



### EMULSIONE MASSAGGIO CAVIGLIE E PIEDI GONFI

**Indicazioni:** ideale come crema per il massaggio ai piedi, e nel trattamento di caviglie gonfie e doloranti e nella pratica sportiva.

**Proprietà:** emulsione leggera, non untuosa, che si applica con facilità e si assorbe rapidamente. Contiene un particolare estratto di ippocastano titolato al 90% in escina ad alta concentrazione, estratto di ananas e di arnica.

Codice **AL12EC**



### CREMA RINFRESCANTE E DEODORANTE

**Indicazioni:** consigliata per prevenire la formazione di cattivi odori e per rinfrescare i piedi. Non contenendo antitraspiranti, è particolarmente indicata per pelli sensibili.

**Proprietà:** possiede un effetto deodorante di lunga durata che viene assicurato da sostanze di derivazione naturale, senza interferire sulla traspirazione. Le proprietà rinfrescanti e lenitive vengono assicurate dall'olio essenziale di menta e dall'estratto di centella, ad alto titolo di principi attivi. La vitamina E protegge ulteriormente la pelle.

Codice **AL4DE**



### EMULSIONE MASSAGGIO PIEDI DELICATI

**Indicazioni:** emulsione da massaggio ad azione emolliente, idratante, eutrofica. Contiene vitamina E ad alta concentrazione e sostanze ad azione idratante profonda (urea, pantenolo, PCA, sodio lattato) e triterpeni da centella asiatica.

**Proprietà:** trattamento cosmetico indicato come coadiuvante per prevenire le alterazioni cutanee del piede diabetico.

Codice **AL11EM**



**CREMA PER MANI E PIEDI FREDDI**

**Indicazioni:** una anche lieve insufficienza circolatoria, che può essere causata da diversi fattori (la stagione invernale, il fumo, l'obesità o il dover stare in piedi a lungo), può provocare una fastidiosa sensazione di freddo a mani e piedi. Si accusa un senso di indolenzimento, stanchezza o gonfiore. Alevia, grazie alle acquisizioni della cosmetica moderna, consente di ovviare efficacemente a questi inconvenienti.

**Proprietà:** un leggero massaggio con questa crema contribuisce a migliorare la circolazione anche ai livelli profondi dei capillari e veicola nella cute ricchi principi attivi, mantiene a un livello ottimale l'idratazione donando un durevole senso di benessere.

Codice **AL8FR**



**CREMA PREVENZIONE ARROSSAMENTI**

**Indicazioni:** è particolarmente indicata per chi, per ragioni professionali, venga a contatto con detersivi, solventi o altre sostanze dannose per la pelle. Consigliata anche per bambini e anziani che debbano fare uso costante di pannolini o pannoloni. È comunque una efficace profilassi per chiunque preveda situazioni di stress per la pelle di mani e piedi nella routine quotidiana.

**Proprietà:** la composizione in crema assicura una facile applicazione e un rapido e totale assorbimento. Contiene speciali polimeri chiamati perfluoropolietteri, una recentissima scoperta della cosmetica scientifica, che agiscono come potente barriera contro ogni aggressione esterna di agenti chimici (detergenti, solventi, ecc.) o fisici (polvere, caldo, freddo).

Codice **AL9AR**



**GEL DETERGENTE MANI IGIENIZZANTE**

**Indicazioni:** detersione e igienizzazione delle mani in casa o fuori casa.

**Proprietà:** gel igienizzante mani studiato per la detersione e l'igienizzazione delle mani. Lascia sulla pelle una piacevole sensazione di freschezza e pulito. Adatto per varie occasioni, sia a casa che fuori casa quando non c'è la possibilità di lavarsi le mani. Il gel deterge, igienizza e asciuga velocemente sulla pelle. **Contiene acido ialuronico per idratare la pelle e il 75% di acool per l'igienizzazione delle mani.**

Codice **AL13IG**



Non è dispositivo medico o dispositivo di protezione individuale ma è prodotta ai sensi dell'Art. 16 comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020

**EU-MASK MASCHERINA - Per adulti**

**Indicazioni:** protezione da contaminazione tramite vie respiratorie.

Eu-mask è una mascherina per adulti lavabile e riutilizzabile con strato filtrante in TNT polipropilene intercambiabile (solo per adulto). Mascherina a tre strati con lacci regolabili dietro la testa o le orecchie. Tessuto tecnico elastico e morbido, delicato a contatto con la pelle. Lo strato filtrante in TNT polipropilene idrorepellente blocca fisicamente le gocce d'acqua. È lavabile in lavatrice ad una temperatura massima di 40° C. Ogni filtro garantisce un minimo di 25 lavaggi.

Misure **Unica**  
Codice **EU062**



Non è dispositivo medico o dispositivo di protezione individuale ma è prodotta ai sensi dell'Art. 16 comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020

**EU-MASK MASCHERINA - Per bambini**

**Indicazioni:** protezione da contaminazione tramite vie respiratorie.

Eu-mask è una mascherina per bambini, a tre strati, in colore bianco panna con bordature verdi ed arancio, molto pratica da indossare grazie alla forma ergonomica e agli elastici per il posizionamento sulle orecchie. Questa mascherina per bambini è lavabile a 40° C fino ad una massimo di 25 lavaggi. La mascherina per bimbi è quindi riutilizzabile. Tessuto tecnico elastico e morbido, delicato a contatto con la pelle. Lo strato filtrante in TNT polipropilene idrorepellente blocca fisicamente le gocce d'acqua.

Versioni **Unica**  
Codice **EU062K**



**GEL DETERGENTE MANI IGIENIZZANTE**

Codice **AL13IG**

Dettagli a pagina 108

# DISPOSITIVI PROTEZIONE SLOAN

Gli articoli **Sloan** sono indumenti protettivi monouso per la protezione del personale medico e paramedico dal contatto con liquidi organici del paziente o con irrigazione e lavaggi, al fine di prevenire possibili infezioni.

I dispositivi **Sloan** sono fabbricati in polietilene, spessore più di 50 micron, con cuciture termosaldate. Possono essere indossati sia sotto un camice sterile che sopra i comuni vestiti.

Gli indumenti protettivi **Sloan** rispondono alle Norme del T.U. 81/2008 e s.m.i. emanate in recepimento alle direttive CEE sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il modello della tuta (JUMPSUITE) e dei calzoni (PANT PROTECTOR), grazie all'apertura posteriore, favorisce la traspirazione e garantisce all'utilizzatore una gradevole sensazione di asciutto sia all'interno che all'esterno. Questi articoli sono attualmente impiegati nei reparti di recupero funzionale, pronto soccorso, sale operatorie e sale-parto, ma sono indicati per un'ampia gamma di applicazioni anche non chirurgiche per le quali sussista il pericolo di un contatto con fluidi organici: autopsie, emodialisi, rianimazione, pulizia e manutenzione di sale operatorie, bagno dei pazienti.

Sono disponibili con suola anti-sdrucchiolo (NON-SKID BOOTIE, optional).

Medici ed infermieri sono divenuti sempre più sensibili alle problematiche connesse al contatto con i fluidi organici, quindi richiedono misure protettive più efficaci.

La letteratura medica più recente invita a considerare tutti i pazienti come potenzialmente infetti da HIV: ciò comporta che deve essere invitato in via cautelativa ogni contatto con i liquidi biologici. Sono così stati ideati gli articoli SLOAN STA-DRI che agiscono come valida barriera protettiva delle infezioni per il personale sanitario.



### BOOTLEG LEGGING Gambale monouso

Gambale in polietilene con spessore più di 50 micron, misura unica, doppio elastico di sostegno (caviglia – coscia) suola antisdrucchiolo.

Codice **SL250Y**



### JUMPSUITE SALOPETTE Tuta monouso

Tuta in polietilene con spessore più di 50 micron, misura unica, apertura posteriore brevettata, suola antisdrucchiolo.

Codice **SL150Y**



## PROTEZIONE DELLA PERSONA



### **FULL APRON** **Grembiule monouso**

Grembiule lungo in polietilene con spessore più di 50 micron, misura unica.

Codice **SL750Y**



### **PANT PROTECTOR** **Calzoni monouso**

Calzoni in polietilene con spessore più di 50 micron, cuciture termosaldate, apertura posteriore brevettata, suola antisdrucciolo.

Codice **SL350Y**



# RIACCENDI LA TUA VOGLIA DI SPORT

GRAZIE AI TUTORI  
ZERO IMPACT ACTIVE,  
DOLORI E FASTIDI  
DURANTE L'ATTIVITÀ  
SPORTIVA SONO  
SOLO UN RICORDO.



## IL GINOCCHIO

### GINOCCHIERA Sportiva KFS

Tutore sportivo con guaina anatomica e supporti per il controllo del "tracking" rotuleo. Dotato di giunti speciali ultrapiatti e ricoperti, apertura al poplite e alla rotula, che permettono la perfetta flessione ed estensione del ginocchio.

**Indicazioni:** protezione e sostegno del ginocchio durante lo sport, prevenzione delle lesioni dei legamenti, instabilità cronica del ginocchio, gonalgia anteriore da alterato tracking rotuleo.

Misure **S, M, L, XL**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU0800**

Tab. misure pag. 142



#### STEP 1

Aprire i lacci con il velcro. Aprire la parte superiore (coscia) e la parte inferiore (gamba) della guaina di base e posizionarla dietro il ginocchio.



#### STEP 3

Se la guaina è stata applicata correttamente, la rotula spoggerà dall'apertura anteriore. I giunti devono centrarsi lungo i lati della coscia e della gamba.

#### STEP 2

Avvolgere la guaina attorno al ginocchio, trazionando il materiale fino a fissare tra loro le apposite chiusure in velcro poste sul davanti. Regolare la tensione della guaina in modo da avvertire la giusta compressione, senza che essa provochi fastidio.



#### STEP 4

Allacciare i lacci fissandoli con il velcro. Regolare la loro tensione in modo che siano ben stretti, ma non tanto da ostacolare la circolazione.

## IL GINOCCHIO

### TUTORE ROTULEO

Ideato per lo sportivo regolare che ricerca una ginocchiera stabilizzante per praticare la propria attività in modo efficace. Specifico per il trattamento e la prevenzione del Runner's knee (ginocchio del corridore). La lunetta laterale è adattabile a seconda delle esigenze.

**Indicazioni:** dolore anteriore del ginocchio nello sport, Runner's knee, sindrome femoro-rotulea, condromalacia della rotula, malallineamento dell'apparato estensore del ginocchio, iperestensione esterna della rotula, sublussazione laterale della rotula.

Misure **S, M, L**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU056**

Tab. misure pag. 142



#### STEP 1

Aprire completamente i lacci del tutore.

#### STEP 2

Applicare lo stabilizzatore rotuleo impegnando la rotula in corrispondenza del foro sul davanti del ginocchio.

#### STEP 3

Fissare i lacci con il velcro (regolare la tensione dei lacci a seconda delle proprie esigenze).

## LA CAVIGLIA

### Tutore CAVIGLIA

Per sostenere e proteggere la caviglia durante lo sport. Allevia il dolore ed è sempre confortevole anche per utilizzi prolungati. Applicazione semplice e rapida. Grado di supporto intermedio/moderato. Triplice azione: lascia mobilità alla caviglia, mantiene il calore del corpo e agevola la traspirazione.

**Indicazioni:** protezione della caviglia durante le attività sportive, strappi, distorsioni, tendiniti e infiammazioni della caviglia di grado moderato, migliora la performance in caso di debolezza della caviglia.

Misure **S/M, L/XL**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU058**

Tab. misure pag. 142



**STEP\_1**  
Inserire il tallone nel foro, disponendo la parte più piccola (con le cinghie) della cavigliera sotto l'arcata del piede.

**STEP\_2**  
Chiudere la sezione anteriore sopra l'arcata del piede

**STEP\_3**  
Chiudere la sezione posteriore attorno alla caviglia

**STEP\_4**  
Fissare le cinghie lunghe incrociandole davanti alla caviglia. Regolare la tensione secondo le necessità.

## LA COLONNA

### TUTORE LOMBARE Ortho Sport

Il tutore lombare in tessuto elasticizzato confortevole e traspirante, è ideale per la pratica sportiva e ottimamente tollerato a contatto con la pelle, grazie alla morbidezza e alla velocità con cui l'umidità evapora, lasciando la pelle asciutta ed evitando il possibile raffreddamento da umidità trattenuta. Durante la pratica sportiva, è possibile rimuovere le stecche, se creano impedimento.

**Indicazioni:** lombalgia, contratture muscolari, prevenzione di dolori lombari.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU057**

Tab. misure pag. 142





## LE NATURALI PERFORMANCE DEL BAMBU

SCOPRI I BENEFICI DELLE FIBRE VEGETALI CHE RENDONO QUESTI TUTORI ANCORA PIÙ RESISTENTI, COMODI E LEGGERI.

Grazie alle proprietà antimicrobiche e alla capacità di assorbire il sudore favorendo la traspirazione, il bambù contribuisce a mantenere la temperatura corporea al giusto livello, per un comfort ottimale sia in estate che in inverno.



## IL GINOCCHIO

### GINOCCHIERA BAMBU

Ideata per chi pratica un'attività sportiva regolare, è dotata di inserti antiscivolo in silicone nella parte superiore. La parte centrale elastica si adatta in modo anatomicamente ottimale quando si flette il ginocchio, senza limitarne il movimento. Priva di cuciture.

**Indicazioni:** protezione del ginocchio durante le attività sportive, contusioni, distorsioni, artrosi, artrosinovite.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU053**

Tab. misure pag. 142

### GINOCCHIERA RINFORZATA BAMBU

Le due stecche laterali flessibili consentono un contenimento efficace, indispensabile per praticare sport. La parte centrale elastica si adatta in modo ottimale quando si flette il ginocchio. È dotata di inserti antiscivolo in silicone nella zona superiore e di un inserto in silicone che sostiene la rotula e produce un massaggio benefico nelle zone molli.

**Indicazioni:** protezione del ginocchio durante le attività sportive, contusioni, lesioni legamentose dei collaterali, strappi muscolari.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **EU054**

Tab. misure pag. 142



## LA CAVIGLIA



### CAVIGLIERA BAMBÙ

Il tessuto elasticizzato a trama alterna impedisce l'effetto laccio sopra i malleoli, lasciando liberi i movimenti durante l'attività fisica. Offre grande elasticità in lunghezza e altezza per un perfetto adattamento anatomico senza pieghe.

**Indicazioni:** protezione della caviglia durante le attività sportive, contusioni, stiramenti, distorsioni, edemi declivi, riabilitazione dopo la rimozione di apparecchi gessati.

Misure **S, M, L, XL**  
Versioni **Ambidestra**  
Codice **EU055**

Tab. misure pag. 142



# PER LA CAVIGLIA



# CONTROL YOUR GAME!



620 ENERGY

690 POWER

933 ACTIVITY

52950

CODE: 7381654  
BRACE PUSH SPORTS  
AMBIDESTRA  
TO PREVENT INJURY

DISTRIBUITO DA:

# +EUMEDICA®

Active



## LA GAMMA DI TUTORI PUSH SPORTS È STATA PROGETTATA DA UN TEAM DI SPECIALISTI ESPERTI, IN STRETTA COLLABORAZIONE CON ATLETI E PROFESSIONISTI DELLO SPORT, PER SODDISFARE ESATTAMENTE I DESIDERI DI CHI LI INDOSSA.

L'efficiente utilizzo di materiali di qualità superiore si traduce in una gamma di tutori sportivi ultrasottili e particolarmente confortevoli, che sostengono le articolazioni durante l'attività sportiva e che, grazie al design essenziale, sono ideali da indossare con calzature e abbigliamento sportivi. La gamma **Push Sports** si fonda sulle **competenze mediche di Push Braces**. Ogni tutore, inoltre, presenta una funzionalità ben studiata e su misura, per praticare sport all'insegna della salute e della sicurezza.



### TUTORE POLLICE PUSH SPORTS

L'ortesi per pollice Push Sports è utile in caso di dolore persistente al pollice in conseguenza dell'iperestensione dell'articolazione un infortunio giocando a palla o sugli sci. L'ortesi stabilizza l'articolazione, consentendo la guarigione dei legamenti interessati. L'apposito cappuccio protegge il pollice dolente da possibili urti, ad esempio dall'impatto con la palla. Le fasce del tutore sono regolabili in modo personalizzato e consentono a chi lo indossa di determinare il grado di limitazione della flessione del pollice in base alle proprie esigenze. Allo stesso tempo, le fasce compensano la mobilità dovuta al danno ai legamenti dell'articolazione. Le fasce del tutore si incrociano l'una con l'altra e neutralizzano le sollecitazioni medio-laterali dell'articolazione metacarpo-falangea del pollice. Le articolazioni del pollice rimanenti e il polso mantengono la loro libertà di movimento. Grazie all'ortesi per pollice, il palmo della mano risulta libero, consentendo di indossare guanti da portiere o da sci.

**Indicazioni:** pollice dello sciatore: iperestensione o dislocazione dell'articolazione metacarpo-falangea del pollice (MCP-1).

Misure **S, M, L**  
Versioni **Destra e sinistra**  
Codice **P41032TP DX**  
**P41031TP SX**

Tab. misure pag. 143



### POLSINO PUSH SPORTS

In caso di lievi disturbi da sovraccarico al polso, lo stabilizzatore Push Sports è la soluzione ideale. Questo tutore esercita una compressione attorno al polso, sostenendolo e riducendo il dolore durante l'attività sportiva. Grazie al materiale sottile e confortevole, lo stabilizzatore offre una sensazione piacevole. Posizionarlo è facile e le fasce anti-scivolamento in TPU garantiscono un mantenimento della posizione ottimale, con conseguente sensazione di sicurezza e stabilità per chi lo indossa.

**Indicazioni:** per la prevenzione di disturbi da sovraccarico ricidivi dell'articolazione del polso, in caso di leggeri disturbi da sovraccarico dell'articolazione del polso, in caso di aumento della mobilità dell'articolazione del polso.

Misure **Unica**  
Versioni **Destra e sinistra**  
Codice **P41022PSD DX**  
**P41021PSS SX**



### POLSIERA PUSH SPORTS

La polsiera Push Sports è particolarmente adatta in caso di dolore persistente o lieve instabilità del polso. Le stecche nel tutore limitano la flessione e l'estensione del polso inibendole, con una piacevole sensazione per chi lo indossa e consentendo di praticare sport senza difficoltà. Il grado di compressione è regolabile tramite la fascia elastica, che allo stesso tempo trasmette una sensazione di protezione. Grazie al materiale confortevole, a rapida asciugatura e dal design sottile, la polsiera Push Sports aderisce perfettamente alla pelle e presenta un'ottima conformazione anatomica.

**Indicazioni:** per la prevenzione di disturbi da sovraccarico ricidivi dell'articolazione del polso, in caso di disturbi da sovraccarico dell'articolazione del polso, in caso di dolore all'articolazione del polso, in caso di aumento della mobilità o instabilità dell'articolazione del polso.

Misure **S, M, L**  
Versioni **Destra e sinistra**  
Codice **P41012P DX**  
**P41011P SX**

Tab. misure pag. 143



## IL BRACCIO

### TUTORE EPICONDILITE PUSH SPORTS

Il tutore per gomito Push Sports è la soluzione ideale in caso di gomito del tennista o gomito del golfista, quando, a causa di un'intensa sollecitazione improvvisa, l'inserzione dei tendini dei muscoli dell'avambraccio sul gomito viene sovraccaricata e diventa dolente.

Mediante una pelotta, il tutore per gomito esercita una pressione sui muscoli dell'avambraccio interessati, con conseguente decompressione dell'inserzione tendinea colpita. La pressione si crea progressivamente grazie al materiale elastico della pelotta e a una piccola parte elastica presente sulla fascia. In questo modo, il dolore viene ridotto ed è possibile riprendere in piena sicurezza l'attività sportiva.

**Indicazioni:** "gomito del tennista" (epicondilite).

Misure Unica  
Codice P4701SA

## LA CAVIGLIA

### CAVIGLIERA A 8 PUSH SPORTS

La cavigliera 8 Push Sports offre sostegno in caso di leggera distorsione della caviglia o riabilitazione (quasi) completata. La fascia elastica, che viene avvolta attorno alla caviglia formando un 8, stabilizza l'articolazione esercitando una compressione stabile e piacevole, con conseguente sensazione di sicurezza per chi indossa il tutore. Le speciali fasce anti-scivolamento in TPU hanno un andamento diagonale sopra l'avampiede e attorno al tallone e aumentano, in questi punti, la forza elastica del tutore. Le fasce in TPU a entrambi i lati della caviglia (sistema a "staffa") stimolano la propriocezione. La cavigliera è realizzata in materiale particolarmente sottile e traspirante e si asciuga rapidamente.

**Indicazioni:** distorsioni della caviglia (recidive), lieve distorsione della caviglia, lieve instabilità della caviglia, infiammazione capsulare.

Misure S, M, L  
Versioni Destra e sinistra  
Codice P42022C DX  
P42021C SX

Tab. misure pag. 143

## LA CAVIGLIA

### CAVIGLIERA KICX PUSH SPORTS

La cavigliera Kicx Push Sports offre la migliore protezione possibile da distorsione della caviglia durante l'attività sportiva, risultando particolarmente adatta sia alla ripresa degli allenamenti sia alla prevenzione di recidive in caso di instabilità della caviglia. Le fasce elastiche funzionali che s'incrociano sul lato esterno della caviglia ne limitano l'inversione in modo efficace. Le fasce sono fissate al lato interno rinforzato del tutore e si estendono verso l'esterno della caviglia seguendone la conformazione anatomica. Se il piede viene inclinato verso l'interno, le fasce elastiche entrano in tensione e prevenendo la distorsione della caviglia. In questo modo è possibile praticare sport come sempre, poichè la cavigliera Kicx Push Sports consente la flessione plantare e dorsale dell'articolazione della caviglia. Il materiale elastico di qualità superiore aderisce perfettamente all'anatomia della caviglia e garantisce una piacevole compressione attorno alla caviglia. Il tutore è ultrasottile e quindi si adatta perfettamente alle calzature sportive leggere.

**Indicazioni:** instabilità della caviglia, prevenzione di traumi da inversione ricorrente (recidive).

Misure S, M, L  
Versioni Destra e sinistra  
Codice P42012C DX  
P42011C SX

Tab. misure pag. 143



## IL GINOCCHIO

### CINTURINO ROTULEO PUSH SPORTS



Il dolore attorno alla rotula o in corrispondenza dell'inserzione del tendine rotuleo, causato da progressivo sovraccarico, viene ridotto grazie allo stabilizzatore di rotula Push Sports. La pelotta elastica comprime il tendine rotuleo, fornendo un efficace sostegno alla patella. Lo stabilizzatore di rotula comprime il tendine rotuleo esattamente sotto la patella, creando una leggera inclinazione con conseguente sollievo della cartilagine sul lato posteriore della patella. A ogni passo, il tutore esercita una compressione sul tendine rotuleo, che consente un buon dosaggio della pressione. Il grado di compressione può essere regolato in base alle esigenze di chi lo utilizza, modificando la tensione della fascia. Lo stabilizzatore di rotula aiuta chi lo indossa a riprendere a praticare sport senza dolore.

**Indicazioni:** infiammazione del tendine rotuleo, ginocchio del saltatore, morbo di Osgood-Schlatter.

Misure **Unica**  
Codice **P4302PA**

### GINOCCHIERA PUSH SPORTS



La ginocchiera Push Sports è la soluzione giusta quando uno sportivo avverte una leggera sensazione di instabilità al ginocchio, necessita di ulteriore supporto durante l'attività sportiva, accusa disturbi residui dopo un'operazione al menisco o una lesione ai legamenti. Questo tutore sostiene il ginocchio in modo esclusivo mediante due snodi a balestra su entrambi i lati dell'articolazione. Le sollecitazioni medio-laterali vengono neutralizzate, senza limitare in alcun modo la flessione e l'estensione del ginocchio. È proprio la forma particolare di questi snodi che consente di stabilizzare in modo eccellente l'articolazione del ginocchio, senza produrre limitazioni durante l'attività sportiva. Una pelotta a forma di ferro di cavallo è integrata nel tutore: essa si posiziona attorno alla rotula e contribuisce a stabilizzarla nell'arco di movimento del ginocchio. L'eccellente conformazione anatomica e lo spessore sottile della ginocchiera permettono di indossarla senza problemi sotto l'abbigliamento sportivo.

**Indicazioni:** sensazione di instabilità, lesione ai legamenti del ginocchio, artrosi, sindrome femoro-rotulea, lesione del menisco.

Misure **S, M, L, XL**  
Codice **P4301G**


Tab. misure pag. 143

# +EUMEDICA®

Active

## Dedicata alle persone attive.

LA LINEA DI ARTICOLI AD ALTO  
CONTENUTO TECNOLOGICO  
PER VIVERE LO SPORT  
NEL MASSIMO COMFORT.

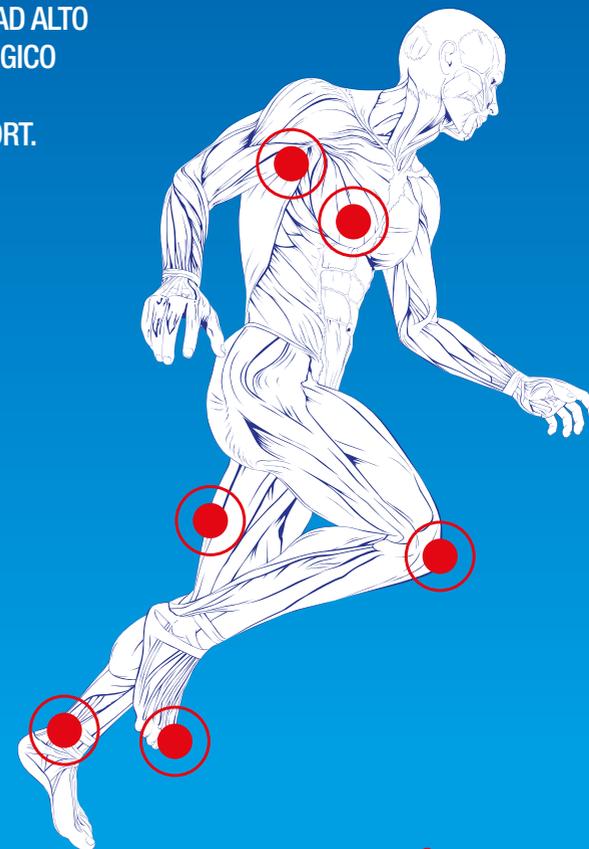

LINEA UNIKA®

## UNIKA®, GRAZIE ALLA PIÙ AVANZATA NANOTECNOLOGIA DEI POLIMERI, SI PRENDE CURA A TUTTO TONDO DELLA PARTE SOLITAMENTE PIÙ SOLLECITATA NELLA PRATICA SPORTIVA: IL PIEDE.

EUMEDICA ha studiato questa linea ad **alto contenuto tecnologico**, di elevatissima qualità e purezza e impareggiabile comfort. Sapendo bene che le prestazioni atletiche ripetute, o particolarmente intense, possono comportare microtraumi e affaticamento del ginocchio, caviglia e schiena, e ascoltando le esigenze delle persone attive e sportive, EUMEDICA ha qui creato questa gamma di prodotti pensata per garantire lo svolgimento delle attività preferite in sicurezza, senza dolori e fastidi. L'assortimento comprende anche due creme specifiche per prevenire il classico attrito delle dita dei piedi sulle scarpe e lo sfregamento dei capezzoli, ascelle e interno cosce. Gli articoli della **Linea UNIKA® Footcare e Creme sono realizzati con un silicone a tecnologia avanzata**, estremamente morbido e non untuoso, dagli effetti protettivi e **con ioni d'Argento (Ag)** dalle proprietà battericide e fungicide. La linea propone **tre tutori specifici** per il sostegno di articolazioni e muscolatura: leggeri, non ingombranti, molto traspiranti, agiscono efficacemente senza stringere.

**PRODOTTI TALMENTE CONFORTEVOLI CHE, UNA VOLTA APPLICATI, NON SI AVVERTONO PIÙ.**



### Ag - Sili Cover

Protezione leggera in silicone a tecnologia avanzata addizionato di Argento ionizzato. Protegge la pelle sulla superficie interna del primo raggio del piede. Evita le fastidiose infiammazioni causate dalla deviazione dell'alluce e dalla sporgenza dell'osso.

**Indicazioni:** alluce valgo, sporgenza del 1° metatarso, borsite.

Misure **Unica**  
Codice **UK002F**



### Ag - Sili Caps

Protezione delle dita del piede in silicone a tecnologia avanzata addizionato di Argento ionizzato. Ricopre il dito sino alla punta, evita l'infiammazione e il dolore provocati da pressione e attrito contro la calzatura.

**Indicazioni:** callosità delle dita, ragadi, lesioni da sfregamento o da eccessiva pressione delle scarpe.

Misure **S**  
Codice **UK004SF Piccolo**




### Ag - Sili Tube

Protezione delle dita del piede in silicone a tecnologia avanzata addizionato di Argento ionizzato che ricopre le dita lasciandone libera la punta. Evita l'infiammazione e il dolore provocati da pressione e attrito contro la calzatura.

**Indicazioni:** callosità delle dita, occhio di pernice, lesioni da sfregamento o da eccessiva pressione delle scarpe, dita a martello.

Misure **L**  
Codice **UK009LF**

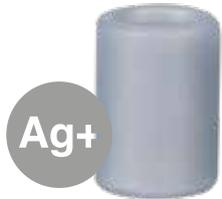

### Ag - Sili Comma

Correzione della deviazione delle dita del piede in silicone avanzato addizionato di Argento ionizzato. Da impiegarsi come divaricatore per prevenire la formazione di lesioni da attrito delle dita fra loro.

**Indicazioni:** dita sovrapposte, prevenzione di callosità, ipercheratosi, occhi di pernice tra le dita più piccole.

Misure **S, M, L**  
Codice **UK007SF**  
**UK007MF**  
**UK007LF**



### Ag - Sili Ring

Protezione e correzione del dito a martello in silicone a tecnologia avanzata addizionato di Argento ionizzato. Evita l'infiammazione e il dolore provocati da pressione e attrito contro la calzatura.

**Indicazioni:** dito a martello.

Misure **Unica**  
Codice **UK020DF - DX**  
**UK020SF - SX**



### Ag - Sili Diabolo


Correzione dell'alluce valgo in silicone a tecnologia avanzata addizionato di Argento ionizzato. Da impiegarsi come divaricatore in caso di deviazione dell'alluce, per prevenire la formazione di lesioni da attrito tra il primo e il secondo dito.

**Indicazioni:** alluce valgo, dita sovrapposte, prevenzione di callosità, ipercheratosi, occhi di pernice tra il 1° e 2° dito.

Misure **S, M, L**  
Codice **UK006SF**  
**UK006MF**  
**UK006LF**



### Ag - Shock con inserto rimovibile

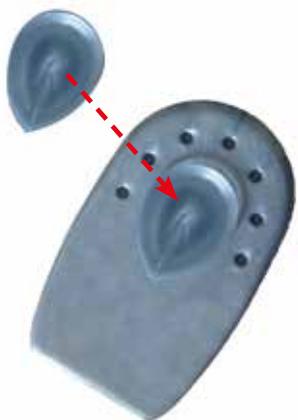


Talloniera con foro calcaneare centrale in morbido silicone, addizionato con argento dalle proprietà antimicrobiche, specifica per l'assorbimento dello shock tra piede e suolo durante la corsa o camminata. Provvista di un inserto a goccia rimovibile che aumenta lo scarico centrale sul tallone in caso di spina calcaneare. Ammortizza le vibrazioni che si producono a ogni passo, diminuendone la trasmissione alla colonna vertebrale e al ginocchio, contribuendo alla protezione delle articolazioni, in particolar modo dall'insorgenza di sintomatologia dolorosa, o attenuandola se già presente.

**Indicazioni:** sperone calcaneare e fascite plantare.

Misure **S/M, L**  
Codice **UK17S**  
**UK17L**

### Ag - Sili Tube Blu

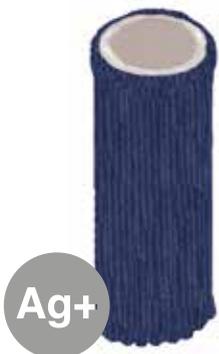

Costituito da un supporto tubolare in tessuto di maglia elasticizzata rivestita interamente in oleogel con Argento; si adatta con uniformità alle sporgenze del dito, lo avvolge completamente proteggendolo, ne ammorbidisce la pelle irritata con l'effetto lenitivo dell'olio minerale.

È particolarmente indicato per le callosità, le ipercheratosi, prevenzione della lesione da sfregamento o da eccessiva pressione delle scarpe; può essere ritagliato nella lunghezza desiderata con delle comuni forbici.

**Indicazioni:** callosità delle dita, occhio di pernice, prevenzione della lesione da sfregamento o da eccessiva pressione delle scarpe, dita a martello.


Misure **S, L**  
Codice **UK009SBF**  
**UK009LBF**

### Ag - Sili Caps Blu

Questa nuova guaina digitale, rivestita in oleogel addizionato con Argento, è adatta alla protezione delle dita del piede. Il polimero ha una struttura tridimensionale a legami incrociati e assorbe totalmente gli sfregamenti. Il gel si adatta alle deformità anatomiche. Per modificare il diametro del tutore è sufficiente trazionare la guaina orizzontalmente o verticalmente. È lavabile e riutilizzabile.

**Indicazioni:** callosità delle dita, ragadi, prevenzione della lesione da sfregamento o da eccessiva pressione delle scarpe.

Misure **S, L**  
Codice **UK004SBF**  
**UK004LBF**

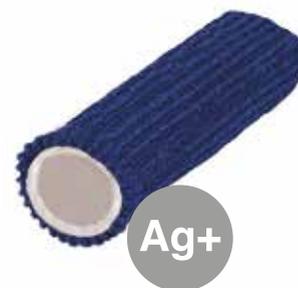

### Emulsione Antisfregamento

Particolari sostanze emollienti formano sulla pelle un film lubrificante superficiale, persistente e traspirante che protegge la pelle e previene fenomeni di irritazione dovuti allo sfregamento. Un particolare olio fluorurato (PFPE) dalle spiccate caratteristiche filmogene e protettive, combinato con sostanze lenitive (bisabololo, pantenolo e vitamina E) previene gli arrossamenti.

**Indicazioni:** formulazione non occlusiva espressamente studiata per gli atleti professionisti in particolare podisti e ciclisti che presentano aree cutanee particolarmente soggette a fenomeni di attrito e sfregamento come cosce, ascelle, ecc.

### Crema Siliconica Antiattrito

Esclusive sostanze silicomiche lubrificanti formano un film superficiale, persistente e traspirante che protegge la pelle dai fenomeni di irritazione dovuti allo sfregamento. Un amido particolare dona alla pelle una totale scorrevolezza e un elevato potere assorbente per prevenire attrito e frizioni.

**Indicazioni:** formulazione non occlusiva espressamente studiata per gli atleti professionisti (in particolare podisti e ciclisti) che presentano aree particolarmente soggette a fenomeni di attrito e sfregamento come piedi, capezzoli, ecc.





Codice **UK14AS - 75 ml**



Codice **UK13AT - 30 ml**



### Tabelle misure

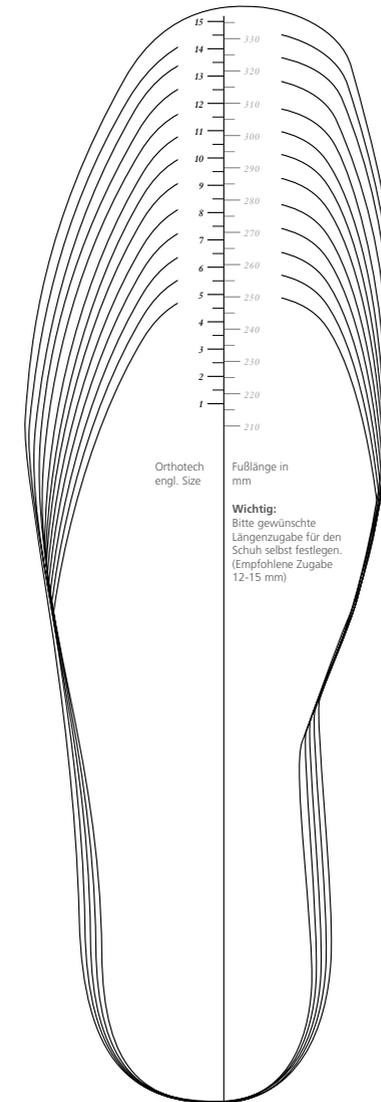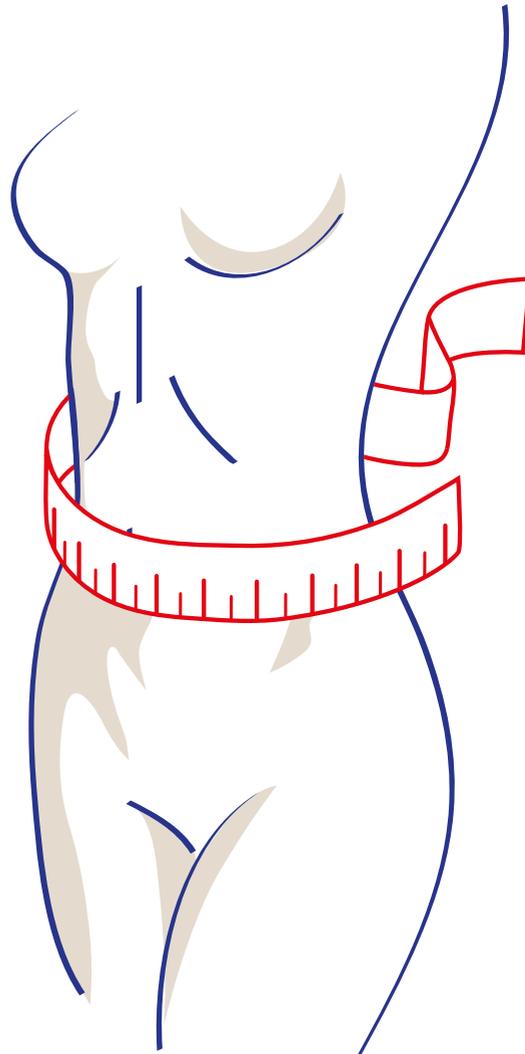

UK  
OrthoTECH  
FR

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
35	½	37	38	39	½	42	43	44	½	46	47	48	50



## TABELLE MISURE TUTORI COLLO, SPALLA, SCHIENA

### COLLO

#### COLLARI PUSH

Misura	1	2
Per tutti i modelli	cm 27 - 36	cm 37 - 46

#### COLLARE EUSOFT ED EUSOFT RINFORZATO

Misura	Small	Medium	Large
H. cm 8	cm 33 - 38	cm 39 - 43	cm 44 - 49
H. cm 10	cm 33 - 38	cm 39 - 43	cm 44 - 49

#### COLLARE EULIGHT

Misura	Small	Medium	Large
	cm 33 - 38	cm 39 - 43	cm 44 - 49

### SPALLA

#### TUTORE DI SPALLA PER EMIPLEGICI

Misura	XS	S/M	L/XL
Circonferenza	sotto cm 29 Ø	da cm 30 Ø a 33	da cm 34 Ø in poi

La circonferenza va presa +/- a cm10 al di sopra del gomito.

#### TUTORE PER SPALLA PUSH MED

Misura	1	2	3
Circonferenza	cm 55 - 75	cm 76 - 105	cm 106 - 140

#### EUFIX-SO STABILIZZATORE DI SPALLA

Misura	Small	Medium	Large	X - Large
Circonferenza torace	cm 80 - 95	cm 96 - 110	cm 111 - 125	cm 126 - 140
DX	EU044SD	EU044MD	EU044LD	EU044XLD
SX	EU044SS	EU044MS	EU044LS	EU044XLS

#### A-C BAND BENDAGGIO PER L'ARTICOLAZIONE ACROMION-CLAVEARE

Misura	Small	Medium	Large
Lunghezza avambraccio	cm 30 - 35	cm 36 - 40	cm 41 - 45
DX	EU045SD	EU045MD	EU045LD
SX	EU045SS	EU045MS	EU045LS



## TABELLE MISURE COLONNA VERTEBRALE

### TUTORI LOMBARI

#### TUTORE LOMBARE E TUTORE LOMBARE ORTHO NERO - ZERO IMPACT

Misura	S	M	L	XL
Per tutti i modelli	cm 75 - 85	cm 86 - 95	cm 96 - 105	cm 106 - 115
Altezza fascia lombare ANTERIORE		EU034 cm 20	EU046N Ortho cm 20	
Altezza fascia lombare POSTERIORE		EU034 cm 24	EU046N Ortho cm 24	


#### TUTORE LOMBARE PUSH CARE E PUSH MED

Misura	1	2	3	4	5	6
Per tutti i modelli	cm 65 - 75	cm 76 - 85	cm 86 - 97	cm 98 - 110	cm 111 - 125	cm 126 - 145
Altezza fascia lombare ANTERIORE			Push Care: cm 15		Push MED cm 16	
Altezza fascia lombare POSTERIORE			Push Care: cm 25		Push MED cm 32	



### CORSETTO LOMBARE TIGGES

#### MISURE

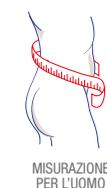

#### MODELLI

##### TIGGES K/N UOMO



##### TIGGES K/F DONNA



##### TIGGES E UNISEX



#### TAGLIE

	I° XS	II° S	III° M	IV° L	V° XL	Altezza Corsetto
<b>Uomo Tigges K/N</b>	Cod. T0100XS	Cod. T0100S	Cod. T0100M	Cod. T0100L	Cod. T0100XL	Ant. cm 16 Post. cm 20
<b>Donna Tigges K/F</b>	Cod. T0101XS	Cod. T0101S	Cod. T0101M	Cod. T0101L	Cod. T0101XL	Ant. cm 16 XS/S Ant. cm 18 M/L/XL Post. cm 23,5
<b>Unisex Tigges E</b>	Cod. T0103XS	Cod. T0103S	Cod. T0103M	Cod. T0103L	Cod. T0103XL	Ant. cm 17 Post. cm 23
<b>Circonferenza vita</b>	cm 75 - 85	cm 85 - 95	cm 95 - 105	cm 105 - 115	cm 115 - 125	



## TABELLE MISURE GOMITO, MANO, POLSO E GINOCCHIO

### GOMITO

#### SISTEMA FUNZIONALE PER GOMITO PUSH

Misura	1	2	3	4	5
Per tutti i modelli	cm 22 - 24	cm 25 - 26	cm 27 - 28	cm 29 - 32	cm 33 - 36



### MANO E POLSO

#### POLSIERA ULTRA FIT PLUS

Misura	Small	Medium	Large	X - Large
Per tutti i modelli	cm 13 - 15	cm 16 - 18	cm 19 - 20	cm 21 - 23



#### POLSIERA ULTRA FIT LACCI

Misura	Small	Medium	Large	X - Large
Per tutti i modelli	cm 13 - 16	cm 16 - 19	cm 19 - 23	cm 23 - 25

#### POLSIERA PUSH CARE E MED - FERULA PUSH SPLINT

Misura	1	2	3	4
Per tutti i modelli	cm 13 - 15	cm 16 - 17	cm 18 - 19	cm 20 - 21



#### PUSH ORTHO CMC TUTORE DINAMICO PER LA RIZOARTROSI


Misura	1	2	3
Per tutti i modelli	cm 16 - 19,5	cm 19,5 - 22,5	cm 22,5 - 26



### GINOCCHIO

#### SISTEMA FUNZIONALE PER GINOCCHIO PUSH

Misura	1	2	3	4	5
Per tutti i modelli	cm 28 - 31	cm 32 - 34	cm 35 - 37	cm 38 - 41	cm 42 - 45

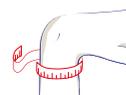

#### GINOCCHIERA, GINOCCHIERA RINFORZATA E GINOCCHIERA SYLYCON / EU-CONT®

Misura	I° - S	II° - M	III° - L	IV° - XL
Per tutti i modelli	fino a cm 32	cm 32 - 37	cm 37 - 42	oltre cm 42

EU-CONT



## TABELLE MISURE TUTORI CAVIGLIA E PIEDE

### CAVIGLIA E PIEDE

#### SISTEMA FUNZIONALE PER CAVIGLIA PUSH CARE E MED

Misura	1	2	3	4	5
Per tutti i modelli	cm 26 - 29	cm 30 - 32	cm 33 - 35	cm 36 - 38	cm 39 - 41



#### SISTEMA FUNZIONALE PER CAVIGLIA ORTHO AEQUI E MED AEQUI FLEX

Misura	1	2	3
Per tutti i modelli	cm 27 - 31	cm 32 - 34	cm 35 - 40

#### SISTEMA FUNZIONALE PER PIEDE CADENTE AFO PUSH ORTHO

Misura	1	2	3
cm.	cm 27 - 31	cm 31 - 34	cm 34 - 40
Num. piede	36 - 41	39 - 44	42 - 47



#### SISTEMA EUSAVE

Misura piede	Small	Medium	Large
	n° 35 - 38	n° 39 - 42	n° 43 - 46

#### SISTEMA EUSTATIC

Misura	Large	X - Large
Per tutti i modelli	n° 39 - 40	da 41 in poi

#### DORSAL NIGHT SPLINT

Misura	S - M	L - XL
Uomo	dal n° 38 al 42	dal n° 43 al 48
Donna	dal n° 37 al 42	dal n° 42 al 46

#### CAVIGLIERA FUNZIONALE ASO

Misura	X - Small	Small	Medium	Large	X - Large	XX - Large
Per tutti i modelli	cm 25,5 - 28	cm 28,5 - 30,5	cm 31 - 33	cm 33,5 - 35,5	cm 36 - 38	cm 38,5 - 40,5



#### CAVIGLIERA / EU-CONT®

Misura	I° - S	II° - M	III° - L	IV° - XL
Per tutti i modelli	cm 20 - 22	cm 22 - 24	cm 24 - 26	cm 26 - 30

EU-CONT



<b>SISTEMA AG - TECH®</b>		Misure	ITALIA
	Cod. Star1 / Star3	S	35/38
	Cod. Star1 / Star3	M	39/41
	Cod. Star1 / Star3	L	42/43
	Cod. Star1 / Star3	XL	44/47

<b>EU-SHOCK BLUE</b>		Misure	ITALIA
	Cod. EU082S	S	33/35
	Cod. EU082M	M	36/39
	Cod. EU082L	L	40/42
	Cod. EU082XL	XL	43 oltre

<b>EU-SHOCK RED</b>		Misure	ITALIA
	Cod. EU083S	S	33/35
	Cod. EU083M	M	36/39
	Cod. EU083L	L	40/42
	Cod. EU083XL	XL	43 oltre

<b>EU-SHOCK STANDARD</b>		Misure	ITALIA
	Cod. EU084S	S	33/35
	Cod. EU084M	M	36/39
	Cod. EU084L	L	40/42
	Cod. EU084XL	XL	43 oltre


<b>EU-SHOCK CON INSERTO RIMOVIBILE</b>		Misure	ITALIA
	Cod. EU085 S	S	34
	Cod. EU085 M	M	35/40
	Cod. EU085 L	L	41/46

<b>EU-SHOCK ABSORBER 4/4 E EU-SHOCK ABSORBER 4/4 MICROBICAL PROTECTION</b>		Misure	ITALIA
	Cod. EU086S - Cod. EU086MPS	S	35/38
	Cod. EU086M - Cod. EU086MPM	M	39/41
	Cod. EU086L - Cod. EU086MPL	L	42/43
	Cod. EU086XL - Cod. EU086MPXL	XL	44/47

<b>MEMORY 4G®</b>		Misure	ITALIA
	Cod. EU088S	S	35/38
	Cod. EU088M	M	39/41
	Cod. EU088L	L	42/43
	Cod. EU088XL	XL	44/47

**SILOSHEATH TABELLA MISURE**

Mis.	Code	Description	Approx. Gel Length	Approx. Gel Length	Approx. Distal Circ.	Approx. Prox. Circ.
I°	<b>13315</b>	Child	20 cm	25 cm - 34 cm	17 cm - 24 cm	17 cm - 26 cm
II°	<b>13325</b>	Short / Narrow	25 cm	38 cm - 44 cm	18 cm - 28 cm	18 cm - 32 cm
III°	<b>13335</b>	Short / Regular	25 cm	38 cm - 44 cm	20 cm - 34 cm	20 cm - 38 cm
IV°	<b>13345</b>	Medium / Narrow	33 cm	43 cm - 49 cm	20 cm - 34 cm	20 cm - 38 cm
V°	<b>13355</b>	Medium / Regular	25 cm	43 cm - 49 cm	23 cm - 37 cm	23 cm - 43 cm
VI°	<b>13365</b>	Large / Narrow	33 cm	46 cm - 54 cm	23 cm - 37 cm	23 cm - 43 cm
VII°	<b>13375</b>	Large / Regular	33 cm	46 cm - 54 cm	28 cm - 42 cm	28 cm - 49 cm
VIII°	<b>13385</b>	Large / Wide	33 cm	46 cm - 54 cm	31 cm - 50 cm	31 cm - 56 cm

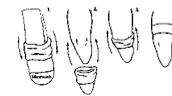


come indossare il coprimoncone protesico con gel silosheath



come togliere il coprimoncone

**TABELLA MISURE NOLDING DISTAL ROLL-ON**

Codice	Misure	Circonferenza all'apice del moncone	Spessore	Lunghezza
S110	S	∅ cm 18,5	mm 2	cm 15
S110	M	∅ cm 21,5	mm 2	cm 15
S110	L	∅ cm 23,5	mm 2	cm 15

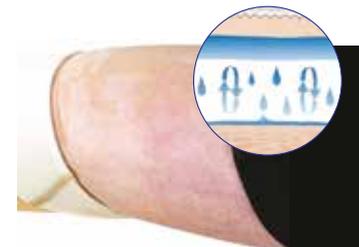
**I BENEFICI DEL GEL SULLA PELLE**

- L'esclusivo olio minerale medicale trasuda continuamente e gradualmente lungo tutto l'arco di vita del prodotto
- Formulato per il rilascio graduale sulla cute
- Il gel polimerico a reticolo tridimensionale si muove su tre piani distinti: ogni superficie si sposta sull'altra
- Fabbricazione secondo i più elevati standard: certificazione ISO 9001-2000
- Dermatologicamente testato
- Ammorbidisce e appiana le cicatrici e i trapianti cutanei.
- Benefico nella prevenzione delle lacerazioni della pelle per colpi, attrito e abrasione (utile in particolare per i pazienti che hanno in precedenza sofferto di problemi della pelle o della ferita)
- Esalta il comfort del paziente, migliorando l'elasticità e il trofismo delle cicatrici introflesse
- Migliora l'elasticità della pelle

**CON**

- Gel Protettivo
- Morbida
  - Soffice
  - Follicoli visibili
  - Colorito normale

**SENZA**

- Gel Protettivo
- Rugosa
  - Arrossata
  - Non liscia
  - Non elastica
  - Fragile

## GINOCCHIO

### GINOCCHIERA SPORTIVA KFS - ZERO IMPACT ACTIVE

Misura	S	M	L	XL
Per tutti i modelli	cm 32,5 - 35	cm 35,5 - 37,5	cm 38 - 42,5	cm 43 - 47,5



### TUTORE ROTULEO - ZERO IMPACT ACTIVE

Misura	S	M	L
circonf. sopra ginocchio	cm 30 - 36	cm 34 - 40	cm 38 - 44
circonf. sotto ginocchio	cm 26 - 32	cm 30 - 36	cm 34 - 38



### GINOCCHIERA E GINOCCHIERA RINFORZATA BAMBÙ - ZERO IMPACT ACTIVE

Mis.	Descrizione
I° - S	fino a cm 32
II° - M	cm 32 - 37
III° - L	cm 37 - 42
IV° - XL	oltre cm 42



Per una corretta scelta della taglia misurare la circonferenza del ginocchio dove indicato dalla freccia



## CAVIGLIA

### TUTORE CAVIGLIA - ZERO IMPACT ACTIVE

Misura	SM	LXL
Per tutti i modelli	n° 35 - 40	n° 41 - 44



### CAVIGLIERA BAMBÙ - ZERO IMPACT ACTIVE

Mis.	Descrizione
I° - S	cm 20 - 22
II° - M	cm 22 - 24
III° - L	cm 24 - 26
IV° - XL	cm 26 - 30



Per una corretta scelta della taglia misurare la circonferenza della caviglia dove indicato dalla freccia



## COLONNA

### TUTORE LOMBARE ORTHO SPORT - ZERO IMPACT ACTIVE

Misura	S	M	L	XL
Per tutti i modelli	cm 75 - 85	cm 86 - 95	cm 96 - 105	cm 106 - 115



Altezza fascia ANTERIORE **S**= cm 17 / **altre** = cm 17,5  
 Altezza fascia POSTERIORE **S**= cm 22 / **altre** = cm 23

## POLSO

### TUTORE POLLICE - PUSH SPORTS

Misura	S	M	L
Per tutti i modelli	cm 16 - 19	cm 19 - 22,5	cm 22,5 - 26



### POLSIERA - PUSH SPORTS


Misura	S	M	L
Per tutti i modelli	cm 13 - 15,5	cm 15,5 - 18	cm 18 - 20,5



## GINOCCHIO

### GINOCCHIERA - PUSH SPORTS

Misura	S	M	L	XL
Per tutti i modelli	cm 27 - 31	cm 31 - 35	cm 35 - 40	cm 40 - 45

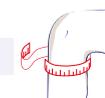

## CAVIGLIA

### CAVIGLIERA A 8 - PUSH SPORTS

Misura	S	M	L
Per tutti i modelli	cm 20 - 22,5	cm 22,5 - 25,5	cm 25,5 - 28,5



### CAVIGLIERA KICK - PUSH SPORTS

Misura	S	M	L
Per tutti i modelli	cm 28 - 32	cm 32 - 35	cm 35 - 39
Num. piede	n° 37 - 42	n° 40 - 45	n° 42 - 46



## Materiali POP



Cartelli vetrina e da banco



Espositori



Totem



ESPOSITORI DA TERRA

Misure Grande

H cm 194  
P cm 38  
L cm 58

Misure Ridotto

H cm 178  
P cm 31  
L cm 29



ESPOSITORE DA BANCO  
LINEA PIEDE

Misure  
H cm 40  
P cm 35  
L cm 24



ESPOSITORE DA BANCO  
EUDUPLEX®

Misure  
H cm 39,5  
P cm 23  
L cm 24



ESPOSITORE DA BANCO  
ALLUCE VALGO

Misure  
H cm 39,5  
P cm 23  
L cm 24



ESPOSITORE DA BANCO  
EUCAP  
EUPINKIEFINGER - EUVAL - EUCREST

Misure  
H cm 39,5  
P cm 23  
L cm 24

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



ESPOSITORE DA BANCO  
VALGOFIX

Misure

H	cm 45
P	cm 16
L	cm 29



ESPOSITORE DA BANCO  
EUSTATIC

Misure

H	cm 40
P	cm 35
L	cm 24



ESPOSITORE DA BANCO  
EUSAVE®

Misure

H	cm 39,5
P	cm 23
L	cm 24



ESPOSITORE DA BANCO  
EUSCAR MANO

Misure

H	cm 39
P	cm 35
L	cm 24



**ESPOSITORE DA BANCO**



**ESPOSITORE DA BANCO  
ALEVIA**

Misure  
H cm 39,5  
P cm 23  
L cm 24



**ESPOSITORE DA BANCO**



**ESPOSITORE DA BANCO  
EUSCAR**

Misure  
H cm 39,5  
P cm 23  
L cm 24



**ESPOSITORE DA BANCO**

**ESPOSITORE DA BANCO  
GEL AIR**

Misure  
H cm 45  
P cm 26  
L cm 20,5



*Gel-Air*

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



**ESPOSITORE DA BANCO**

**ESPOSITORE DA BANCO  
UNIKA**

Misure  
H cm 45  
P cm 26  
L cm 20,5



Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



ESPOSITORE DA BANCO  
PUSH ORTHO CMC

Misure  
H cm 39  
P cm 23  
L cm 24



Misure  
H cm 42  
L cm 30

ESPOSITORE DA BANCO  
PUSH SPORTS

Misure  
H cm 49  
P cm 35  
L cm 24



Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



Misure  
H cm 42  
L cm 30

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



Misure

H cm 42  
L cm 30



Misure

H cm 42  
L cm 30



Misure

H cm 42  
L cm 30



Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



# CARTELLI VETRINA



# TOTEM - FRONTE RETRO



Misure

H cm 42  
L cm 30



Misure

H cm 42  
L cm 30



# POSTER



Misure

H cm 100  
L cm 70

Eumédica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Misure

H cm 150  
L cm 50




Eumédica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



Misure

H cm 150  
L cm 50

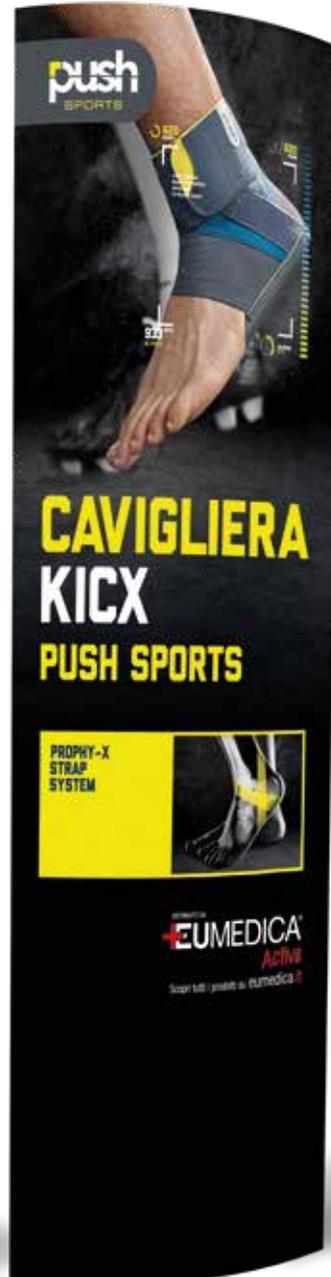

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario



Misure

H cm 150  
L cm 50



Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario





